



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Gima S.p.A. – Via Marconi, 1 – 20060 Gessate (MI) Italy  
Italia: tel. 199 400 401 – fax. 199 400 403  
Export: tel. +39 02 953854209/221/225 – fax. +39 02 95380056  
[gima@gimaitaly.com](mailto:gima@gimaitaly.com) – [export@gimaitaly.com](mailto:export@gimaitaly.com)  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

## ***Attelles de doigt à bande rembourrée***

### **MANUEL D'UTILIZATION**



**AVIS:** Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d'utiliser le produit



**REF** 04SD000A (Gima code 34120) – 04SD000B (Gima code 34121) - 04SD000C (Gima code 34122)



Megapharma Ospedaliera s.r.l.  
Via Asolana, 26/b · I-31017 Crespano del Grappa (TV)  
Tel. +39 0423 538746 · Fax. +39 0423 538748

## MODE OPÉRATOIRE:

- 1 – Mesurer la longueur d'attelle nécessaire, puis la découper conformément. (pour déterminer la taille, doubler la longueur entre le métacarpe et le bout du doigt à immobiliser) ;
- 2 – Placer une extrémité de l'attelle sur le dos de la main, couvrir toute la longueur du doigt et la plier de manière que l'autre extrémité rejoigne la paume ;
- 3 - Si nécessaire, plier le doigt de façon à obtenir la position des articulations souhaitée ; 4 – Solidariser l'attelle au moyen d'une bande Velpeau.

***PRÉCAUTIONS D'UTILISATION: À utiliser sous contrôle médical.***

## MATÉRIAU:

Aluminium, styrène-butadiène 100 % adhésif.

## TAILLES DISPONIBLES:

A 50 x 1,5 cm, B 50 x 1,9 cm, C 50 x 2,4 cm. Épaisseur 1,2 mm

## INDICATIONS:

Immobilisation et protection des phalanges et des articulations interphalangiennes, en cas de fracture.

## CONSERVATION:

Conserver dans un endroit sec, à l'abri des intempéries et de la lumière du soleil.