



PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Gima S.p.A. – Via Marconi, 1 – 20060 Gessate (MI) Italy
 Italia: tel. 199 400 401 – fax. 199 400 403
 Export: tel. +39 02 953854209/221/225 – fax. +39 02 95380056
gima@gimaitaly.com – export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

ATTELLES EN NÉOPRÈNE

Notice d'utilisation




AVIS: Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d'utiliser le produit.

REF

04SN0040 (Gima code 34680) – 04SN0020 (Gima code 34681) – 04SN0010 (Gima code 34682) –
 04SN0050 (Gima code 34683) – 04SN0030 (Gima code 34684) – 04KSBRO5 (Gima code 34685)



Megapharma Ospedaliera s.r.l.
 Via Asolana, 26/b · I-31017 Crespano del Grappa (TV)
 Tel. +39 0423 538746 · Fax. +39 0423 538748

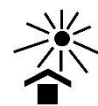

Composition

Néoprène – fixation en velcro acrylique
Les matériaux du dispositif sont sans latex naturel.

indications et destinations d'usage

Soutien, protection et immobilisation du membre ou de la zone sur laquelle l'attelle est appliquée. En cas d'utilisation prolongée ou d'hospitalisation de longue durée, il est conseillé d'enlever ou de desserrer l'attelle pendant de courtes durées afin d'aérer la partie concernée.

instructions d'utilisation

Appliquer l'attelle et la fixer par le velcro, vérifier que l'application a été correctement effectuée (l'extrémité avec le velcro de couleur différente doit être placée vers le haut), le centre en métal peut être plié ou enlevé en fonction des besoins. L'attelle ne doit pas être appliquée en contact direct avec la partie blessée.

Avertissements

Appliquer l'attelle avec la plus grande attention.

Il est conseillé de faire effectuer l'application par du personnel médical spécialisé ou de toute façon en suivant les conseils du personnel médical.



Avant d'appliquer l'attelle, informer le médecin ayant prescrit le dispositif de la présence d'éventuels troubles ou problèmes de santé.

En cas de réactions allergiques ou d'autre sorte provoquées par l'utilisation du produit, consulter un médecin.

Dispositif non stérile.

Conservation et entretien

Conserver le produit dans un lieu frais, sec et propre, à l'abri du soleil et des sources de chaleur.
Dispositif réutilisable. Laver à température maximale de 30°C.

Numéro de lot et date limite d'utilisation indiqués sur l'étiquette. Dispositif médical Catégorie 1

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

Toutes nos félicitations pour avoir acheté un de nos produits. Ce produit est conçu de manière à garantir des standards qualitatifs élevés tant en ce qui concerne le matériau utilisé que la fabrication. La durée de la garantie est de 12 mois à compter de la date de la fourniture GIMA.

Durant la période de validité de la garantie, la réparation et/ou la substitution de toutes les parties défectueuses pour causes de fabrication bien vérifiées, sera gratuite. Les frais de main d'oeuvre ou d'un éventuel déplacement, ainsi que ceux relatifs au transport

et à l'emballage sont exclus. Sont également exclus de la garantie tous les composants sujets à usure.

La substitution ou réparation effectuées pendant la période de garantie ne comportent pas le prolongement de la durée de la garantie.

La garantie n'est pas valable en cas de: réparation effectuée par un personnel non autorisé ou avec des pièces de rechange non d'origine, avaries ou vices causés par négligence, chocs ou usage impropre.

GIMA ne répond pas des dysfonctionnements sur les appareillages électroniques ou logiciels causés par l'action d'agents extérieurs tels que: sautes de courant, champs électromagnétiques, interférences radio, etc. La garantie sera révoquée en cas de non respect des prescriptions ci-dessus et si le numéro de matricule (si présent) résultera avoir été enlevé, effacé ou altéré. Les produits considérés défectueux doivent être rendus seulement et uniquement au revendeur auprès duquel l'achat

a été effectué. Les expéditions qui seront envoyées directement à GIMA seront repoussées.