



## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

**NOM DU PRODUIT : INDICATEUR INTÉGRATEUR D'OE DE TYPE 5 (IE3501)**

**DESCRIPTION DU PRODUIT :** Les bandes indicatrices par intégrateur d'OE de type 5 PMS Steritest sont conçues pour l'utilisation dans des stérilisateur à l'oxyde d'éthylène avec les conditions de fonctionnement suivantes : 60 % ( $\pm 10$  %) d'humidité, 37 °C ( $\pm 0,5$  °C) pendant 90 minutes ou 54 °C ( $\pm 0,5$  °C) pendant 30 minutes à une concentration d'OE de 600  $\pm 30$  mg/l.

Après l'exposition à la stérilisation OE, l'indicateur chimique fournit une confirmation visuelle précise en changeant de couleur, signalant que les conditions de la stérilisation ont été remplies.

La classification de type 5 de l'indicateur par intégrateur d'OE PMS Steritest est conforme à la norme EN ISO 11140-1.

Durant l'exposition à la stérilisation à l'oxyde d'éthylène à des conditions spécifiques, la couleur de l'indicateur passe du **blanc** au jaune moutarde.

### INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Placer une bande indicatrice chimique PMS Steritest dans chaque paquet, sachet pelable ou plateau à stériliser à l'oxyde d'éthylène. Placer la bande dans la zone du paquet considérée comme la plus difficile à atteindre par l'oxyde d'éthylène.
- Traiter le paquet comme d'habitude dans le stérilisateur à l'oxyde d'éthylène.
- Au terme du cycle de stérilisation, vérifier que l'indicateur a changé de couleur et est devenu jaune moutarde.
- Si le changement de couleur n'est pas visible ou pas uniforme, les conditions de stérilisation peuvent ne pas avoir été remplies et les articles doivent être traités à nouveau avec une bande indicatrice nouvelle/non traitée.
- Les produits stockés dans les conditions recommandées ont une durée de conservation de trois (3) ans à compter de la date de fabrication.
- Les dates de fabrication, de péremption et le numéro du lot sont imprimés sur la boîte du produit.
- Ne pas réutiliser les bandes indicatrices chimiques.

### CONDITIONS DE STOCKAGE

- Stocker à une température maximum de 35 °C et une humidité relative maximum de 70 %.
- Les bandes indicatrices chimiques doivent être maintenues à l'abri de la chaleur directe, de la lumière du soleil et d'une humidité excessive.



**PMS Tıp Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş**

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 12. Cad. No:2

Huzurkent/Mersin/TURQUIE

Téléphone : +90 324 238 7042 | Télécopie : +90 324 238 6549

pms@pmsmedikal.com | [www.pmsmedikal.com](http://www.pmsmedikal.com)