

## TUBES À ESSAI POUR CENTRIFUGEUSE

DISPOSITIF DE DIAGNOSTIC IN-VITRO CE  
Dispositif réservé aux professionnels de la santé

Type d'échantillon : sang, sérum ou urine

### NOTICE D'UTILISATION

- 1) Vérifier les informations sur le produit et l'intégrité de l'emballage.
- 2) Écrire sur l'étiquette les informations pertinentes (nom du patient, essai, échantillon, etc.).
- 3) Ouvrir le tube à essai pour centrifugeuse.
- 4) À l'aide de l'outil approprié, verser l'échantillon dans le tube pour dilution, stockage, centrifugation, culture bactérienne ou autres applications.
- 5) Refermer le tube à centrifuger avec son bouchon pour éviter tout écoulement pendant la centrifugation.

### INDICATIONS D'USAGE

- Dispositif réservé aux professionnels de la santé.
- Utiliser des gants de protection.
- Ne pas placer le dispositif à proximité d'une flamme.
- Ne pas utiliser le produit s'il est périmé, endommagé ou si l'emballage est ouvert.
- Ne pas en faire un usage autre que l'usage revendiqué. Tout autre usage est considéré comme inapproprié.
- Tenir hors de la portée des enfants.
- Utiliser le dispositif uniquement avec des accessoires appropriés.
- Conserver dans un endroit sec, à l'abri des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.
- Jeter le produit conformément à la législation locale en vigueur, dans un bac pour déchets à risques biologiques.
- Le dispositif est à usage unique. La réutilisation du dispositif en fera perdre toutes les performances et fonctionnalités.
- Tout incident grave mettant en cause le dispositif doit être signalé au fabricant et à l'Autorité compétente du pays dans lequel le patient réside.

T  
r  
a  
d  
u



F.L. Medical s.r.l. Unipersonale – Via Enrico Mattei, 20- 35038 Torreglia (PD) – Italy  
Phone +390495211475 – Fax +390495212566 – mail info@flmedical.com

