




# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**KIT PODOLOGIA CON ASTUCCIO RIGIDO - 7 STRUMENTI - PODIATRY STEEL FRAME KIT - 7 PIECES  
KIT PODOLOGIE AVEC ÉTUI RIGIDE - 7 UNITÉS - SET PODOLOGIE MIT FESTEM ETUI - 7 INSTRUMENTE  
KIT DE PODOLOGÍA CON ESTUCHE DE ACERO - 7 UNIDADES - KIT DE PODOLOGIA COM ARMAÇÃO  
EM AÇO - 7 PEÇAS**

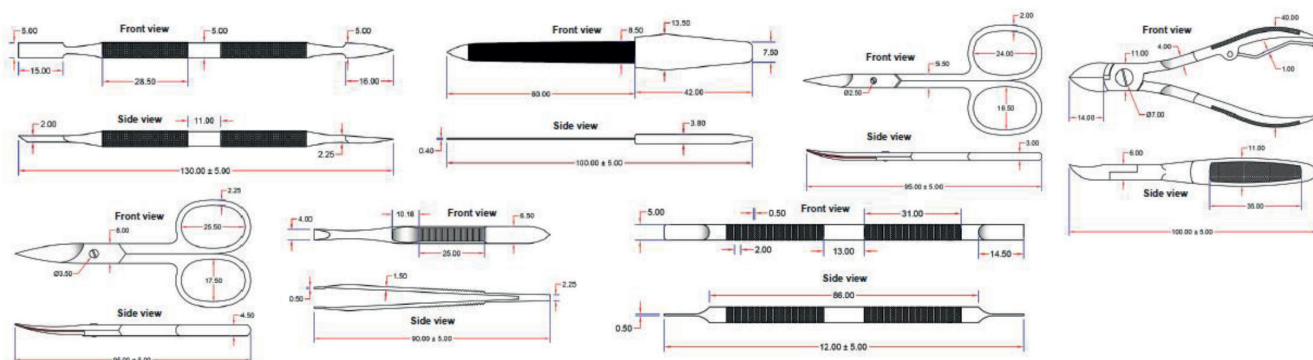

FRANÇAIS

### Description du dispositif

**Désignation :** Repousse-cuticules et curette  
13 cm

**Désignation :** Lime à ongles avec poignée  
blanche en plastique, 10 cm

**Désignation :** Ciseaux à cuticules 9,5 cm

**Désignation :** Pince à ongles 10 cm

**Désignation :** Ciseaux à ongles 9,5 cm

**Désignation** : Pince à épiler, 9cm

**Désignation** : Repousse-cuticules, à deux extrémités, 12 cm

### **Consignes d'utilisation**



- Tenir hors de la portée de personnes sans surveillance.
- Les dispositifs doivent être utilisés par des personnes formées.
- Strictement réservé à un usage professionnel – désinfecter avant toute utilisation.

### **Précautions, restrictions, avertissements, attentions particulières**

#### **Méthodes pour un nettoyage approprié**

Pour nettoyer correctement les ciseaux chirurgicaux, il faut utiliser du savon/détergent liquide, de l'eau ainsi qu'une brosse de lavage propre et désinfectée afin d'éliminer tous les débris et résidus visibles.

Tous les articles doivent être nettoyés à fond avec une brosse de lavage propre et désinfectée, sous l'eau courante.

Nettoyer ne veut pas dire désinfecter ; la désinfection est une procédure complètement à part. Plusieurs articles sont nettoyés de manière différente. Cela dépend souvent du matériau dont ils sont constitués et la manière dont ils sont utilisés.

OBSERVATION : les articles doivent être correctement nettoyés avant de pouvoir être désinfectés. Tous les articles doivent être soigneusement rincés et essuyés avec un chiffon propre ou du papier essuie-tout avant de les plonger dans un désinfectant.

#### **CONDITIONS DE GARANTIE GIMA**

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.

**REF** 39805

Importato da / Imported by / Importé par /  
Importiert von / Importado por / Importado por:  
**Gima S.p.A.**  
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)  
Made in Pakistan