

LIRE L'ENSEMBLE DES INSTRUCTIONS AVANT USAGE. CONSULTER UN MÉDECIN AVANT USAGE.

CONTRE-INDICATIONS : Cette canne n'est pas prévue pour les personnes de plus de 110 kg (242 lbs) - Elle n'est pas conçue pour être utilisées sur des surfaces gelées ou glissantes. - Elle ne convient pas aux personnes allergiques au latex.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION : Pour déplier la canne, tenir fermement la poignée et laisser les sections du bâton pliable se déplier vers le sol. Pour éviter les chutes, toujours s'assurer que chaque section (Fig. 1) est bien en place et solidement bloquée.

MISE EN GARDE : NE PAS démonter le corps de la canne Trusty Cane TM. La canne contient un cordon élastique à l'intérieur. La libération incontrôlée du cordon élastique situé à l'intérieur peut provoquer de graves lésions aux parties du corps non protégées, en particulier aux yeux, si le cordon élastique est coupé, effiloché ou endommagé. NE PAS tirer sur le cordon plus que nécessaire pour assembler ou démonter les sections.

Pour régler la hauteur de la Trusty Cane TM : Desserrer le système de blocage par rotation (Fig. 2) en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre sur plusieurs tours. Appuyer sur le bouton de blocage (Fig. 3) et tirer sur la poignée vers le haut pour allonger la canne ou pousser vers le bas sur la poignée pour réduire la hauteur. Ne pas oublier de resserrer le système de blocage par rotation après avoir réglé la canne Trusty Cane TM à la hauteur souhaitée.

MISE EN GARDE : Pour éviter les chutes, vérifier que chaque section est bien en place et bloquée et que le bouton de blocage est bien enfoncé.

Pour replier la Trusty CaneTM : La canne Trusty CaneTM peut facilement être repliée dans un format de voyage pratique en déboitant les 4 sections de la canne les uns des autres. Saisir chaque section près de l'articulation et la déboîter (Fig. 4). Les différentes sections de la canne se replieront facilement (Fig. 5).

Pour utiliser les lumières de la Trusty CaneTM : Le bouton situé sur le dessus de la poignée de la Trusty CaneTM (Fig. 6) active les lumières. En appuyant sur le bouton une fois, on active les lumières et si l'on appuie dessus une nouvelle fois, celles-ci s'éteignent. Les lumières s'éteindront automatiquement après 20 minutes.



Entretien de la Trusty Cane TM : Pour remplacer les piles, utiliser un tournevis à tête Philips pour dévisser les vis du compartiments des piles situé sous la poignée de la Trusty Cane TM. Retirer les piles usagées et les éliminer de manière appropriée. Utiliser 3 piles AAA ; aligner les pôles + et - comme indiqué, dans cas contraire les lumières ne s'allumeront pas. Remplacer les piles et resserrer les vis du compartiment des piles. Inspecter régulièrement la canne pour détecter tout signe d'usure, y compris tout effilochage du cordon élastique ou usure des pieds en caoutchouc. En cas de constat de signes d'usure, arrêter immédiatement d'utiliser la canne.

MISE EN GARDE : Ne pas mélanger des vieilles piles avec des piles neuves. Ne pas mélanger des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA : La garantie standard B2B Gima de 12 mois s'applique.

Gima 43044 - 43045 REF GB-801 (SV) GB-801 (BK)

Fabricato da/Manufactured by/Fabrique par/Fabricado por/Hergestellt von/
Fabricado por/Κατασκευάστηκε από/Произведено от/Vyrobce/Fremstillet af/
Tootja/Vaalistaja/Proizvodat/Gyártó/Ražots/Gamintojas/Produsert av/
Gefabriceerd door/Wyprodukowane przez/Fabricat de/Vyrába/Proizvajalec/
Tilberleed av/تصنيع بواسطة
Ningbo Gaobo Sports Co., Ltd
No.1, Xiajin, Dali, Shenzhen Town, Ninghai County
Ningbo 315514, China
Made In China

Importato da/imported by/importé par/importado por/importiert von/
Importado por/Εισαγυγί από/Dovezeno od strane/Dovezeno uživatelem/importeret
af/Importēja/ Tuojas/Uvezeno od strane/importálta/importēja/importavo/
Importert av/Geimporteerd door/importowane przez/importat de/Dovážal/
Uvozi/Importat av/توزيع بواسطة
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



