



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

CANNE LED

Notice d'utilisation




ATTENTION:

Assurez-vous d'avoir lu toutes les informations et consignes avant l'utilisation!!

- N'ESSAYEZ EN AUCUN CAS de démonter l'équipement vous-même.
- N'INSÉREZ aucune aiguille ou objet tranchant dans la poignée.
- NE cognez PAS la canne au sol ou sur une surface dure
- TOUJOURS éteindre l'appareil avant de retirer les piles.
- ÉLOIGNEZ la canne du feu.
- **110kg** de charge maximale.

CARACTÉRISTIQUES DE LA CANNE

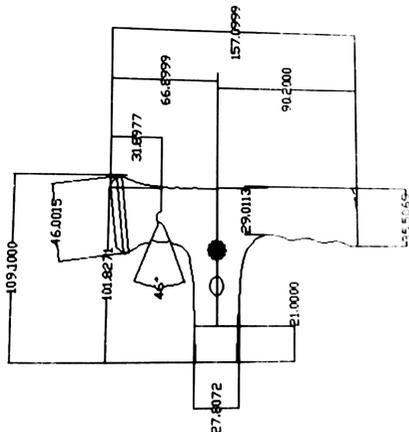


- 4 ampoules LED blanches ultra-lumineuses ϕ 5.
- 2 ampoules LED rouges clignotantes ultra-lumineuses d'avertissement ϕ 5.
- Sirène de 100 dB.
- Attache avec dragonne.
- Canne pliante ou réglable disponible.

ASSEMBLAGE




Soulever pour ouvrir le cache à l'arrière.

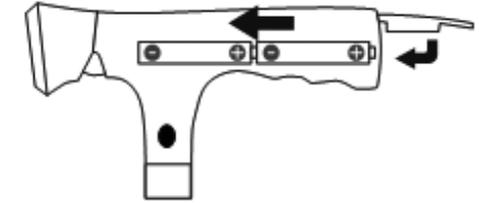


Insérer deux piles AAA dans la poignée, puis refermer le cache.

FONCTIONS MARCHÉ/ARRÊT

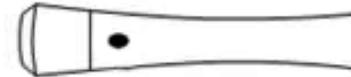

Bouton sur le haut


- Appuyer une fois pour allumer le voyant.
- Appuyer deux fois pour allumer les voyants blanc et rouge d'avertissement simultanément.
- Appuyer une fois encore pour éteindre.

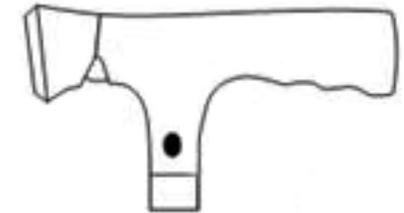

Bouton sur le côté

- Appuyer pour allumer l'avertisseur sonore.

REMARQUE D'UTILISATION

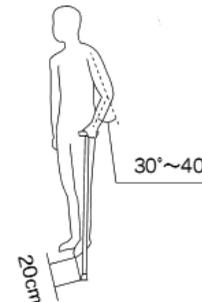

Meilleure position d'utilisation recommandée.



Canne réglable.
10 positions de 78 à 100,5 cm.



Élimination des déchets d'EEE: Ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Les utilisateurs doivent remettre leurs appareils usagés à un point de collecte approprié pour le traitement, la valorisation, le recyclage des déchets d'EEE.

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.

REF

GB-806 (GIMA 43050)
GB-806 (GIMA 43052)

Importato da/Imported by/Importé par/Importado por
GIMA S.p.A. - Via Marconi, 1 20060 Gessate (MI) - Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

Fabbricato da/Manufactured by/Fabriqué par/Fabricado por:
Ningbo Gaobo Sports Co., Ltd. No.1, Dali, Shenzen Town, Ninghai County
Ningbo 315614, China
Made in China

