



PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

---

***DEAMBULATORE A 3 RUOTE  
ROLLATOR WITH 3 WHEELS  
DÉAMBULATEUR 3 ROUES  
ROLLATOR MED 3 HJUL***

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

### INTRODUCTION

L'objectif de ce manuel est de fournir les instructions pour une utilisation normale et correcte de l'équipement, aussi bien par le patient que par son assistant/ accompagnateur.

### UTILISATION PRÉVUE

Le déambulateur a été conçu et réalisé pour être utilisé en intérieur par des patients ayant des difficultés à utiliser/à s'appuyer sur leurs membres inférieurs. Il sert à fournir au corps un appui qui, utilisé avec les deux bras, aide ou permet la mobilité qui serait autrement impossible ou réduite.

**ATTENTION !** Le déambulateur est principalement destiné à un usage en intérieur et uniquement sur des surfaces plates. S'il est nécessaire d'utiliser ce déambulateur en extérieur, il est recommandé de respecter les règles du code de la route comme n'importe quel piéton.

Avant chaque utilisation s'assurer que :

- Le déambulateur ait été réglé à la bonne hauteur.
- Les embouts des points d'appui soient en bon état. S'ils sont usés ou manquants, les remplacer immédiatement.
- Vérifier que les pieds du déambulateur aient été réglés à la même hauteur.

### ENTRETIEN

Le déambulateur ne demande aucun soin particulier pour la maintenance courante. Il est quand même conseillé d'effectuer régulièrement :

- la vérification de l'état général des différents composants
- le contrôle du serrage des vis et des écrous
- la vérification des pièces mécaniques en mouvement et, le cas échéant, la lubrification.
- le nettoyage avec un nettoyant neutre (ne pas utiliser de produits corrosifs ou nocifs) et le stockage dans un endroit sec et aéré.


### AVERTISSEMENTS !

Ne pas utiliser l'équipement en cas de dommages ou de pièces absentes. Ne pas utiliser à des fins différentes de celles pour lesquelles il a été conçu. Ne pas franchir d'obstacles ni utiliser sur des sols irréguliers ou non plats, mouillés ou glissants. L'utilisation du dispositif est déconseillée pour les personnes ayant une défaillance au niveau des mains ou des bras.


Utiliser exclusivement des accessoires d'origine. L'utilisation d'accessoires non originaux peut entraîner un risque de chute et de blessure. Ne pas utiliser dans les escaliers. L'utilisation de déambulateurs dans l'eau (douches, baignoires, piscines, etc.) peut entraîner l'oxydation des mécanismes de fonctionnement et endommager le déambulateur et/ou blesser l'utilisateur.

Capacité de charge maximale 100kg

### INSTRUCTION POUR L'ASSEMBLAGE

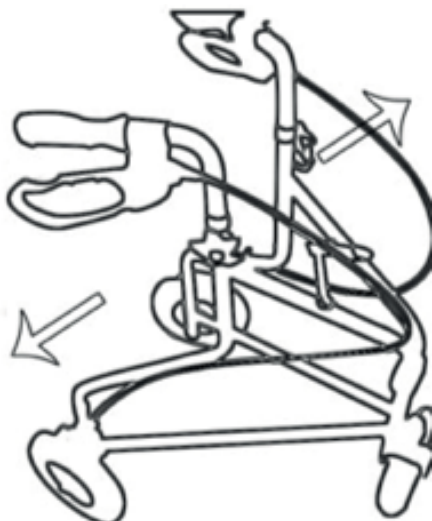



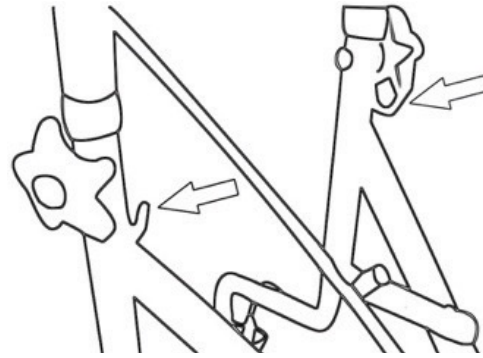



**Étape 1 :**  
ouvrir le « cadre » plié dans le sens montré dans l'image



**Étape 2 :**  
placer le panier sur les crochets



**Étape 3 :**  
placer le tube de la poignée autour des deux côtés du cadre, régler le produit à la hauteur adéquate et bloquer l'écrou. Essayer de pousser le déambulateur, contrôler la fiabilité du frein, le régler correctement en fonction des caractéristiques de la personne.

	Fabricant		À conserver dans un endroit frais et sec
	Consulter les instructions d'utilisation		À conserver à l'abri de la lumière du soleil
<b>REF</b>	Code produit	<b>LOT</b>	Numéro de lot
	Date de fabrication	<b>MD</b>	Dispositif médical
<b>EC</b> <b>REP</b>	Représentant autorisé dans la Communauté européenne		Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements)
<b>CE</b>	Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745		

### CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.

---

**REF** FS969H (43140)



**Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory (LTD.)**  
5 Xingfu Road, Zone A, Shishan Industrial Park,  
Nanhai District, Foshan City, China, 528000  
Made in China



**MedNet EC-Rep GmbH**  
Borkstrasse 10. 48163 Muenster. Germany

Importato da / Imported by / Importé par / Importerad av:

**Gima S.p.A.**

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

