



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**ESERCITATORE A PEDALI
BASIC PEDAL EXERCISER
APPAREIL D'EXERCICE À PÉDALE DE BASE
PEDALEADOR DE EJERCICIOS BÁSICO
EXERCITADOR DE PEDAL BÁSICO
BEWEGUNGSTRAINER MIT PEDALEN
ROTOR DO ĆWICZEŃ
MINI BICICLEȚĂ PENTRU EXERCITII
ALAP PEDÁLOZÓ GÉP
ΒΑΣΙΚΗ ΠΕΤΑΛΙΕΡΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ**

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante
Hersteller / Producent / Producător / Gyártó / Παραγωγός:
ZHEJIANG TODO HARDWARE MANUFACTURE CO., LTD
No.31th, Jinmao Building, CBD Centre,
Yongkang, Zhejiang, China
Made in China

Gima 43150

REF TD001P-2

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importado por
Eingeführt von / Importowane przez / Importat de / Importálta / Εισαγόμενα από:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com





1



2



3

-
- FRANÇAIS**
1. Connectez les tube de chaque côté avec les vis comme ci-dessus.
 2. Fixez la résistance au cadre principal avec les vis.
 3. Centrez le bouton de réglage dans le trou et tournez-le dans la résistance pour régler l'intensité de l'exercice.

Notice : Placez le produit sur un sol lisse. Vous pouvez vous exercer avec vos mains ou vos pieds, dans le sens horaire ou anti-horaire.

Avertissement : Veuillez ne pas vous tenir debout sur le produit directement (max 40Kg). Vous pouvez vous asseoir pour exercer vos pieds.

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.
