



PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

DEAMBULATORE PRINCE - pieghevole - azzurro
PRINCE ROLLATOR - foldable - light blue
DÉAMBULATEUR PRINCE - pliable - bleu clair
ANDADOR PRINCE - plegable - azul claro

Manuale di istruzioni - Instruction Manual - Mode d'emploi - Manual de instrucciones

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

REF HCT-9166B (Gima 43166)



Foshan HCT Medical Equipment Co.,
Ltd No.11,Dongyang 4th Road, Southern China Hardware Industry Base, Danzao Town,
Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, China
Made in China



SUNGO Europe B.V.
Olympisch Stadion 24, 1076DE Amsterdam, Netherlands



Gima S.p.A
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) - Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaiatly.com
www.gimaitaly.com



Nous vous remercions d'avoir choisi le déambulateur en roulettes pliant en aluminium avec siège.
 Lire attentivement ce manuel d'instructions avant d'essayer de l'utiliser.
 Si une assistance supplémentaire est nécessaire, contacter notre service clientèle.
 Nous espérons que vous apprécierez l'utilisation de votre nouveau produit.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Le déambulateur à roulettes avec siège est conçu pour être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur. Il est conçu pour être utilisé comme un déambulateur, et non comme un fauteuil roulant.
 Ne pas essayer sur l'appareil lorsqu'il est en mouvement.



Ne PAS utiliser l'appareil si l'on souffre de l'un des handicaps suivants :

- Problèmes de vue
- Incapacité à s'asseoir
- Graves problèmes d'équilibre
- Handicaps au niveau des bras, des épaules ou des mains

INFORMATION PRODUIT

Le déambulateur à roulettes est soigneusement emballé dans une boîte en carton qui peut être utilisée pour le stockage si nécessaire. Nous contacter immédiatement si le produit est endommagé à l'arrivée.

VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT



1. Ceinture dorsale du siège
2. Poche en filet
3. Système de blocage de la roue avant
4. Roue avant
5. Vis de réglage du frein
6. Roue arrière
7. Support de basculement
8. Système de blocage de la roue arrière
9. Coussin de siège avec poignée pliante
10. Système de blocage du réglage en hauteur
11. Poignée de frein
12. Poignée d'accoudoirs

** Les images des produits ne sont fournies qu'à titre indicatif.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1. Déambulateur à	x 1 corps
2. Mode d'emploi	1
3. Accessoires	1 Support de canne
	1 Ceinture dorsale du siège
	1 Poche en maille

GUIDE D'UTILISATION RAPIDE INSTALLATION



Étape 1 : Installer la roue avant

Appuyer sur le bouton rouge.
Régler la direction de la roue, l'insérer et la verrouiller fermement.



Étape 2 : Installer la roue arrière Aligner la fente du pied métallique avec le corps du déambulateur.

Si la roue est insérée correctement, vous entendrez un clic. Serrez ensuite la vis sur la poignée à fixer.



Étape 3 : Pousser sur le siège

Ouvrir le déambulateur et pousser sur le siège depuis les bords.
Vous entendrez un clic lorsque le siège sera bien en place. Bien vérifier qu'il est installé correctement avant de s'asseoir.

Étape 4. Installer la ceinture dorsale et le sac en filet

Installer la ceinture en suivant les photos affichées





SOLUTIONS RAPIDES

Régler la hauteur des accoudoirs

Appuyer sur le bouton rouge et régler la hauteur de l'accoudoir pour obtenir une position confortable.

S'assurer que les deux accoudoirs sont fixés à la même hauteur.



Actionner les freins

Tirer les deux poignées de frein vers le haut pour activer les freins.



Stationner

Pousser les poignées de frein vers le bas jusqu'à ce qu'elles se bloquent en place avec un clic pour garer l'appareil.

Relever les poignées de frein pour sortir de la position de stationnement.

Le siège peut être utilisé UNIQUEMENT en position de stationnement.



Franchissement d'obstacles

Mettre le pied sur l'aide au basculement.

Puis tirer en même temps les poignées vers l'arrière pour relever les roues avant. Cela permettra de franchir les bordures de trottoir et autres petits obstacles sans trop d'effort.

Cela permettra de franchir les bordures de trottoir et autres petits obstacles sans trop d'effort.



Réglage des freins (en option)

Desserrer la vis allen en tirant dessus pour l'extraire. (flèche 1)

Ne pas déplacer le déambulateur pendant le réglage des freins.

Pour effectuer de petits réglages: Desserrer le contre-écrou. (flèche 1)

Tourner la vis de réglage (flèche 2) dans le sens des aiguilles d'une montre pour réduire l'intensité du freinage. Tourner la vis de réglage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour augmenter l'intensité du freinage.

Enfin, resserrer le contre-écrou.






STOCKAGE

Pour plier et ranger le déambulateur, il suffit de tirer vers le haut la poignée du siège pour replier l'appareil.

PIÈCES DE RÉPARATION

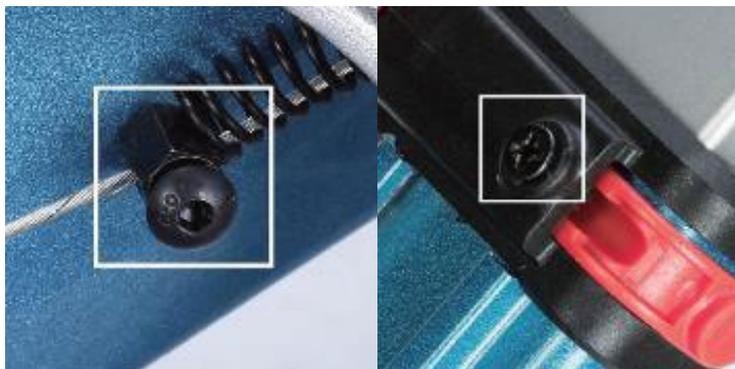

CONSEILS POUR LA PREMIÈRE UTILISATION

Contrôler les freins et les roues avant de l'utiliser.

Le déambulateur doit idéalement être utilisé sur un sol sec et plat. S'entraîner à l'utiliser à l'intérieur jusqu'à ce que vous soyez sûr de pouvoir l'utiliser à l'extérieur. Lorsque l'on utilise le déambulateur, il faut appuyer les mains sur le frein pour pouvoir s'arrêter immédiatement. Cela permettra de réduire le risque de chute.

Éviter de freiner brusquement pour éviter que le déambulateur ne dérape.

Demander de l'aide lorsque l'on utilise des escaliers ou trouver un ascenseur disponible.

La capacité de poids maximale est de 300-350 lb (135-160 kg) et de 11 lb (5 kg) pour le sac en filet.

Éviter d'utiliser le déambulateur par gros orage ou sur un sol très humide. Ralentir lorsque l'on descend une pente.

NETTOYAGE ET RANGEMENT

Le cadre peut être essuyé avec un chiffon humide ou lavé avec un produit de nettoyage neutre.

Les roues doivent être nettoyées uniquement avec une brosse à poils en plastique. Ne pas utiliser de brosses métalliques.

Un savon doux convient pour nettoyer le dossier, le siège et la housse de transport. Ne pas utiliser de nettoyeur à vapeur.

Sécher le déambulateur avec une serviette. Pour éviter la rouille, appliquer de l'huile pour machine sur les câbles de frein et les vis.

**SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT**

Taille et poids	
Dimensions du siège	45 x 25 cm
Hauteur du siège	54 cm
Largeur totale	65 cm
Longueur totale	70,5 cm
Hauteur totale Hauteur des poignées (Réglable sur 6 niveaux)	81~93,5 cm
Poids à vide (y compris la ceinture et la poche en maille)	19,1 lb
Charge maximale	136 kg
Capacité de la poche en filet en poids	11 lb
Dimensions une fois plié	70,5 x 25 x 8 1 cm
Roulettes	
Roues avant	25,5 x 3,5 cm
Roues arrière	20,3 x 3,5 cm
Matériaux	
Cadre	Aluminium (protection contre la corrosion)
Siège	Nylon, noir
Pneu	Poliuretano noir

	Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements)		Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745		Code produit
	Fabricant		Pas stérile		Consulter les instructions d'utilisation
	À conserver à l'abri de la lumière du soleil		À conserver dans un endroit frais et sec.		Dispositif médical
	Numéro de série		Représentant autorisé dans la Communauté européenne		Date de fabrication
	Numéro de lot		Importateur		

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.