

GIMA 43196 - 43198



Zhongshan Kangdebao(KDB) Rehabilitation Equipment Co.,Ltd.
Card 1, No.5, 24# Longcheng Road, Dongsheng Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China
Made in China

REF

KDB-697
KDB-698

EC REP

SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel, The Netherlands



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



NOM:

Chaise percée

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social. Usage prévu.

UTILISATION PRÉVUE

La chaise percée est utilisée comme lieu d'aisance des personnes malades, blessées ou handicapées, elle peut être utilisée à la maison ou à l'hôpital.

OPÉRATEUR

L'appareil peut être utilisé par l'utilisateur lui-même, le personnel infirmier ou le soignant.

POPULATIONS DE PATIENTS

Personnes handicapées, patients et personnes âgées.

CONTRE-INDICATIONS

Surveiller les enfants lorsqu'ils utilisent la chaise percée.

MODE D'EMPLOI

- 1. Soulevez la plaque de siège, placez correctement le seau sur le cadre du seau, puis posez la plaque de siège pour utilisation.
- 2. Après utilisation, fermez le couvercle du seau et retirez-le du cadre du seau.
- 3. Le poids maximum supporté de l'utilisateur est de 125 kg.

ENTRETIEN

- 1. La surface du produit ne doit pas être rayée par des objets durs afin d'éviter tout dommage matériel.
- 2. Pour le nettoyage et l'entretien quotidiens, appliquer un détergent synthétique neutre, essuyer à l'aide d'un chiffon humide et puis essuyer avec un chiffon sec.
- 3. Nettoyer et désinfecter régulièrement une fois par jour par le personnel médical ou les utilisateurs, et désinfecter soigneusement la chaise percée lors d'un changement de patient.
- 4. Ne pas entrer en contact avec des acides forts et des alcalis pour éviter la corrosion.

PRÉCAUTIONS ET MISES EN GARDE:

- 1. Placer la chaise percée dans un endroit sec et ventilé à l'abri de la lumière directe du soleil et éviter les produits chimiques corrosifs tels que l'huile, l'acide et l'alcali.
- 2. La chaise percée ne doit pas être exposée au soleil et à la pluie et doit être nettoyée et séchée immédiatement après chaque utilisation.
- 3. Certains lubrifiants de haute qualité peuvent être ajoutés aux pièces mobiles pour la lubrification pour un meilleur fonctionnement.
- 4. Vérifier régulièrement l'assemblage de la chaise percée pour éviter les accidents dus au desserrage et à la chute.
- 5. Vérifier fréquemment s'il y a des fissures partout dans la chaise percée et d'autres défauts qui affecteront l'utilisation de la chaise.
- 6. Vérifier fréquemment si le cadre du siège et la plaque du siège sont stables.
- 7. Le produit doit être mis en place de manière stable et ferme et ne doit pas bouger pour éviter tout dommage structurel.
- 8. Ne pas monter sur la chaise si les pieds sont démontés car elle pourrait tomber.

STOCKAGE

Le fauteuil roulant emballé doit être rangé dans un endroit ventilé et sec, sans gaz corrosif et dans une pièce bien ventilée et propre. Pour éviter l'humidité, la lumière forte, la tenir à l'écart des sources de chaleur pendant le transport.

GARANTIE

La période de garantie de ce produit commencera à compter du jour de votre achat. Accessoires 90 jours. Cadre principal 365 jours.

ÉLIMINATION

Les restrictions d'élimination dépendent de la contamination subie lors de l'utilisation et sont soumises à la législation nationale ou locale.

ÉTIQUETTES, CONCEPTION DU LOGO DE L'EMBALLAGE:

Symbole	Introductions	Symbole	Introductions
	Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745		Dispositif médical
	Fabricant		Représentant autorisé dans la Communauté européenne
	Date de fabrication		À conserver à l'abri de la lumière du soleil
	Numéro de lot		Pas stérile
	Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements)		Code produit
	Consulter les instructions d'utilisation		À conserver dans un endroit frais et sec
	Importé par		Identifiant unique

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois