



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

CARROZZINA IN ALLUMINIO CLASSICA - 46 CM

CLASSIC ALUMINIUM WHEELCHAIR - 46 CM

FAUTEUIL ROULANT EN ALUMINIUM CLASSIQUE - 46 CM

SILLA DE RUEDAS EN ALUMINIO CLÁSICA - 46 CM

CADEIRA DE RODAS CLÁSSICA DE ALUMÍNIO - 46 CM

CLASSIC ALUMINIUM RULSTOL - 46 CM

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.

Det är nödvändigt att meddela tillverkaren och de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten, om alla allvariga olyckor som inträffat i samband med den medicintekniska utrustning som levererats av oss.

REF

YK9063 (Gima 43235)


Importato da/Imported by/Importé par/Importado por/Importerad av:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



INTCO MEDICAL (HK) CO., LTD
FLAT/RM 19C, LOCKHART CENTRE, 301-307
LOCKHART ROAD, WAN CHAI, HONG KONG, P.R. China
Made in China



MedNet EC-REP GmbH
Borkstrasse 10, 48163 Muenster, Germany

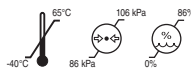

INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté l'un de nos produits. Les fauteuils roulants ont été conçus et fabriqués pour répondre à tous vos besoins pour une utilisation pratique, correcte et sûre. Ce manuel contient quelques suggestions pour une utilisation correcte du dispositif et des conseils précieux pour votre sécurité. Nous vous recommandons de lire attentivement tout le manuel avant d'utiliser l'article. En cas de doute, veuillez contacter le revendeur, qui saura vous conseiller correctement.

Remarque : Vérifiez toutes les pièces pour vous assurer qu'il n'y a pas de dommages dus au transport. En cas de dommages, ne l'utilisez pas. Contactez le revendeur pour plus d'instructions

UTILISATION

Les fauteuils roulants sont un moyen de transport essentiel pour les personnes handicapées ayant une capacité de marche nulle ou limitée. Le but est de faciliter les mouvements autonomes et de préserver le bien-être physique de la personne, en évitant l'apparition de complications liées à la position assise (escarres, douleurs posturales chroniques...).

MISES EN GARDE

- Consultez un médecin ou un thérapeute pour déterminer le réglage correct et l'utilisation correcte.
- Faites toujours attention à la présence de pièces mobiles qui pourraient entraîner le coincement des membres et des blessures.
- Portez une attention particulière aux surfaces mouillées.
- Il est recommandé de faire attention à ne pas se coincer les doigts dans certaines parties telles que les roues ou les freins lors de l'utilisation du fauteuil roulant

DESCRIPTION

- Cadre en aluminium à double croisillon.
- Cadre de revêtement en poudre gris fumé.
- Roues arrière à dégagement rapide*.
- Petites roues pour le levage.
- Roues arrière : 60 cm (24") avec pneus PU.
- Roues avant : 20 cm (8") avec pneus PU.
- Assise et dossier rembourrés en polyester.
- Accoudoirs rabattables avec la longueur du bureau.
- Repose-pieds escamotable, amovible et réglable en hauteur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Size	Length	Width	Height	Width Folded	Seat Width	Seat Depth	Back Height	Floor to Seat Height	Weight Capacity	Front Wheel	Rear Wheel	Weight with Footrest	Carton Size
													
46	80	65	90,5	30,5	46	40	44	50	120	20 (8")	60 (24")	13.2	82x31x94

MONTAGE

Ouverture du cadre



Saisissez les accoudoirs,
tirez-les vers l'extérieur



Soulevez le siège et fermez le fauteuil roulant, poussez le siège vers le bas. en joignant les deux accoudoirs

Repose-pieds réglable



Pour installer les repose-pieds, alignez les trous des supports avec leurs broches sur le cadre du fauteuil roulant, puis faites pivoter le repose-pieds vers l'intérieur en accrochant correctement le levier de verrouillage dans le cadre du fauteuil. Pour le retirer, relâchez le levier du repose-pieds du cadre du fauteuil, puis tournez-le vers l'extérieur et tirez vers le haut.

Comment gérer les roues arrière



Appuyez sur le bouton placé au centre des roues et faites coulisser.

Pour réinsérer les roues, appuyez sur le bouton central et insérez la goupille sur le trou du cadre.

UTILISATION

Pour monter sur le fauteuil roulant

- Rapprochez le fauteuil roulant du patient.
- Verrouillez les freins des roues arrière ; il est conseillé de retirer l'accoudoir du côté. Appuyez-vous sur le cadre en faisant force sur les bras, puis descendez lentement vers le siège.

Pour descendre du fauteuil roulant

- Approchez-vous le plus près possible d'un nouveau siège.
- Verrouillez les freins des roues arrière ; retirez l'accoudoir du côté. Reposez vos bras sur le cadre du siège sur lequel vous devez vous déplacer puis soulevez-le lentement vers celui-ci.

IMPORTANT! ! L'assistance ou la supervision d'un personnel qualifié est nécessaire pour éviter de glisser ou de tomber.

MOUVEMENT

Tenez la main courante des roues arrière et poussez dans la direction souhaitée.

Si nécessaire, le personnel soignant ou l'assistant peut pousser le fauteuil roulant à l'aide des boutons situés sur le dossier.

NETTOYAGE

Utilisez un chiffon humide avec un savon doux, la température de l'eau ne dépassant pas 30°C. Bien sécher avant utilisation. Si nécessaire, désinfectez le produit à l'aide d'un détergent désinfectant courant. Ne pas utiliser de machines à jet d'eau et/ou à vapeur. Ne pas utiliser de produits acides, alcalins ou solvants tels que l'acétone.

CONDITIONS GÉNÉRALES POUR LA MISE AU REBUT

Lors de la mise au rebut du dispositif, n'utilisez jamais les systèmes de collecte des déchets ménagers solides. Il est nécessaire d'éliminer l'appareil via les filots écologiques communs pour le recyclage des matériaux usagés

	Code produit		Fabricant
	Numéro de lot		Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745
	À conserver dans un endroit frais et sec		Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements)
	À conserver à l'abri de la lumière du soleil		Dispositif médical
	Consulter les instructions d'utilisation		Limite de pression atmosphérique
	Date de fabrication		Limite d'humidité
	Limite de température		

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.