



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

LITS D'EXAMEN ECONOMIQUES

Notice d'utilisation



AVIS: Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d'utiliser le produit.

REF 44450 - 44451 - 44455 - 44456



Gima S.p.A.
Gessate (MI) - Italy
Made in Italy



- 44450** - Lit économique peint noir
- 44451** - Lit économique peint blanc
- 44455** - Lit économique chrome bleu
- 44456** - Lit économique chrome beige

INTRODUCTION

Le lit d'examen économique est destiné à l'utilisation dans des structures hospitalières, communautaires, maisons de repos ; il est particulièrement adapté aux cabinets médicaux / cabinets de consultation

Aux termes de la Directive 2007/47/CE, le lit fait partie des DISPOSITIFS MÉDICAUX CLASSE I.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Ce lit est caractérisé par des dimensions réduites ; le matelas, lavable et ignifuge est composé de deux sections : une section fixe et une section inclinable dans différentes positions.


Composants

- 2 pieds
- 1 traverse avec dossier réglable
- 5 traverses
- Capitonnage du dossier
- Capitonnage de l'assise

INSTRUCTIONS

Le lit est livré en kit

1. Prendre les 2 pieds et commencer à fixer les traverses, y compris la traverse avec le dossier inclinable, avec des boulons.
2. En dernier lieu, fixer les capitonnages au châssis à l'aide des vis.

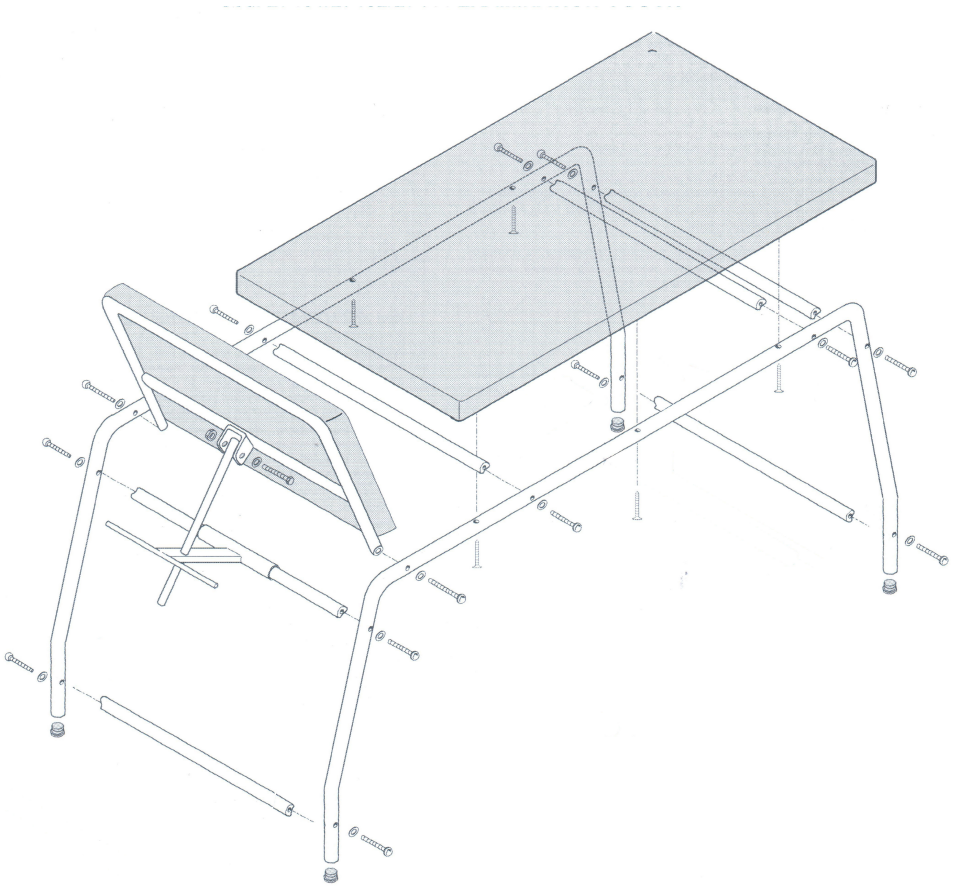

Fiche technique

2016	44450 - LIT D'EXAMEN ECONOMIQUE NOIR 44451 - LIT D'EXAMEN ECONOMIQUE BLANC 44455 - LIT D'EXAMEN ECONOMIQUE BLEU 44456 - LIT D'EXAMEN ECONOMIQUE BEIGE	
DESCRIPTION GÉNÉRALE DU PRODUIT	Lit d'examen de dimensions réduites, conçu pur les cabinets médicaux et les cabinets de consultation. Le matelas est composé de deux sections : une section fixe et une section inclinable dans différentes positions.	
DESCRIPTION DE CHAQUE PIÈCE	Structures et pièces en métal	- Structure tubulaire en acier réalisée à partir de ruban formé à froid Dimensions : 30x1,5 mm - Châssis chromé ou peint avec poussière époxy blanche RAL9010.
	Tissu et capitonnage	- Dimensions 61x50 - 61x130 - Capitonnage composé d'aggloméré h. 14 mm et caoutchouc h 40 mm. - Matériau lavable LEDERFLEX GAZEBO/AE (Composition: 87%PVC – 13% CO) de CLASSE 1 - Couleurs disponibles : Noir 991, Blanc 9010, Bleu 4915, Beige 151
	Dimensions	180 cm x 61 cm x h75 cm
	Poids	29 Kg
	Capacité de charge maximale	90/100 Kg
	Remarques	Les couleurs et les caractéristiques peuvent changer suite à des améliorations et/ou des modifications.

MISES EN GARDE SUR L'UTILISATION

- Respecter la capacité de charge maximale indiquée dans les fiches techniques.
- **Quand on règle la hauteur du dossier, vérifier que personne ne met les jambes, les mains ou autre dans la zone de déplacement : risque d'écrasement.**
- Éviter le contact direct avec des blessures ouvertes.
- N'installer le patient que lorsque le sommier est parfaitement horizontal.
- Déplacer le lit sans le soulever du sol.
- Si le lit est équipé de roulettes, vérifier avant tout déplacement que les roulettes ne sont pas freinées.
- Défense d'utilisation en plein air.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Pour le conserver au mieux, il est conseillé d'éviter l'exposition prolongée aux rayons solaires, le contact avec des environnements salins et les séjours dans des environnements très humides.

- Vérifier que les écrous de blocage des montants sont bien serrés.
- Contrôler périodiquement tous les points de fixation.
- Nettoyer le matelas avec un chiffon humidifié et savonné et rincer soigneusement à l'eau propre.
- Ne pas utiliser de solvants d'eau de javel ni de détergents chimiques ou sprays pour faire briller.
- Nettoyer le lit sans utiliser de produits abrasifs. Sécher soigneusement.
- Si une désinfection s'avère nécessaire, utiliser uniquement des produits adaptés non corrosifs.
- N'utiliser que des pièces de rechange originales.

GARANTIE

- Le lit est garanti pendant deux ans contre les défauts de matériaux et de fabrication, à l'exception des pièces consommables.
- Les manipulations ou dommages causés par une mauvaise utilisation du lit entraînent la déchéance immédiate de la garantie.
- Le présent dispositif médical a été créé exclusivement pour les modalités citées ci-dessus. Tout autre usage doit être considéré non conforme.
- Le fabricant ne répond pas des dommages aux personnes et aux biens dus à un usage non conforme du dispositif.