




# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**EXAMINATION TABLE  
LETTINO DA VISITA  
DIVAN D'EXAMEN  
CAMILLA DE EXPLORACIÓN**

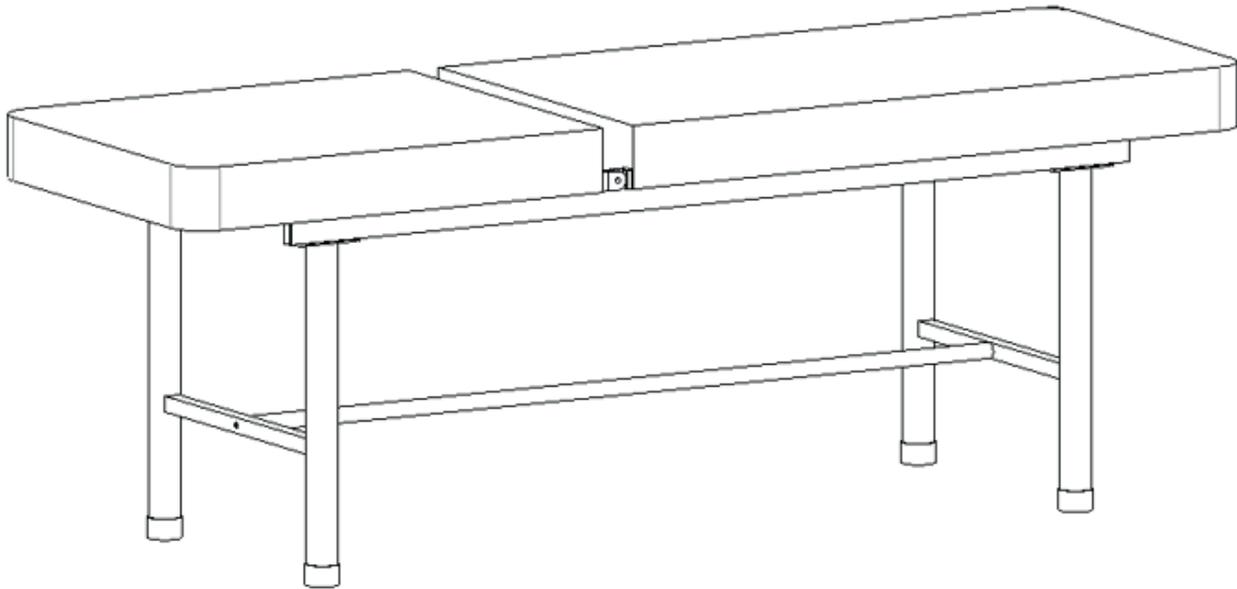

Manuale d'uso - User manual -  
Manuel d'utilisation - Introducción del manual

**ATTENZIONE:** Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

**ATTENTION:** The operators must carefully read and completely understand the present manual before using the product.

**ATTENTION :** Les opérateurs doivent lire attentivement et comprendre complètement le présent manuel avant d'utiliser le produit.

**ATENCIÓN:** Los operadores deben leer atentamente y comprender completamente el presente manual antes de utilizar el producto.

## Gima 44460



**Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd**  
No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture Demonstration  
Park, Zhangjiagang City, Jiangsu Province, China  
Made in China

**REF X09**



**SUNGO Europe B.V.**  
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,  
2909VA Capelleaan den IJssel, The Netherlands



**Gima S.p.A.**  
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
www.gimaitaly.com



**Remarque :**

Lire attentivement ce manuel et suivre scrupuleusement chaque étape avant installation et utilisation. Nous demandons à tous les utilisateurs de prendre connaissance du mode d'emploi et de toutes les mises en garde.

- Ce manuel s'applique au divan d'examen en acier inox X09. Il contient la procédure d'installation, les instructions d'utilisation et les points de contrôle pour l'entretien.
- Les illustrations de ce manuel sont uniquement destinées à servir de référence aux utilisateurs. Pendant l'utilisation effective, se référer au produit réel.
- Ce mode d'emploi comprend la description, les instructions, les informations sur l'entretien et les paramètres techniques du produit.
- Pour toute demande, contacter le service après-vente ou le distributeur.
- Toute personne utilisant ce produit ou ayant à faire avec ce produit doit lire ce manuel et s'y conformer.
- Sauf en cas de situations inattendues, les utilisateurs doivent savoir utiliser le produit et connaître les mises en garde.

**UTILISATION PRÉVUE**

Les divans d'examen médical faire partie intégrante du confort de patients qui souffrent de lésions, de traumatismes ou de chocs

1. Guide d'installation


1.1 Liste des accessoires de série

Après avoir ouvert l'emballage, contrôler que les pièces suivantes sont toutes présentes et en bon état.

Tableau a :



N°	Nom	Dessin	Spécifications	QTÉ	Unité
1	Matelas		/	1	pc
2	Structure portante avec pieds		539*543mm	2	pcs
3	Tube de raccordement		Φ25*1.2*1323-M8mm	1	pc
4	Vis	/	Se référer au Tableau a.1	1	set

Tableau a.1 :

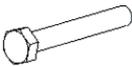
N°	Nom	Dessin	Spécifications	QTÉ	Unité
1	Vis tête hexagonale		M10*25mm	8	pcs
2	Rondelle plate		Φ10*Φ21*H1.8mm	8	pcs
3	Rondelle élastique		Φ10*Φ17*H3mm	8	pcs
4	Contre-écrou		M10mm	8	pcs
5	Vis tête hexagonale		M8*40mm	2	pcs
6	Rondelle plate		Φ8*Φ16*H1.2mm	2	pcs
7	Rondelle élastique		Φ8*Φ14*H2.5mm	2	pcs

## 1.2 Instillation de la structure portante avec pieds

Poser un tapis de protection et mettre la structure principale à l'envers ;

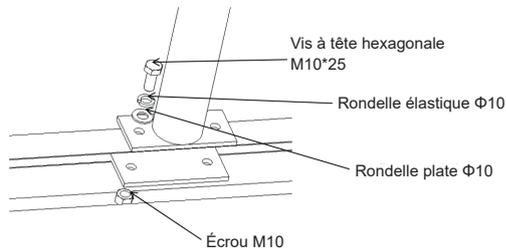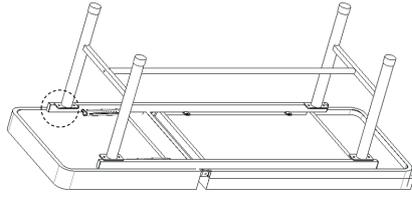

## 2. Méthode d'utilisation

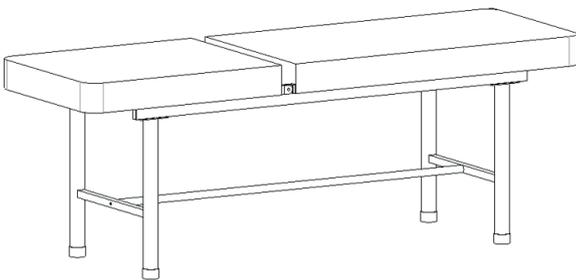

Dimensions	Longueur	mm	1900±10
	Largeur		600±10
	Hauteur		680±10
Poids	Charge maximale d'utilisation	kg	170

## 3. Entretien du divan d'examen en acier inoxydable

1. Pour utiliser le divan d'examen en toute sécurité, il est nécessaire d'effectuer des inspections de sécurité régulièrement sur le divan d'examen. Il est recommandé de le contrôler tous les six mois pour garantir que les raccords ne sont pas desserrés et que toutes les pièces fonctionnent correctement.
2. Lorsque la structure du divan d'examen vieillit et qu'elle atteint une certaine durée de vie utile, les pièces métalliques et en plastique du divan d'examen peuvent être recyclées.
3. Éviter de rayer le matelas avec des appareils à angle vif ou des couteaux pendant l'utilisation, et le nettoyer fréquemment pour qu'il reste propre et sec.
4. Si le matelas est taché accidentellement, il est recommandé de le nettoyer. Ne pas utiliser de produits chimiques alcalins ou corrosifs pour nettoyer le divan d'examen car cela entraînerait l'apparition de rouille sur la surface en acier inoxydable.

## 4. Emballage, transport et entreposage



1. Le divan d'examen est emballé conformément au contrat ou aux spécifications du produit.
2. Pendant le transport du divan d'examen, éviter les sorties précipitées, les vibrations violentes et le protéger des rayons du soleil et de la pluie.
3. Le divan d'examen doit être conservé avec :
  - a) Température ambiante : -40°C ~ +70°C.
  - b) Humidité relative : ≤ 95%.
  - c) Pression atmosphérique : 500hPa ~ 1060hPa.

## 5. Service après-vente


1. Conserver soigneusement les documents qui accompagnent le dispositif et les factures de ce produit. Ces documents doivent être présentés lorsque l'entreprise applique la garantie et effectue l'entretien du produit.
2. En cas de problème lors de l'utilisation du dispositif, contacter notre société immédiatement, afin qu'elle puisse fournir une assistance technique et des services d'entretien précis et rapides.
3. À partir de la date de vente, si le produit est cassé ou endommagé suite à une installation et à une utilisation correctes, et conformément aux spécifications, le produit bénéficiera d'une garantie gratuite d'un an et d'un service d'entretien à vie sur présentation du « certificat » ou de la facture.
4. À compter de la date d'achat, si le produit est effectivement endommagé ou ne fonctionne pas normalement en raison de problèmes de qualité dans un délai d'un an, l'entreprise fournira aux utilisateurs une réparation gratuite du produit.
5. Service après-vente à vie de la part du fabricant : JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD

**Remarque :** Tout accident grave survenu en relation avec le dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.


## 1.3 Installation du tube de raccordement

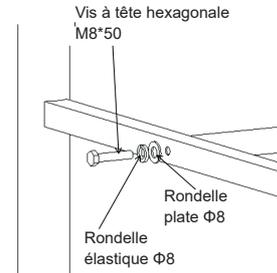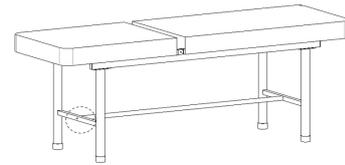

## 2.1 Fonction de levage du dossier

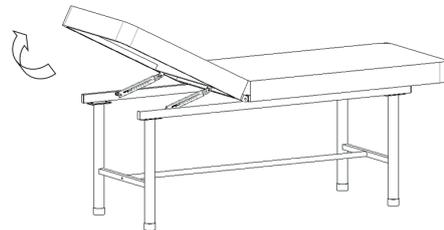

Soulever la plaque de dossier pour obtenir la fonction de levage du dossier, et relever la plaque jusqu'à la position la plus haute, puis poser le matelas de dossier.

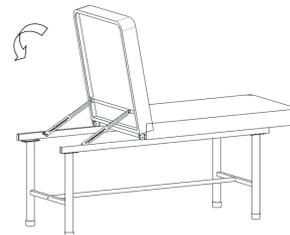

## FRANÇAIS

Symboles	
Symboles	Signification
	Fabricant
	Représentant autorisé dans la Communauté européenne
	Disposition DEEE
	Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745
	Suivez les instructions d'utilisation
	Dispositif médical
	Code produit
	Identifiant unique de l'appareil
	Importé par
	Limite de température
	Limite d'humidité
	Limite de pression atmosphérique
	À conserver à l'abri de la lumière du soleil
	À conserver dans un endroit frais et sec
	Attention : lisez attentivement les instructions (avertissements)
	Consulter les instructions d'utilisation
	Date de fabrication
	Numéro de lot