



TITANOX s.r.l. - via Canove 2/A - Loc. Canove dé  
Biazzì -26038 Torre dé Pícenardi (CR) - Italy -  
[www.titanox.it](http://www.titanox.it) [info@titanox.it](mailto:info@titanox.it) MADE IN ITALY



TITANOX s.r.l. - via Canove 2/A - Loc. Canove dé  
Biazzì - 26038 Torre dé Picenardi (CR) - Italy -  
[www.titanox.it](http://www.titanox.it) [info@titanox.it](mailto:info@titanox.it) MADE IN ITALY

## Mode d'emploi "Table de Mayo"

Base en acier inoxydable avec 4 roulettes diam. 50mm. Structure et plateau amovible en acier inoxydable. Hauteur réglable de 90 à 115 cm.

Dimensions du plateau : 70x45x1,7h cm.

Tous les produits sont fabriqués en éliminant les sources de risques possibles pour l'utilisateur en cas de choc involontaire, tels que des bords coupants ou des bouts pointus.

Le produit est destiné à l'usage exclusif de la part d'un personnel médical spécialisé, instruit sur l'utilisation et l'entretien des instruments. L'utilisation à des fins non liées à sa destination n'est pas consentie. L'usage incorrect ou un mauvais ou insuffisant entretien peuvent détériorer rapidement les instruments.

- Vérifiez le serrage correct de toutes les pièces mobiles avant et pendant l'utilisation ;
- Pour le nettoyage ne pas utiliser de produits abrasifs, acides, alcools, produit de nettoyage à base de chlore, de désinfectants et de l'acétone : le fabricant ne sera pas responsable des dommages causés par l'utilisation de matériaux qui peuvent endommager la surface du produit ou des produits chimiques corrosifs utilisés pendant le nettoyage

### CONDITIONS DE GARANTIE TITANOX

La garantie fournie de Titanox est de 12 mois de la date de la facture.

**Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.**

**REF M600481**



|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>IT</b> Fabbricante <b>ENG</b> Manufacturer <b>FR</b> Fabricant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | <b>IT</b> Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso<br><b>ENG</b> Caution: read instructions (warnings) carefully<br><b>FR</b> Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements)                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | <b>IT</b> Leggere le istruzioni per l'uso<br><b>ENG</b> Consult instructions for use<br><b>FR</b> Consulter les instructions d'utilisation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | <b>IT</b> Conservare al riparo dalla luce solare<br><b>ENG</b> Keep away from sunlight<br><b>FR</b> Á conserver à l'abri de la lumière du soleil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | <b>IT</b> Conservare in luogo fresco ed asciutto<br><b>ENG</b> Keep in a cool, dry place<br><b>FR</b> Á conserver dans un endroit frais et sec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | <b>IT</b> Codice prodotto <b>ENG</b> Product code <b>FR</b> Code produit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | <b>IT</b> Numero di lotto <b>ENG</b> Lot number <b>FR</b> Numéro de lot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | <b>IT</b> Dispositivo medico <b>ENG</b> Medical Device <b>FR</b> Dispositif médical                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | <b>IT</b> Il dispositivo è conforme ai requisiti del regolamento sui dispositivi medici (UE) 2017/745 ed è classificato come dispositivo medico di classe I<br><b>ENG</b> The product complies with the requirements of the regulation on medical devices (EU) 2017/745 and is classified as a Class I medical device<br><b>FR</b> Le produit est conforme aux exigences du règlement sur les dispositifs médicaux (UE) 2017/745 et est classé comme dispositif médical de classe I |



Manufacturer: TITANOX s.r.l. - via Canove 2/A -  
Loc. Canove dé Biazzi -26038 Torre dé Pinenardi  
(CR) - Italy - [www.titanox.it](http://www.titanox.it) MADE IN ITALY



M600481