

ΡΟΜΠΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ SMMS

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Όνομα Προϊόντος Ρόμπα Μιας Χρήσης από SMMS
Κωδικός Προϊόντος FGS-SG-SM50-L, FGS-SG-SM50-XL,
 FGS-SG-SM50-XXL

Μέγεθος Προϊόντος Μονάδα μέτρησης: εκ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΜΑ	21047	21048	21049
ΚΩΔΙΚΟΣ FULL GUARD	FGS-SG-SM50-L	FGS-SG-SM50-XL	FGS-SG-SM50-XXL
Μεγέθη	120x150 (L)	130x150 (XL)	140x160 (XXL)
Μήκος (Από ώμο ως στρίψωμα)	120	130	130
Φάρδος (μια στρώση)	150	150	150
Μήκος Ζώνης	65	65	65
Μήκος Μανικιού	59	59	59
Απόκλιση	±2	±2	±2

Μοντέλο Προϊόντος Τύπος Ρόμπας. L/XL/XXL

Δομή και Σύνθεση Το προϊόν χρησιμοποιεί 50g μη υφασμένο ύφασμα SMMS. Αποτελείται από μπροστινό μέρος, πίσω μέρος, μανίκια, κορδόνια και μανσέτες. Η τεχνολογική διαδικασία περιλαμβάνει κοπή, συγκόλληση με υπερήχους, τοποθέτηση κορδονιών, αυτοκόλλητου velcro, μανσέτων, πτύχωση και σφράγιση.

Προβλεπόμενη χρήση Τα προϊόντα αυτά είναι αποστειρωμένα με μέθοδο αποστείρωσης EO και χρησιμοποιούνται ως φράγμα για τη διεύθυνση υγρών και μικροβίων μεταξύ του ασθενούς και της χειρουργικής αίσθησης, του λοιπού χειρουργικού εξοπλισμού και του χειρουργικού προσωπικού.

Ανταρδείξεις Τα προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο μία φορά και η χρήση τους πρέπει να γίνεται αμέσως

μετά το άνοιγμα της συσκευασίας. Εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά, το προϊόν είναι βρεγμένο ή έχει ίχνη μούχλας μην το χρησιμοποιείτε.

Τρόπος χρήση του προϊόντος Ανοίξτε τη συσκευασία και αφαιρέστε το προϊόν, τινάξτε ελαφρώς τη ρόμπα, σηκώστε τις πλευρές του γιακά, βάλτε τα χέρια μέσα στα μανίκια, απλώστε τα χέρια προς τα μπροστά και δέστε τις ζώνες.

Αποθήκευση Πρέπει να αποθηκεύεται σε καθαρό δωμάτιο που είναι δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, με σχετική υγρασία που δεν ξεπερνά το 80%, χωρίς διαβρωτικά αέρια.

⚠ Προειδοποίηση

1. Το προϊόν αυτό είναι μιας χρήσης, μην το επαναχρησιμοποιείτε.
2. Το προϊόν αυτό προορίζεται για χρήση από ένα μόνο άτομο, μην το μοιράζετε ποτέ με άλλους.
3. Απαγορεύεται η χρήση όταν η συσκευασία ή τα προϊόντα έχουν υποστεί ζημιά.

Προσοχή: Τυχόν σοβαρά ατυχήματα που σχετίζονται με το προϊόν θα πρέπει να αναφέρονται στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο χρήστης ή ο ασθενής.

Ισχύς 2 έτη.

Ημερομηνία παραγωγής Δείτε ημερομηνία στη συσκευασία

Ημερομηνία λήξης Δείτε ημερομηνία στη συσκευασία

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΓΙΜΑ

Ισχύει η τυπική εγγύηση B2B της Gima διάρκειας 12 μηνών.

REF	Κωδικός προϊόντος	☀	Κρατήστε το μακριά από ηλιακή ακτινοβολία	☂	Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον
LOT	Αριθμός παρτίδας	CE	Ιατρική συσκευή σύμφωνα με την ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/745	⚠	Προσοχή: διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες (ενστάσεις)
🏭	Παραγωγός	📅	Ημερομηνία παραγωγής	MD	Ιατρική συσκευή
STERILE EO	Αποστειρωμένο με αιθυλενοξειδίο	⌚	Ημερομηνία λήξεως	⛔	Μην το χρησιμοποιείτε αν η συσκευασία είναι κατεστραμμένη
💧	Όριο υγρασίας	📖	Läs bruksanvisningen	⛔	Προϊόν μιας χρήσεως. Μην το χρησιμοποιείται εκ νέου
🌡	Όριο θερμοκρασίας	EC REP	Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ε υρωπαϊκή Ένωση	🍷	Εύθραστο, χειρίζεστε με προσοχή
↑↑	Αυτή είναι η πάνω πλευρά	🙌	Χειρίζεστε με προσοχή		

REF FGS-SG-SM50-L (21047)
 FGS-SG-SM50-XL (21048)
 FGS-SG-SM50-XXL (21049)



Xianning Full Guard Medical Products Co.,Ltd
 Yongan East Avenue,
 Xianning Economic Development
 Zone, Xianning City, Hubei Province, China
 Made in China



ZOUSTECH S.L.
 Pso. Castellana, 141 - Planta 19,
 28046 - Madrid, Spain

Importerad av / Εισαγωγή από:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
 gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

STERILE EO MD

