

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III

1 — Xianning Huaxin Garment Co.,Ltd.
Address :No.86, Guanbu section, 107 national highway, Xianning, Hubei, China

HUAXIN-T
Protective Clothing Category III

2 — **CE 2895**

3 — TYPE4-B EN14605/05 +A1/09
TYPE5-B ENISO13982-1/04 +A1/10
TYPE6-B EN13034/05 +A1/09

EN 1073-2 EN1073-2/02 Class1
EN 1149-1 EN1149-5/18
EN 14126 EN14126/03

4 — **REG.EU 2016/425**

5 — Year of manufacture: 2022 EN ISO 13688:2013
Internal Code: #

6 — **DO NOT REUSE**
Batch#

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: HUAXIN-T)

Σήμανση:

Κάθε ρούχο φέρει αναγνωριστική εσωτερική ετικέτα όπου αναφέρεται ο τύπος προστασίας που παρέχεται καθώς και άλλες πληροφορίες.

- Όνομα κατασκευαστή.
- Σήμανση CE – Ο ρουχισμός συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των μέσων ατομικής προστασίας Κατηγορίας III σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/425. Η δοκιμή του πρωτότυπου και η επακόλουθη κατοχύρωση του σήματος CE πραγματοποιήθηκε στο Shirley® Certification Services (Αριθμός Κοινοποιημένου Οργανισμού 2895).
- «Τύποι» ολόσωμης προστασίας που αναπτύχθηκαν από την Xianning Huaxin Garment Co., Ltd. και προσδιορίστηκαν από τα Ευρωπαϊκά πρότυπα για τις Ενδυμασίες Προστασίας από Χημικά: Τύπος 4 EN14605:2005+A1:2009, Τύπος 5:EN 13982-1:2004, Τύπος 6:EN 13034:2005. Ο ρουχισμός δοκιμάζεται ενάντια σε βιολογικούς (EN14126) και ραδιενερ-

γούς (EN1073-2) κινδύνους, καθώς και αντιστατικούς EN1149-5 και EN1149-1, και πρέπει να χρησιμοποιείται με συμβατό εξοπλισμό και με συμβατά σωματίδια εργασίας για να είναι αποτελεσματικός.

4. Αυτό το ένδυμα είναι περιορισμένης χρήσης προστατευτικό ρουχισμό κατασκευασμένο για να πληροί το πρότυπο EN ISO 13688: 2013 προστατευτικά ενδύματα γενικές απαιτήσεις. Μεγέθη ρουχισμού.

Μέγεθος	Στήθος (εκ.)	Ύψος (εκ.)
S	84-92	164-170
M	92-100	170-176
L	100-108	176-182
XL	108-116	182-188
XXL	116-124	188-194

- Ο χρήστης πρέπει να διαβάσει τις παρούσες οδηγίες χρήσης.
- Έτος κατασκευής.
- Διεθνή σύμβολα για τη φροντίδα των ρούχων: Απαγορεύεται το πλύσιμο, το σιδέρωμα, το στέγνωμα σε στεγνωτήριο, το στεγνό καθάρισμα και η χρήση λευκαντικού. Φυλάξτε το προϊόν μακριά από φωτιά και θερμότητα.
- Κατάλληλο για μια χρήση-μην το επαναχρησιμοποιείτε.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Φυσικές Ιδιότητες Υφάσματος		Κλάση
Αντοχή στην Τριβή	EN 530 Meth.2	Κλάση 1
Αντίσταση Ευελιξίας	ISO 7854 B	
Αντοχή στο Τραπεζοειδές Σχίσσιμο MD	ISO 9073-4	Κλάση 4 Κλάση 2
Αντοχή στη Διάτρηση	EN863	Κλάση 1
Αντοχή σε Εμφεκτισμό MD	ISO 13934-1	Κλάση 1
Προστασία από Ραδιενέργεια	EN1073-2:2002	Κλάση 2
Μολυσματική Αντοχή (στερεά σωματίδια)	ISO 22612	Κλάση 3
Αντοχή στην ανάφλεξη	EN 13274-4	Έγκριση
Χημικές Ιδιότητες Υφάσματος Μέθοδος Δοκιμής	Δείσδυση	Απωθητικότητα
Αντίσταση σε χημικά	EN ISO6530	Κλάση 3
Θεϊκό οξύ 30%		Κλάση 3
Υδροξείδιο του νατρίου 10%		Κλάση 3
ο-Ξυλόλιο		Κλάση 3
Βουταν-1-όλη		Κλάση 3
Απόδοση δοκιμής ολόσωμης φόρμας		
Τύπος 4 Στεγανή προστασία ενάντια σε ψεκασμό	Μέθοδος όπως ορίζεται από το EN14605:2005+A1:2009	Έγκριση IL 82/90≤30%&TILS 8/10≤15%
Τύπος 5 Διάρρηξη προς το Εσωτερικό	Μέθοδος όπως ορίζεται από το EN 13982-1&2:2004	Έγκριση
Τύπος 6 Ελαφρύς ψεκασμός	Μέθοδος όπως ορίζεται από	

το EN13134:2005	Έγκριση
En14126:2003	Έγκριση
Φράγμα ενάντια σε μολυσματικούς παράγοντες	Έγκριση
En1073-2:2002	Έγκριση
Φράγμα ενάντια σε ραδιενεργά σωματίδια	Έγκριση
EN1149-5/18 Αντιστατικό	Έγκριση
Προστασία από Μολυσματικούς Παράγοντες EN14126	
ISO 16603	Κλάση 6
ISO 16604	Κλάση 6
EN ISO 22610	Κλάση 6
ISO 22611	Κλάση 3
ISO 22612	Κλάση 3

Τομείς χρήσης:

Ρουχισμός σχεδιασμένος για προστασία από επικίνδυνες ουσίες και από μόλυνση τόσο του προϊόντος όσο και του προσωπικού. Χρησιμοποιούνται γενικά για την προστασία από ξηρά σωματίδια και από επικίνδυνες πιτσιλιές και ψεκασμούς χαμηλής έντασης. Η τελική απόφαση για την καταλληλότητα της ενδυμασίας αποτελεί ευθύνη του χρήστη. Η φόρμα μετά τη χρήση ενδέχεται να είναι μολυσμένη και πρέπει να αφαιρείται προκειμένου να αποφευχθεί η μόλυνση του χρήστη.

Περιορισμοί:

Όταν χρησιμοποιείτε τον ρουχισμό μαζί με άλλα ΜΑΠ και προκειμένου να υπάρχει πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις EN για ενδυμασίες Τύπου 4/5/6, όλα τα ανοίγματα π.χ. στους καρπούς, στους αστραγάλους, στο λαιμό κτλ., πρέπει να είναι καλά σφραγισμένα. Ο χρήστης είναι ο μοναδικός κριτής της καταλληλότητας του απαιτούμενου τύπου προστασίας και του σωστού συνδυασμού ρουχισμού, αξεσουάρ και βοηθητικού εξοπλισμού. Σε περίπτωση μόλυνσης, φθοράς ή ζημιάς, η ενδυμασία θα πρέπει να αφαιρείται και να απορρίπτεται σωστά όσο το δυνατό γρηγορότερα. Ο χρήστης πρέπει πάντα να ελέγχει και να επιβεβαιώνει την ακεραιότητα της ενδυμασίας προτού τη φορέσει. Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η πιθανότητα θερμοπληξίας υπό πολύ ζεστές συνθήκες. Η θερμοπληξία μπορεί να μειωθεί ή να εξαλειφθεί μέσω της σωστής χρήσης εσωρούχων και εξοπλισμού αερισμού. Ακραίες συνθήκες ζέστης και κρύου μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την απόδοση της εν λόγω ενδυμασίας. Η ενδυμασία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται όταν υπάρχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες ενάντια στις οποίες δεν έχει δοκιμαστεί. Παρόλο που παρέχεται περιορισμένη προστασία ενάντια σε διάφορες χημικές ουσίες, συμβουλευτείτε τις φυσικές ιδιότητες της ενδυμασίας ως προς τη δοκιμή Τύπου 4, Τύπου 5 και 6. Ο χρήστης πρέπει πάντα να φοράει συμβατά γάντια, μπότες και αναπνευστικά μέσα προστασίας που είναι ανθεκτικά στα χημικά. Τα γάντια πρέπει να καλύπτουν τις ελαστικές μανσέτες. Ο χρήστης πρέπει να επιλέγει το σωστό μέγεθος ώστε να επιτρέπεται η ανεμπόδιστη κίνηση στα πλαίσια του προβλεπόμενου κινδύνου. Αν είναι απαραίτητο, επικοινωνήστε με τον Κατασκευαστή/Διανομέα για συμβουλές.

Αποθήκευση και Απόρριψη:

Η ενδυμασία μπορεί να αποθηκεύεται σύμφωνα με τις συνθήκες πρακτικές αποθήκευσης, ωστόσο συνιστάται η αποθήκευση σε ξηρό μέρος μακριά από πηγές φωτός, θερμότητας και από άμεση έκθεση στον ήλιο. Περιορισμοί ως προς την απόρριψη προβλέπονται μόνο σε περίπτωση μόλυνσης κατά τη διάρκεια της χρήσης. Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει την ευθύνη σε περίπτωση ακατάλληλης χρήσης ή απόρριψης των ενδυμασιών.

Λήξη:

Συνιστάται η χρήση του προϊόντος να γίνεται εντός περιόδου 3 ετών από την ημερομηνία κατασκευής/ παραγωγής που αναγράφεται στη συσκευασία.

Εγκρίσεις:

Εγκρίσεις CE από:
(Κοινοποιημένο Οργανισμό: 2895)
Shirley® Port Tunnel Business Park,
Office 13 Unit 21, Dublin 17, ROI Ireland

REF	Κωδικός προϊόντος
LOT	Αριθμός παρτίδας
	Παραγωγός
	Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης
	Ημερομηνία παραγωγής
	Ημερομηνία λήξεως
CE	Μέσων ατομικής προστασίας Κατηγορίας III σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/425

REF

HUAXIN-T(S) (GIMA 21080) ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΜΟΝΩΣΗ - S - μιας χρήσης
HUAXIN-T(M) (GIMA 21081) ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΜΟΝΩΣΗ - M - μιας χρήσης
HUAXIN-T(L) (GIMA 21082) ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΜΟΝΩΣΗ - L - μιας χρήσης
HUAXIN-T(XL) (GIMA 21083) ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΜΟΝΩΣΗ - XL - μιας χρήσης
HUAXIN-T(XXL) (GIMA 21084) ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΜΟΝΩΣΗ - XXL - μιας χρήσης

Xianning Huaxin Garment Co., Ltd.
NO. 86, Guanbu Section, 107 National Highway
Xianning city, Hubei Province, China
Made in China

Εισαγωγή από:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com
export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com