

KIRURGMÖSSA FÖR ENGÅNGSBRUK MED BAND
ΣΚΟΥΦΟΣ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

GR

Όνομα Προϊόντος Σκούφος με Κορδόνια Μίας Χρήσης
Κωδικός Προϊόντος FGDCT-SM35 (21098)
Μοντέλο Προϊόντος Σκούφος με κορδόνια, 62x14,5cm
Κατασκευή και Σύνθεση Ο σκούφος είναι κατασκευασμένος από 35-40g SMS, με λάστιχα για στερέωση.

Προβλεπόμενη χρήση Τα προϊόντα χρησιμοποιούνται κυρίως για γενική απομόνωση σε εξωτερικά ιατρεία, θαλάμους, χώρους εξέτασης, χώρους καθαρισμού, εργαστήρια κτλ. Προορίζονται για χρήση από επαγγελματίες υγείας σε νοσοκομεία και κλινικές για τη διατήρηση καλού επιπέδου υγιεινής και τη συμβολή στον έλεγχο των μολύνσεων.

Αντενδείξεις Τα προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο μία φορά και η χρήση τους πρέπει να γίνεται αμέσως μετά το άνοιγμα της συσκευασίας. Εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά, το προϊόν είναι υγρό ή έχει σημάδια μούχλας μην το χρησιμοποιείτε.

Τρόπος χρήσης του προϊόντος

1. Ανοίξτε τη συσκευασία με το προϊόν, βγάλτε τον σκούφο και πιέστε τα άκρα του σκούφου και με τα δύο χέρια.
2. Σηκώστε τα χέρια σας, φορέστε τον σκούφο στο κεφάλι σας και προσαρμόστε τον έτσι ώστε τα μαλλιά σας να μην είναι εκτεθειμένα.

Αποθήκευση Πρέπει να αποθηκεύεται σε καθαρό δωμάτιο που είναι δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, με σχετική υγρασία που δεν ξεπερνά το 80%, χωρίς διαβρωτικά αέρια.



Προειδοποίηση

1. Το προϊόν αυτό είναι μιας χρήσης, μην το επαναχρησιμοποιείτε.
2. Το προϊόν αυτό προορίζεται για χρήση από ένα μόνο άτομο, μην το μοιράζετε ποτέ με άλλο άτομο.
3. Απαγορεύεται η χρήση όταν η συσκευασία ή τα καλύμματα έχουν ζημιά.

Προσοχή: Τυχόν σοβαρά ατυχήματα που σχετίζονται με το προϊόν θα πρέπει να αναφέρονται στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο χρήστης ή ο ασθενής.

Ημερομηνία παραγωγής Δείτε ημερομηνία στη συσκευασία
Ημερομηνία λήξης Δείτε ημερομηνία στη συσκευασία

REF	SE Produktkod GR Κωδικός προϊόντος		SE Skyddas från solljus GR Κρατήστε το μακριά από ηλιακή ακτινοβολία		SE Förvara på svalt och torrt ställe GR Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον	EC REF	SE Auktoriserad representant i Europeiska gemenskapen GR Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση
LOT	SE Satsnummer GR Αριθμός παρτίδας	CE	SE Den medicintekniska produkten överensstämmer med förordning (EU) 2017/745 GR Ιατρική συσκευή σύμφωνα με την ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/745		SE Varsamhet: läs anvisningarna (varningar) noga GR Προσοχή: διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες (ενστάσεις)		SE Engångsanordning, får ej återanvändas GR Προϊόν μιας χρήσεως. Μην το χρησιμοποιείται εκ νέου
	SE Tillverkare GR Παραγωγός		SE Tillverkningsdatum GR Ημερομηνία παραγωγής		SE Temperaturgräns GR Όριο θερμοκρασίας		SE Läs bruksanvisningen GR Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης
	SE Ej steril GR Όχι αποστειρωμένο		SE Utgångsdatum GR Ημερομηνία λήξεως	MD	SE Medicintekniska produkten GR Ιατρική συσκευή		SE Använd inte en förpackning som är skadad GR Μην το χρησιμοποιείτε αν η συσκευασία είναι κατεστραμμένη
UDI	SE Unik identifierare för enheten GR Identificatorul unic al dispozitivului						

GIMA 21098

 Xianning Full Guard Medical Products Co.,Ltd
Yongan East Avenue, Xianning Economic Development
Zone, Xianning City, Hubei Province, China
Made in China

REF FGDCT-SM35

Importerad av / Εισαγωγή από / مستورد عن طريق

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



Humiss Beratung
GmbH Gneisenaustraße 8.40477,
Düsseldorf, Deutschland

