




Προσοχή!

Υποδείξεις ασφαλείας για την αποθήκευση και το χειρισμό των μικροκυβέτων αιμοσφαιρίνης

Οι μικροκυβέτες αιμοσφαιρίνης προορίζονται για τον καθορισμό της αιμοσφαιρίνης στο αίμα, σε τριχοειδή αγγεία και σε φλέβες και για την χρήση με τις εξής συσκευές: Hemo_Control, Hemo_Control Manager, Hemo_Vet, Hemo_Vet Manager. Επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.

 Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της εκάστοτε συσκευής. Οι κυβέτες πρέπει να διατηρούνται αποκλειστικά στην αρχική συσκευασία στους 15°C με 30°C. Ο κατασκευαστής επιτρέπει την χρήση των κυβέτων μέχρι την αναγραφόμενη ημερομηνία με την προϋπόθεση πως η συσκευασία δεν μένει ανοικτή. Μετά την αποσφράγιση της συσκευασίας, οι κυβέτες είναι κατάλληλες για χρήση για 3 μήνες εφόσον ο χειρισμός τους έχει γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Κάθε φορά αφαιρέστε από την συσκευασία μια κυβέτα. Κατόπιν κλείστε προσεκτικά το κουτί **(βλέπε σχήμα 1.)**. Βεβαιωθείτε ότι τα καπάκι έχει σφραγίσει πλήρως το κουτί. **(βλέπε σχήμα 2.)**.

Αν το καπάκι δεν είναι ερμητικά κλειστό **(βλέπε σχήμα 3.)**, ενδέχεται να διεισδύσει υγρασία και να καταστρέψει τα αντιδραστήρια στην κυβέτα. Αν αυτές οι κυβέτες χρησιμοποιηθούν μπορεί να βγουν λάθος αποτελέσματα. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ κυβέτες από κουτί που δεν είναι σωστά κλεισμένο!

