



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

## **PENTE ANTI-PIOLHO ANTI-LÄUSE-KAMM ANTIΨΕΙΡΙΚΟ ΧΤΕΝΑ PIEPTENE ANTI-PADUCHI**



### **MANUAL DO USUÁRIO BENUTZERHANDBUCH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ MANUAL DE UTILIZARE**

**ATENÇÃO:** É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.

**AUFMERKSAMKEIT:** Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε.

**ATENȚIE:** Orice accident grav produs, privitor la dispozitivul medical fabricat de firma noastră, trebuie semnalat producătorului și autorității competente în statul membru pe teritoriul căruia își are sediul utilizatorul.

REF 24400



Gima S.p.A - Via Marconi, 1  
20060 Gessate - (MI) - Italy  
Made in China



**GR****ΧΧΧΡΗΣΗ:**









Τα μακριά και πυκνά δόντια της αντιφθειρικής χτένας είναι ειδικά σχεδιασμένα για να ξεκολλούν ψείρες και κόνιδες.

**ΟΔΗΓΙΕΣ:**

- Ξεμπερδέψτε τα μαλλιά πριν από τη χρήση ώστε τα δόντια να μπορούν να περνούν ευκολότερα. Τα μαλλιά πρέπει να είναι στεγνά.
- Χτενίστε αργά τα μαλλιά από τη ρίζα ως τις μύτες, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές όπου μπορεί να υπάρχουν ψείρες και κόνιδες.
- Ο μεγεθυντικός φακός και η βούρτσα που υπάρχουν στο κάλυμμα βοηθούν στην απομάκρυνση ακόμη και των μικρότερων ψειρών και κόνιδων και εξασφαλίζουν ένα καλό χτένισμα.
- Εάν είναι απαραίτητο, επαναλάβετε την ενέργεια περισσότερες φορές, ιδίως κατά την περίοδο πρόληψης των λοιμώξεων.

**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ:** Μετά από τη χρήση, χρησιμοποιήστε προσεκτικά τη βούρτσα για τον καθαρισμό των δοντιών της αντιφθειρικής χτένας. Συνιστάται να απολυμαίνετε το μεταλλικό τμήμα με οινόπνευμα 70% μετά από κάθε χρήση. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε.

---

	<p>Medical Device compliant with Regulation (EU) 2017/745</p> <p>Dispositivo médico conforme al reglamento (UE) 2017/745</p> <p>Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745</p> <p>Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745</p> <p>Dispositiv médico em conformidade com o regulamento (UE) 2017/745</p> <p>Medizinprodukt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745</p> <p>Isapweil ducakon/ d'igapane/ p/ t'ny KANONIZACIJE (EE) 2017/745</p> <p>Dispositiv medical realizat în conformitate cu prevederile regulamentului (UE) 2017/745</p>		<p>Manufacturer</p> <p>Fabricante</p> <p>Fabricant</p> <p>Fabricante</p> <p>Fabricante</p> <p>Hersteller</p> <p>Prodávateľ</p> <p>Παράγωγός</p>		<p>Product code</p> <p>Código producto</p> <p>Code produit</p> <p>Código producto</p> <p>Código produto</p> <p>Erzeugniscode</p> <p>Cod produs</p> <p>Κωδικός προϊόντος</p> <p>számszám</p>		<p>Keep in a cool, dry place</p> <p>Conservare in luogo fresco ed asciutto</p> <p>A conserver dans un endroit frais et sec</p> <p>Conservar en un lugar fresco y seco</p> <p>Armazemar em local fresco e seco</p> <p>An einem kühlen und trockenen Ort lagern</p> <p>A sa pilaža trih-un loc răcoș și uscat</p> <p>Διατηρήσει σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον</p>		<p>Keep away from sunlight</p> <p>Conservare al riparo dalla luce solare</p> <p>A conserver à l'abri de la lumière du soleil</p> <p>Conservar al amparo de la luz solar</p> <p>Guardar ao abrigo da luz solar</p> <p>Vor Sonnenstrahlung geschützt lagern</p> <p>A sa pilaža fatti de razele soarelui</p> <p>Κρατήστε μακριά από ηλιακό φως</p>	 <p>Consult the instructions for use</p> <p>Leggere le istruzioni per l'uso</p> <p>Consultar las instrucciones d'uso</p> <p>Consultar las instrucciones de uso</p> <p>Consulta as instruções de uso</p> <p>Citiți instrucțiunile de utilizare</p> <p>Διαβάστε προσεκτικά οδηγίες χρήσης</p>
	<p>Medical Device</p> <p>Dispositivo médico</p> <p>Dispositif médical</p> <p>Producto sanitario</p> <p>Dispositivo médico</p> <p>Medizinprodukt</p> <p>Dispositiv medical</p> <p>Isapweil d'ucakon</p>		<p>Date of manufacture</p> <p>Data di fabbricazione</p> <p>Data de fabricație</p> <p>Fecha de fabricación</p> <p>Data de fabrico</p> <p>Herstellertagdatum</p> <p>Data fabricației</p> <p>Παράγωγής ημερομηνίας</p>							