



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**SCHERMO FACCIALE ANTI-NEBBIA MONOUSO - ANTI-FOG DISPOSABLE FACE SHIELD - ÉCRAN FACIAL ANTI-BUÉE JETABLE - PANTALLA FACIAL DESECHABLE ANTINEBLA - PROTETOR FACIAL DESCARTÁVEL ANTI-FOG - ANTI-BESCHLAG-EINWEG-GESICHTSSCHILD - ΑΝΤΙΟΜΙΧΛΙΚΗ ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ - JEDNORAZOWA OSŁONA TWARZY ANTYFOGOWA - ECRAN FACIAL DE UNICĂ FOLOSINȚĂ ANTI-ABURIRE - JEDNORÁZOVÝ OBLIČEJOVÝ ŠTÍT PROTI ZAMLŽOVÁNÍ - ANSIKTSVISIR MED ANTI-IMBILDNINGSFUNKTION FR ENGÅNGSBRUK - KERTAKÄYTTÖINEN HUURTEENESTOKA-SVOSUOJA - JEDNORAZOVÝ TVÁROVÝ ŠTÍT ODOLNÝ VOČI ZAHMLIEVANIU - ANTICONDENS GELAATSSCHERM VOOR EENMALIG GEBRUIK - JEDNOKRATNI VIZIR PROTIV MAGLJENJA - PÁRAMENTES EGYSZER HASZNÁLATOS ARC VÉDŐ - PÁRAMENTES EGYSZER HASZNÁLATOS ARC VÉDŐ - DUGFRI ANSIGTSSKÆRM TIL ENGANGSBRUG - ЛИЦЕВ ЩИТ ПРОТИВ ЗАМЪГЛЯВАНЕ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА - NERASOJANTIS VIENKARTINIS APSAUGINIS VEIDO SKYDELIS - VIENREIZĒJĀS LIETOŠANAS PRETAIZSVĪŠANAS SEJAS AIZSARGS - UDUVASTANE ŪHEKORDNE NĀOKAITSE - TÅKEHEMMENDE ANSIKTSKJERM TIL ENGANGSBRUK - درم لامل امت س الل بابض ل ل داض م هج و عرد**

**ΕΛΛΗΝΙΚΑ** Η αντιθαμβωτική ασπίδα προστασίας προσώπου αποτελείται από ένα κομμάτι μεμβράνης PET με ένα τμήμα προστατευτικής μεμβράνης, ένα αφρώδες στήριγμα και μια ελαστική ταινία στερέωσης.

**Προβλεπόμενη χρήση:** Η αντιθαμβωτική ασπίδα προστασίας προσώπου χρησιμοποιείται για την προστασία ολόκληρου του προσώπου έναντι πιθανής μόλυνσης από παθογόνα του αίματος, σωματικά υγρά ή πιπίλισμα βλαβερών χημικών ουσιών κατά τη διάρκεια επιθεώ-ρησης ή επεξεργασίας.

**Αντενδείξεις:** Καμία.

**Παρενέργειες προϊόντος:** Το προϊόν αυτό δεν έχει καμία παρενέργεια.

**Προειδοποίηση:**

1. Η έκθεση σε περιβάλλον με υψηλή υγρασία μπορεί να προκαλέσει απώλεια της αποτελε-σματικότητας της αντιθαμβωτικής ιδιότητας.
2. Διακόψτε τη χρήση σε περίπτωση ζημιάς ή χαλαρότητας κατά τη διάρκεια της χρήσης.
3. Κατά τη διάρκεια της χρήσης, προσπαθήστε να μην αγγίζετε το κέντρο του φακού.
4. Κάποια υλικά που μπορεί να έρθουν σε επαφή με το δέρμα του χρήστη ενδέχεται να προ-καλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις εάν ο χρήστης έχει ευαισθησία.

**Χρήση:**

- Βήμα 1: Αφαιρέστε την εσωτερική προστατευτική μεμβράνη.
- Βήμα 2: Τραβήξτε την ελαστική ταινία στερέωσης και τοποθετήστε την στο κεφάλι.

**Αποθήκευση:** Αποθηκεύστε το προϊόν σε ξηρό μέρος με θερμοκρασία 0- 30°C. Φυλάξτε το μακριά από το φως του ήλιου.

