


- I Semi-maschere filtranti monouso
- GB Single-use filtering half-masks
- D Partikelfiltrierenden Einweg-Halbmasken
- F Demi-masques filtrants jetables
- E Semimáscaras filtrantes desechables
- P Semimáscaras filtrantes de utilização única
- TR Tek kullanımlık filtreli yarım yüz maskeleri
- NL Halvegeelatsmasker met filter voor eenmalig gebruik
- S Filterande halvmasker för engångsbruk
- FIN Suodattavat kertakäyttöiset puolinaamarit
- CZ Filtrační polomaska na jedno použití
- PL Maski ochronne jednorazowego użycia
- GR Ημιμάσκες διήθησης μιας χρήσης
- HR Polu-maske s filtrom za jednokratno upotrebu

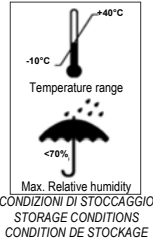


Max. Relative humidity  
CONDIZIONI DI STOCCAGGIO  
STORAGE CONDITIONS  
CONDITION DE STOCKAGE



## ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ :** Οι ημιμάσκες διήθησης μιας χρήσης που περιγράφονται εδώ διακρίνονται σε 3 κατηγορίες - FFP1, FFP2 και FFP3. Πριν από τη χρήση τους ελαφρώστε σε ποια κατηγορία ανήκει η μάσκα σας σύμφωνα με το πρότυπο EN149:2001+A1:2009 και την καταλληλότητά τους για το περιβάλλον χρήσης τους - η ένδειξη της κατηγορίας αναφέρεται επάνω στο κομμάτι και επάνω στην ημιμάσκα. Η οριστική ημερομηνία χρήσης του προϊόντος αναφέρεται επάνω στη συσκευασία του.

**ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ :** προστασία από σωματίδια καθώς και από στερεά και υγρά αεροζόλ (π.χ. ελαιώδη νέφη)

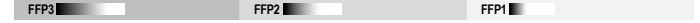

Συνιστάται να ελαφρώστε την ακεραιότητα της μάσκας πριν από τη χρήση. Εάν παρατηρήσετε σχισμάτα και/ή κηλίδες ζητήστε την αντικατάσταση της μάσκας.  
Η ένδειξη NR στη σημάτωση επισημαίνει ότι η μάσκα δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί και πρέπει να απορριφθεί στο τέλος της βάρδιας της εργασίας.

Το σύμβολο D επισημαίνει ότι οι μάσκες έχουν περάσει το τεστ απόφραξης με ακόνι δολομίτη.  
Η προστασία που προσφέρεται από μία ημιμάσκα διήθησης FFP3 ή FFP2 περιλαμβάνει αυτήν που προσφέρεται από την κατηγορία FFP1.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΑΣΚΑΣ:

1. Βάλτε ένα δάχτυλο μέσα στη μάσκα. Καμπυλώστε τη ρινική γέφυρα γύρω από το δάχτυλο για να προσδώσετε στο σχήμα το σχεδιάγραμμα της μύτης.
2. Κρατώντας στο χέρι τη μάσκα, περάστε το κάτω μέρος του λάστιχου στο κεφάλι πίσω από τον αυχένα τακτοποιώντας την κάτω από τα αυτιά.
3. Σπρώξτε το επάνω μέρος του λάστιχου και ακουμπήστε το ψηλά στο κεφάλι, επάνω από τα αυτιά.
4. Χρησιμοποιώντας και τα δύο χέρια, σχηματίστε το κλιπ που βρίσκεται ενδεχομένως γύρω από τη μύτη και ρυθμίστε την τάνυση του επάνω και του κάτω μέρους του λάστιχου μέσω του ειδικού θηλυκίου, όταν υπάρχει, για να εξασφαλιστεί μια καλή εφαρμογή επάνω στο πρόσωπο.
5. (a) Τεστ ελέγχου της σωστής τοποθέτησης της μάσκα χωρίς βαλβίδα: Βάλτε τα χέρια επάνω στη μάσκα όπως φαίνεται στην εικόνα 5 και εκτενήστε δυνατά. (b) Τεστ ελέγχου της σωστής τοποθέτησης της μάσκα με βαλβίδα: Βάλτε τα χέρια επάνω στη μάσκα όπως φαίνεται στην εικόνα 5 και αναπνεύστε δυνατά. Εάν βγει αέρας από τα άκρα της μάσκα ή εάν εισέρχεται στο εσωτερικό της, από τα άκρα, ξαναβάλτε την ημιμάσκα επάνω στο πρόσωπο και εάν χρειαστεί σφίξτε το λάστιχο όταν διαθεθεί θηλυκί/ένταπτες.
6. Αντικαταστήστε αμέσως τη μάσκα εάν νιώσετε αναπνευστική δυσκολία ή εάν η μάσκα υποστεί ζημιές, ή εάν υπάρχουν προβλήματα εφαρμογής της στο πρόσωπο. Η σωστή τήρηση αυτών των οδηγιών είναι βασική για την ασφαλή χρήση του αναπνευστήρα.

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ : [ΜΑΠ – Μέσο Ατομικής Προστασίας]

Εάν δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί μια κατάλληλη εφαρμογή της μάσκα στο προφίλ του προσώπου, μην εισέρχεστε σε χώρους δυνητικού κινδύνου./

Η μη τήρηση των προδιαγραφών που αναφέρονται στην παρούσα σημείωση μπορεί να οδηγήσει σε μία λάθος χρήση του ΜΑΠ και να προκληθούν ασθένειες και θάνατος./

Ενος κατάλληλα επιλεγμένος αναπνευστήρας είναι βασικός για την προστασία της υγείας σας. Πριν από τη χρήση του ΜΑΠ, συμβουλευτείτε ένα άτομο εκπαιδευμένο στην Βιομηχανική Υγιεινή ή έμπειρο προσωπικό Ασφάλειας της Εργασίας προκειμένου να καθορισθεί η καταλληλότητα ή όχι της χρήσης./

Αυτό το προϊόν δεν χορηγεί οξυγόνο. Χρησιμοποιήστε το μόνο σε κατάλληλα αεριζόμενους χώρους που έχουν επαρκή ποσότητα οξυγόνου για την υποστήριξη της ζωής. Τα όρια που αφορούν την παρουσία οξυγόνου σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον για τη χρήση αυτών των масκών μπορούν να μεταβάλλονται από έθνος σε έθνος. Συνιστάται να συμβουλευτείτε τις παραμέτρους που καθορίζονται στο κράτος όπου χρησιμοποιείται το προϊόν. Η Eleco s.r.l. δεν συνιστά σε κάθε περίπτωση τη χρήση σε περιβάλλοντα με περιεκτικότητα οξυγόνου κάτω από 19.5%. / Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν όταν οι περιεκτικότητες των ρύπων είναι άμεσα επικίνδυνες για την υγεία ή τη ζωή. / Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε ατμόσφαιρα όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. / Εγκαταλείψτε αμέσως την περιοχή εργασίας εάν (α) δυσχεραίνει η αναπνοή σας, ή (β) νιώσετε αίσθηση αγωνίας ή λιγνών. / Τρίψτε γενειάδες, και συγκεκριμένες αναπνευστικές συνθήκες μπορούν να μειώσουν την αποτελεσματικότητα αυτών των ημιμασκών διήθησης. / Μην τροποποιείτε ή αλλοιώνετε με κανέναν τρόπο την ημιμάσκα διήθησης. / Μόνο για μια χρήση. Δεν απαιτεί συντήρηση. / Απορρίψτε την ημιμάσκα μετά τη μοναδική χρήση της. / Φυλάξτε τις ημιμάσκες οι οποίες δεν χρησιμοποιήθηκαν ακόμη μέσα στην αέραια συσκευασία τους σε μέρος μακριά από το φως του ήλιου. – Ο κωδικός προσδιορισμού του μοντέλου αναφέρεται επάνω στη συσκευασία του προϊόντος.