

**ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:**

Η βαλβίδα Biosafe είναι μια συσκευή για αναρρόφηση και έγχυση υγρών χωρίς βελόνα. Η βαλβίδα είναι συμβατή με τα ακόλουθα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που διαθέτουν αρσενικό συνδετικό luer: Γραμμής χορήγησης, Γραμμής προέκτασης, Σύριγγες / Προσληρωμένες σύριγγες, Κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες, Ράμπες στρόφιγγων, Στρόφιγγες.

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:**




1. Ανοίξτε τη συσκευασία από το ενδεδειγμένο σημείο ανοίγματος και αφαιρέστε την προστατευτική τάπα (Εικ.1).
2. Συνδέστε το θηλυκό luer του καθετήρα ή της γραμμής προέκτασης στο αρσενικό luer lock του Biosafe (Εικ. 2).
3. Καθαρίστε το στεγανοποιητικό από σιλικόνη στο θηλυκό συνδετικό LL του Biosafe για μεγαλύτερη ασφάλεια. Κατά τη διεξαγωγή αυτής της διαδικασίας, προσέξτε να μην μολύνετε τη συσκευή.
4. Συνδέστε το ακραίο αρσενικό συνδετικό της συσκευής έγχυσης ή της σύριγγας στο Biosafe, πιέζοντας και μετά περιστρέφοντας τη συσκευή μέχρι να ασφαλίσει. Κατά τη διαδικασία αυτή, οι δύο συσκευές πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένες. Μην χρησιμοποιήσετε βελόνες.
5. Για αποσύνδεση, περιστρέψτε αντίστροφα τη συσκευή έγχυσης ή τη σύριγγα μέχρι να αποσπαστεί. Μην αφαιρείτε το Biosafe από τον καθετήρα του ασθενή ή από τη συσκευή έγχυσης (Εικ. 3).
6. Μετά από κάθε χρήση, απολυμαίνετε το Biosafe με διάλυμα μη αλκοολικής βάσης για βέλτιστη ασηψία.

Η συσκευή Biosafe είναι κλειστό σύστημα και δεν απαιτεί προστατευτικά πώματα.

Προϊόν στείρο και μη πυρετογόνο.

**ΠΡΕΙΔΑΠΟΙΗΣΕΙΣ:**

- Χρησιμοποιήστε τεχνική ασηψίας.
- Να μην χρησιμοποιείται με βελόνες.
- Να χρησιμοποιείται μόνο αν η συσκευασία είναι ακέραιη.
- Η στεριότητα είναι εγγυημένη μόνον εφόσον η συσκευασία είναι ακέραιη.
- Η παρούσα συσκευή προορίζεται μόνο για μία χρήση, σε έναν μόνο ασθενή, και πρέπει να απορρίπτεται αμέσως μετά τη χρήση. Δεν προβλέπεται επαναχρησιμοποίηση αυτής της συσκευής διότι χάνει τη στεριότητά της μετά τη χρήση. Η συσκευή ενδέχεται να είναι μολυσμένη μετά τη χρήση και, εάν επαναχρησιμοποιηθεί, η μόλυνση μπορεί να περάσει στον ασθενή και ο ασθενής κινδυνεύει να νοσήσει ή και να πεθάνει.
- Η ARIES υπογραμμίζει την καθοριστική σημασία που έχει η ορθή χρήση της συσκευής, σύμφωνα με τις αναφερόμενες οδηγίες και αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένο ιατρικό προσωπικό, ώστε να αποτραπεί βλάβη του ασθενή ή του χρήστη/χειριστή.

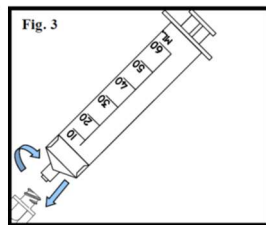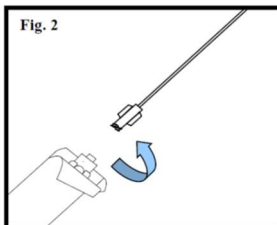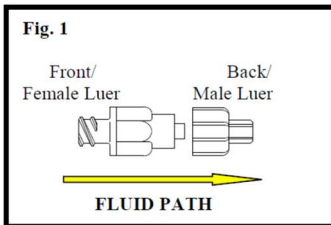

**REF** = Catalogue number

**STERILE** **EO** = Sterilized using Ethylene Oxide

**LOT** = Batch code

= Disposable device. Do not re-use

= Use-by date

= This device does not contain latex

= Manufacturer

**Read instruction for use carefully**

= Date of manufacture

= Keep between 0+40 °C

= Fragile

= Keep dry

= High

= Keep away from sunlight