

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

**Οδηγίες/Οδηγίες Χρήσης για Επαναχρησιμοποίηση ΜΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & Αξεσουάρ**  
**Εισαγωγή:** Οι παρούσες Οδηγίες ισχύουν για Επαναχρησιμοποίηση ΜΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ εργαλεία και αξεσουάρ που παρέχονται από την S. Jee Enterprises

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**

Φοράτε πάντα γάντια κατά τον χειρισμό των εργαλείων - Απαιτείται προσοχή στις αιχμηρές άκρες και στα κινούμενα μέρη των εργαλείων, εάν υπάρχουν. Τα εργαλεία πρέπει να αποθηκεύονται σε ξηρό μέρος και ο χειρισμός τους πρέπει να γίνεται με προσοχή για να αποφεύγεται οποιαδήποτε ζημιά. Η χρήση πρέπει να γίνεται μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό τους ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη αποτελεσματικότητά. Ο σπινός (υγρή θερμότητα) είναι η μόνη μέθοδος αποστείρωσης που συνιστάται. Κατά τη χρήση των εργαλείων είναι απαραίτητο να φοράτε Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ). Τα αλκοόλ και καθαριστικά/απολυμαντικά μέσα που περιέχουν αλδεΐδες, χλωρίδια, ενεργό χλώριο, βρώμιο, βρωμίδια, ιώδιο ή ιωδιδια είναι διαβρωτικά και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται. Μην αφήνετε τα βιολογικά κατάλοιπα που υπάρχουν επάνω στον μολυσμένο εξοπλισμό να ξεραθούν. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται μεταλλικές βούρτσες και τσόχες καθαρισμού κατά τη διάρκεια του χειρισμού καθαρισμού διότι προκαλούν ζημιά στην επιφάνεια και στο φινιρίσμα των εργαλείων. Χρησιμοποιείτε μόνο βούρτσες με μαλακές νάilon ίνες, με διαφορετικά σχήματα, μήκη και μεγέθη για τη διεκκλόνση του χειρισμού καθαρισμού. Μην επεξεργάζεστε εργαλεία με μέρη από πολυμερές υλικό σε θερμοκρασίες ίσες ή μεγαλύτερες από 140°C/285°F. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται λάδια ή λιπαντικά σλικόνες σε εργαλεία. Στεγνώστε τα εργαλεία με ένα καθαρό, απορροφητικό πανί που δεν αφήνει χνούδι. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθαρός, φιλτραρισμένος πιεσιμένος αέρας για την αφαίρεση της υγρασίας από αυλούς, σπές, σωληνίσκους και σημεία με δύσκολη πρόσβαση. Μετά τον καθαρισμό, όλα τα εργαλεία πρέπει να ελέγχονται σχολαστικά για τυχόν υπολείμματα βιολογικών ουσιών ή απορρυπαντικού. Εάν εξακολουθούν να υπάρχουν ρύποι επαναλάβετε τη διαδικασία καθαρισμού. Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τις συσκευές υγειονομικής περιθαλψής. Παρόλο που δεν υπάρχει πιθανότητα σοβαρού ατυχήματος που να οφείλεται σε αυτά τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, εάν διαπιστώσετε κάποιο σοβαρό περιστατικό σε σχέση με αυτά ενημερώστε τον κατασκευαστή και την αρμόδια/ρυθμιστική αρχή **Βήματα Καθαρισμού**

Τοποθετήστε τα εργαλεία σε κατάλληλο και εγκεκριμένο πλυντήριο/απολυμαντή. Ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή του πλυντηρίου/απολυμαντή σχετικά με τον τρόπο φόρτωσης των εργαλείων για μέγιστη έκθεση στον καθαρισμό, π.χ. τοποθετείτε τα κοίλα εργαλεία στο πλάι ή ανάποδα και τις βαριές συσκευές στο κάτω μέρος των δίσκων και των καλαθιών. Εάν το πλυντήριο/απολυμαντής διαθέτει ειδικά ράφια χρησιμοποιείτε τα σύμφωνα τις οδηγίες του κατασκευαστή.

**Οι παράμετροι που συνιστώνται είναι οι ακόλουθες:**

**Αποστείρωση**

Πρέπει πάντα να συμβουλευέστε και να ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή του αποστειρωτή για τη διαμόρφωση του φορτίου και τη λειτουργία του εξοπλισμού. Ο εξοπλισμός αποστείρωσης πρέπει να έχει αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα (π.χ. έγκριση FDA, συμμόρφωση με EN 13060 ή EN 285). Επίσης πρέπει να τηρούνται οι συστάσεις του κατασκευαστή σχετικά με την εγκατάσταση, την επικύρωση και τη συντήρηση. Οι επικυρωμένοι χρόνοι έκθεσης και οι θερμοκρασίες για την επίτευξη επιπέδου διασφάλισης αποστείρωσης 10 (SAL) αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

| Κύκλος | Περιγραφή                                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Πρόπλυση-- --Κρύο Αποσκληρυνμένο Νερό Βρύσης -- -- 2 λεπτά                                |
| 2      | Ψεκασμός & Εμβάπτιση σε Ενζυμικό Διάλυμα-- --Ζεστό Αποσκληρυνμένο Νερό Βρύσης-- --1 λεπτό |
| 3      | Ξέβγαλμα-- --Κρύο Αποσκληρυνμένο Νερό Βρύσης                                              |
| 4      | Πλύση με Απορρυπαντικό-- --Ζεστό Νερό Βρύσης (64-66° C/146-150°F)-- --2 λεπ.              |
| 5      | Ξέβγαλμα-- --Ζεστό Απιονισμένο Νερό (64-66°C/146-150°F)-- -- 1 λεπτό                      |
| 6      | Στέγνωμα με Ζεστό Αέρα ( 116°C/240°F)-- --7 έως 30 λεπτά                                  |

**Notes:**

- Πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή του πλυντηρίου/απολυμαντή  
- Πρέπει να χρησιμοποιείται πλυντήριο/απολυμαντής με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα (π.χ. έγκριση FDA, επικυρωμένο βάσει ISO 15883).  
- Ο χρόνος στεγνώματος υποδεικνύεται ως εύρος καθώς εξαρτάται από το μέγεθος του φορτίου που είναι τοποθετημένο στο πλυντήριο/απολυμαντή.

|                                    | Τύπος Κύκλου           | Ελάχιστη Θερμοκρασία | Ελάχιστος Χρόνος Έκθεσης | Πίεση     |
|------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|-----------|
| Συνιστώμενες παράμετροι για Ευρώπη | Παλμός Προ-κενού/Κενού | 134°C/273°F          | 3 λεπτά                  | 28 p.s.i. |

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ GIMA

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>IT</b> - Codice prodotto <b>GB</b> - Product code <b>FR</b> - Code produit <b>DE</b> - Code produit <b>ES</b> - Código de producto <b>PT</b> - Código do produto <b>GR</b> - Κωδικός προϊόντος <b>BG</b> - Код на продукта <b>CZ</b> - Kód produktu <b>DA</b> - Produktkode <b>FI</b> - Tuotekoodi <b>HR</b> - Šifra proizvoda <b>HU</b> - Termék kódja <b>LV</b> - Produkta kods <b>NL</b> - Productcode <b>PL</b> - Kod produktu <b>RO</b> - Cod produs <b>SL</b> - Šifra izdelka <b>SV</b> - Produktkod</p> <p><b>SA</b> - رمز المنتج</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | <p><b>IT</b> - Conservare in luogo fresco ed asciutto <b>GB</b> - Store in a cool, dry place <b>FR</b> - Conserver dans un endroit frais et sec <b>DE</b> - An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren <b>ES</b> - Conservar en un lugar fresco y seco <b>PT</b> - Armazene em local fresco e seco <b>GR</b> - Φυλάσσεται σε δροσερό, ξηρό μέρος <b>BG</b> - Съхранявайте на хладно и сухо място <b>CZ</b> - Skladujte na chladném a suchém místě <b>DA</b> - Opbevares på et køligt, tørt sted <b>HR</b> - Čuvati na hladnom i suhom mjestu <b>HU</b> - Tárolja hűvös, száraz helyen <b>LV</b> - Uzglabāt vēsā, sausā vietā <b>NL</b> - Op een koele, droge plaats bewaren <b>PL</b> - Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu <b>RO</b> - A se pastra într-un loc racoros si uscat <b>SL</b> - Hraniti na hladnem in suhem mestu <b>SV</b> - Förvara på en sval, torr plats</p> <p><b>SA</b> - تخزينها في مكان بارد وجاف</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | <p><b>IT</b> - Identificatore unico dispositivo <b>GB</b> - Unique device identifier <b>FR</b> - Identifiant unique de l'appareil <b>DE</b> - Eindeutige Gerätekennung <b>ES</b> - Identificador de dispositivo único <b>PT</b> - Identificador exclusivo do dispositivo <b>GR</b> - Μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής <b>BG</b> - Уникален идентификатор на устройството <b>CZ</b> - Jedinečný identifikátor zařízení <b>DA</b> - Unik enhedsidentifikator <b>FI</b> - Ainutlaatuinen laitetunniste <b>HR</b> - Jedinstveni identifikator uređaja <b>HU</b> - Egyedi eszközazonosító <b>LV</b> - Unikāls ierīces identifikators <b>NL</b> - Unieke apparaat-ID <b>PL</b> - Unikalny identyfikator urządzenia <b>RO</b> - Identificator unic de dispozitiv <b>SL</b> - Enolični identifikator naprave <b>SV</b> - Unik enhetsidentifiere</p> <p><b>SA</b> - معرف الجهاز الفريد</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | <p><b>IT</b> - Conservare al riparo dalla luce solare <b>GB</b> - Store away from sunlight <b>FR</b> - Conserver à l'abri du soleil <b>DE</b> - Vor Sonnenlicht schützen <b>ES</b> - Almacenar lejos de la luz solar <b>PT</b> - Armazene longe da luz solar <b>GR</b> - Φυλάσσεται μακριά από το φως του ήλιου <b>BG</b> - Да се съхранява далеч от слънчева светлина <b>CZ</b> - Skladujte mimo dosah slunečního záření <b>DA</b> - Opbevares væk fra sollys <b>HR</b> - Čuvati dalje od sunčeve svjetlosti <b>HU</b> - Tárolja napfénytől távol <b>LV</b> - Glabāt prom no saules gaismas <b>NL</b> - Uit de buurt van zonlicht bewaren <b>PL</b> - Przechowywać z dala od światła słonecznego <b>RO</b> - A se păstra departe de lumina soarelui <b>SL</b> - Hraniti ločeno od sončne svetlobe <b>SV</b> - Förvaras åtskilt från solljus</p> <p><b>SA</b> - يخزن بعيدا عن أشعة الشمس</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | <p><b>IT</b> - Numero di lotto <b>GB</b> - Batch number <b>FR</b> - Numéro de lot <b>DE</b> - Chargennummer <b>ES</b> - Número de lote <b>PT</b> - Número do lote <b>GR</b> - Αριθμός παρτίδας <b>BG</b> - Партиден номер <b>CZ</b> - Číslo šarže <b>DA</b> - Batchnummer <b>FI</b> - Erän numero <b>HR</b> - Broj serije <b>HU</b> - Tételszám <b>LV</b> - Partijas numurs <b>NL</b> - Batchnummer <b>PL</b> - Numer partii <b>RO</b> - Numărul lotului <b>SL</b> - Številka serije <b>SV</b> - Batchnummer</p> <p><b>SA</b> - رقم الدفعة</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | <p><b>IT</b> - Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745 <b>GB</b> - Medical device compliant with Regulation (EU) 2017/745 <b>FR</b> - Dispositif médical conforme au Règlement (UE) 2017/745 <b>DE</b> - Medizinprodukt gemäß Verordnung (EU) 2017/745 <b>ES</b> - Dispositivo médico que cumple con el Reglamento (UE) 2017/745 <b>PT</b> - Dispositivo médico em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/745 <b>GR</b> - Ιατροτεχνολογικό προϊόν συμμορφούμενο με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/745 <b>BG</b> - Медицинско изделие, отговарящо на Регламент (ЕС) 2017/745 <b>CZ</b> - Zdravotnický prostředek v souladu s nařízením (EU) 2017/745 <b>DA</b> - Medicinsk udstyr i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/745 <b>HR</b> - Medicinski uređaj uskladen s Uredbom (EU) 2017/745 <b>HU</b> - Az (EU) 2017/745 rendeletnek megfelelő orvostechnikai eszköz <b>LV</b> - Medicīnas ierīce, kas atbilst Regulai (ES) 2017/745 <b>NL</b> - Medisch hulpmiddel dat voldoet aan Verordening (EU) 2017/745 <b>PL</b> - Wyrób medyczny zgodny z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 <b>RO</b> - Dispozitiv medical conform Regulamentului (UE) 2017/745 <b>SL</b> - Medicinski pripomoček skladen z Uredbo (EU) 2017/745 <b>SV</b> - Medicinsk utrustning i enlighet med förordning (EU) 2017/745</p> <p><b>SA</b> - جهاز طبي متوافق مع اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2017/745</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | <p><b>IT</b> - Dispositivo medico <b>GB</b> - Medical device <b>FR</b> - Dispositif médical <b>DE</b> - Medizinisches Gerät <b>ES</b> - Dispositivo medico <b>PT</b> - Dispositivo médico <b>GR</b> - Ιατρική συσκευή <b>BG</b> - Медицинско изделие <b>CZ</b> - Lékařské zařízení <b>DA</b> - Medicinsk udstyr <b>FI</b> - Lääketieteellinen laite <b>HR</b> - Medicinski uređaj <b>HU</b> - Orvosi eszköz <b>LV</b> - Medicīnas ierīce <b>NL</b> - Medisch apparaat <b>PL</b> - Urządzenie medyczne <b>RO</b> - Dispozitiv medical <b>SL</b> - Medicinski pripomoček <b>SV</b> - Medicinsk apparat</p> <p><b>SA</b> - جهاز طبي</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | <p><b>IT</b> - Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso <b>GB</b> - Warning: Read and follow the instructions (warnings) for use carefully <b>FR</b> - Avertissement : Lisez et suivez attentivement les instructions (avertissements) d'utilisation. <b>DE</b> - Warnung: Lesen und befolgen Sie die Gebrauchsanweisungen (Warnhinweise) sorgfältig <b>ES</b> - Advertencia: Lea y siga atentamente las instrucciones (advertencias) de uso. <b>PT</b> - Aviso: Leia e siga as instruções (aviso) de uso com atenção <b>GR</b> - Προειδοποίηση: Διαβάστε και ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες (προειδοποιήσεις) χρήσης <b>BG</b> - Предупреждение: Прочетете и следвайте внимателно инструкциите (предупрежденията) за употреба <b>CZ</b> - Upozornění: Pečlivě si přečtěte a dodržujte pokyny (varování) k použití <b>DA</b> - Advarsel: Læs og følg brugsanvisningen (advarslerne) omhyggeligt <b>FI</b> - Varoitus: Lue käyttöohjeet (varoitukset) huolellisesti ja noudata niitä <b>HR</b> - Upozorenje: Pažljivo pročitajte i slijedite upute (upozorenja) za uporabu <b>HU</b> - Figyelmeztetés: Olvassa el és kövesse figyelmesen a használati utasításokat (figyelmeztetéseket). <b>LV</b> - Brīdinājums: uzmanīgi izlasiet un ievērojiet lietošanas instrukcijas (brīdinājumus). <b>NL</b> - Waarschuwing: Lees en volg de instructies (waarschuwingen) voor gebruik zorgvuldig <b>PL</b> - Ostrzeżenie: Przeczytaj uważnie instrukcje (ostrzeżenia) dotyczące użytkowania i postępuj zgodnie z nimi <b>RO</b> - Avertisment: Cititi și urmați cu atenție instrucțiunile (avertismente) de utilizare <b>SL</b> - Opozorilo: natančno preberite in upoštevajte navodila (opozorila) za uporabo <b>SV</b> - Varning: Läs och följ instruktionerna (varningarna) för användning noggrant</p> <p><b>SA</b> - تحذير: اقرأ وأتبع التعليمات (التحذيرات) للاستخدام بعناية</p> |
|  | <p><b>IT</b> - Rappresentante autorizzato nella Comunità europea <b>GB</b> - Authorized representative in the European Community <b>FR</b> - Représentant autorisé dans la Communauté Européenne <b>DE</b> - Autorisierter Vertreter in der Europäischen Gemeinschaft <b>ES</b> - Representante autorizado en la Comunidad Europea <b>PT</b> - Representante autorizado na Comunidade Europeia <b>GR</b> - Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα <b>BG</b> - Упълномощен представител в Европейската общност <b>CZ</b> - Autorizovaný zástupce v Evropském společenství <b>DA</b> - Autoriseret repræsentant i Det Europæiske Fællesskab <b>FI</b> - Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisössä <b>HR</b> - Ovlašteni predstavnik u Europskoj zajednici <b>HU</b> - Meghatalmazott képviselő az Európai Közösségben <b>LV</b> - Pilnvarotais pārstāvis Eiropas Kopienā <b>NL</b> - Gemachtigde vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap <b>PL</b> - Autoryzowany przedstawiciel na terenie Wspólnoty Europejskiej <b>RO</b> - Reprezentant autorizat în Comunitatea Europeană <b>SL</b> - Pooblaščen zastopnik v Evropski skupnosti <b>SV</b> - Auktoriserad representant i Europeiska gemenskapen</p> <p><b>SA</b> - الممثل المعتمد في المجموعة الأوروبية</p> |  | <p><b>IT</b> - Non sterile <b>GB</b> - Not sterile <b>FR</b> - Non stérile <b>DE</b> - Nicht steril <b>ES</b> - No estéril <b>PT</b> - Não estéril <b>GR</b> - Όχι στειρό <b>BG</b> - Не е стерилен <b>CZ</b> - Ne sterilní <b>DA</b> - Ikke steril <b>FI</b> - Ei steriili <b>HR</b> - Nije sterilan <b>HU</b> - Nem steril <b>LV</b> - Nav sterilis <b>NL</b> - Niet steriel <b>PL</b> - Nie sterylne <b>RO</b> - Nu este steril <b>SL</b> - Ni sterilno <b>SV</b> - Inte steril</p> <p><b>SA</b> - غير معقمة</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | <p><b>IT</b> - Importato da <b>GB</b> - Imported by <b>FR</b> - Importé par <b>DE</b> - Importiert von <b>ES</b> - Importado por <b>PT</b> - Importado por <b>GR</b> - Εισαγωγή από <b>BG</b> - Внесено от <b>CZ</b> - Dovezeno uživatelem <b>DA</b> - Importeret af <b>FI</b> - Tuojaa <b>HR</b> - Uvezeno od strane <b>HU</b> - Importálta: <b>LV</b> - Importēja <b>NL</b> - Geïmporteerd door <b>PL</b> - Importowane przez <b>RO</b> - Importat de <b>SL</b> - Uvozil <b>SV</b> - Importerad av</p> <p><b>SA</b> - مستورد بواسطة</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | <p><b>IT</b> - Non ri-sterilizzare <b>GB</b> - Do not re-sterilize <b>FR</b> - Ne pas re-stériliser <b>DE</b> - Nicht erneut sterilisieren <b>ES</b> - No reesterilizar <b>PT</b> - Não reesterilize <b>GR</b> - Μην αποστειρώνετε ξανά <b>BG</b> - Не стерилизирайте повторно <b>CZ</b> - Nesterilizujte znovu <b>DA</b> - Må ikke gensteriliseres <b>FI</b> - Älä steriiloi uudelleen <b>HR</b> - Nemojte ponovno sterilizirati <b>HU</b> - Ne sterilizálja újra <b>LV</b> - Nesterilizēt atkārtoti <b>NL</b> - Niet opnieuw steriliseren <b>PL</b> - Nie sterylizować ponownie <b>RO</b> - Nu resterilizați <b>SL</b> - Ne sterilizirajte ponovno <b>SV</b> - Sterilisera inte om</p> <p><b>SA</b> - لا تقم بإعادة التعقيم</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | <p><b>IT</b> - Leggere le istruzioni per l'uso <b>GB</b> - Read the instructions for use <b>FR</b> - Lire la notice d'utilisation <b>DE</b> - Lesen Sie die Gebrauchsanweisung <b>ES</b> - Lea las instrucciones de uso. <b>PT</b> - Leia as instruções de uso <b>GR</b> - Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης <b>BG</b> - Прочетете инструкциите за употреба <b>CZ</b> - Přečtěte si návod k použití <b>DA</b> - Læs brugsanvisningen <b>FI</b> - Lue käyttöohjeet <b>HR</b> - Pročitajte upute za uporabu <b>HU</b> - Olvassa el a használati utasítást <b>LV</b> - Izlasiet lietošanas instrukcijas <b>NL</b> - Lees de gebruiksaanwijzing <b>PL</b> - Przeczytaj instrukcję użytkowania <b>RO</b> - Cititi instrucțiunile de utilizare <b>SL</b> - Preberite navodila za uporabo <b>SV</b> - Läs bruksanvisningen</p> <p><b>SA</b> - اقرأ تعليمات الاستخدام</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | <p><b>IT</b> - Limite di umidità <b>GB</b> - Humidity limit <b>FR</b> - Limite d'humidité <b>DE</b> - Luftfeuchtigkeitsgrenze <b>ES</b> - Límite de humedad <b>PT</b> - Limite de umidade <b>GR</b> - Όριο υγρασίας <b>BG</b> - Ограничение на влажността <b>CZ</b> - Limit vlhkosti <b>DA</b> - Fugtgrænse <b>FI</b> - Kosteusraja <b>HR</b> - Granica vlažnosti <b>HU</b> - Páratartalom határérték <b>LV</b> - Mitruma robeža <b>NL</b> - Vochtighedslimiet <b>PL</b> - Limit wilgotności <b>RO</b> - Limita de umiditate <b>SL</b> - Omejitve vlažnosti <b>SV</b> - Fuktighetsgräns</p> <p><b>SA</b> - حد الرطوبة</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | <p><b>IT</b> - Fabbricante <b>GB</b> - Manufacturer <b>FR</b> - Fabricant <b>DE</b> - Hersteller <b>ES</b> - Fabricante <b>PT</b> - Fabricante <b>GR</b> - Κατασκευαστής <b>BG</b> - производител <b>CZ</b> - Výrobce <b>DA</b> - Fabrikant <b>FI</b> - Valmistaja <b>HR</b> - Proizvođač <b>HU</b> - Gyártó <b>LV</b> - Ražotājs <b>NL</b> - Fabrikant <b>PL</b> - Producent <b>RO</b> - Producător <b>SL</b> - Proizvajalec <b>SV</b> - Tillverkare</p> <p><b>SA</b> - الشركة المصنعة</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | <p><b>IT</b> - Data di fabbricazione <b>GB</b> - Manufacturing date <b>FR</b> - Date de fabrication <b>DE</b> - Herstellungsdatum <b>ES</b> - Fecha de fabricación <b>PT</b> - Data de fabricação <b>GR</b> - Ημερομηνία κατασκευής <b>BG</b> - Дата на производство <b>CZ</b> - Datum výroby <b>DA</b> - Fremstillingsdato <b>FI</b> - Valmistuspäivämäärä <b>HR</b> - Datum proizvodnje <b>HU</b> - Gyártási dátum <b>LV</b> - Ražošanas datums <b>NL</b> - Productiedatum <b>PL</b> - Data produkcji <b>RO</b> - Data fabricației <b>SL</b> - Datum izdelave <b>SV</b> - Tillverkningsdatum</p> <p><b>SA</b> - تاريخ التصنيع</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |