



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

BILANCIA VETERINARIA - PICCOLI ANIMALI

DIGITAL SMALL PET SCALE

BALANCE VÉTÉRINAIRE - PETITS ANIMAUX DIGITAL

BÁSCULA VETERINARIA DIGITAL - ANIMALES PEQUEÑOS

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΖΩΑ

CÂNTAR VETERINAR - ANIMALE MICI

VETERINÁRNÍ VÁHA PRO MALÁ ZVÍŘATA

VETERINÄRVÅG - SMÅ DJUR

VETERINARSKA VAGA - DIGITALNA VAGA ZA MALE KUĆNE LJUBIMCE

ELÄINLÄÄKÄRIVAACA - PIENET ELÄIMET

Manuale utente - User manual - Mode d'emploi - Manual de uso - Εγχειρίδιο χρήστη - Manual de utilizare și întreținere - Návod k použití a údržbě
- Instruktioner för användning och underhåll - Priručnik za uporabu i održavanje - Käyttö- ja huolto-ohjeet

REF 6651 (GIMA 27261)

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Κατασκευαστής /
Producent / Výrobce / Tillverkare / Proizvođač / Valmistaja:

Momert Zrt.

2400 Dunaújváros - HUNGARY,

Papírgyári út 12-14

Made in Hungary

Distribuito da / Distributed by / distribué par / distribuido por /
Διανέμεται από / Distribuit de / Distribuovano / Distribuerad av /
Distribuidora / Jakelija:

Gima S.p.A. Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com



Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν μας. Ευχόμαστε να αποδειχθεί αντάξιο των προσδοκιών σας καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το εγχειρίδιο χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Αποθηκεύστε το εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Βεβαιωθείτε ότι τα άτομα που χρησιμοποιούν το προϊόν γνωρίζουν τις παρούσες οδηγίες.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Βεβαιωθείτε ότι τηρείται η σωστή πολικότητα των μπαταριών κατά την τοποθέτηση ή αντικατάστασή τους.
- Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τη μπαταρία.
- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι σε χρήση.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή με έλλειψη εμπειρίας ή γνώσης, εκτός εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει κατάλληλη εκπαίδευση σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν αποκλειστικά για την προβλεπόμενη χρήση σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης.
- Χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή επάνω σε σταθερή οριζόντια επιφάνεια.
- Προτού καθαρίσετε, συνδέστε ή αποσυνδέσετε το κάλυμμα, σβήστε τη συσκευή και αφαιρέστε τη μπαταρία!
- Μη χρησιμοποιείτε λιπαντικές ή χημικά επιθετικές ουσίες για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν δεν λειτουργεί σωστά ή σε περίπτωση πτώσης, φθοράς ή εάν εκθέτει σε οποιοδήποτε υγρό. Παραδώστε τη συσκευή σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο και επισκευή.
- Η συσκευή ενδείκνυται μόνο για οικιακή χρήση. Δεν προορίζεται για εμπορική χρήση.
- Φυλάσσετε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ, φούρνο, κτλ. Μην εκθέτετε τη συσκευή στο άμεσο ηλιακό φως ή σε υγρασία.
- Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα ή υγρά χέρια.
- Το προϊόν είναι μια ευαίσθητη συσκευή μέτρησης. Αποφύγετε πτώσεις και χτυπήματα.
- Μην επισκευάζετε τη συσκευή. Απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΝΤΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ!

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αυτόματη λειτουργία hold
- Σύστημα μέτρησης ακριβείας
- Λειτουργία προβολής της διαφοράς βάρους
- Λειτουργία απόβαρου
- Ένδειξη χαμηλής φόρτισης της μπαταρίας («Lo»)
- Αυτόματη απενεργοποίηση

Τεχνικές παράμετροι

Τάση	2 μπαταρίες λιθίου CR2032 των 3 V
Εύρος ζύγισης	20 kg
Προσαυξήσεις ζύγισης	5g
Μονάδα μέτρησης βάρους	Kg, Lb, St
Θερμοκρασία λειτουργίας/αποθήκευσης	20-25°C / 15-40°C
Διαστάσεις οθόνης	Διάμετρος LCD = 8,0 cm, 3,15 ίντσες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. Επιφάνεια ζύγισης (δίσκος)
2. Κουμπί ON/OFF
3. Κουμπί ΑΠΟΒΑΡΟ
4. Κουμπί Kg/Lb/St
5. Οθόνη



ΚΟΥΜΠΙΑ

- Η ζυγαριά ανάβει και σβήνει με το κουμπί ON/OFF (πατήστε το κουμπί μία φορά).
- Με το κουμπί ΑΠΟΒΑΡΟ μπορεί να χρησιμοποιηθεί η λειτουργία του απόβαρου. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «0.00» για 2 δευτερόλεπτα μετά το πάτημα του κουμπιού.
- Με το κουμπί Kg, Lb, St μπορείτε να επιλέξετε την απαιτούμενη μονάδα μέτρησης. Μπορείτε να δείτε την τρέχουσα μονάδα μέτρησης στη δεξιά πλευρά της οθόνης

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΖΥΓΑΡΙΑΣ

- 1 Η ζυγαριά λειτουργεί με 2 αντικαταστάσιμες μπαταρίες λιθίου. Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη πριν από τη χρήση (Εικ. 1).
2. Προτού ζυγίσετε κάποιο ζώο, βιδώστε τον δίσκο επάνω στην επιφάνεια μέτρησης έτσι ώστε ο δίσκος να παραμένει σταθερός.
3. Πατήστε μία φορά το κουμπί ON/OFF: στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη «0.00» (Εικ. 2).
4. Τοποθετήστε το ζώο επάνω στη ζυγαριά. Το βάρος που μετρήθηκε θα εμφανιστεί εντός λίγων δευτερολέπτων και θα αποθηκευτεί αυτόματα στη μνήμη. Θα εμφανιστεί ένα «M» με το οποίο υποδηλώνεται η παρουσία δεδομένων στη μνήμη.



Fig. 1



Fig. 2

Κατά την επόμενη ζύγιση, η οθόνη θα δείξει το βάρος που μετρήθηκε καθώς και τη διαφορά μεταξύ του βάρους που μετρήθηκε και του προηγούμενου βάρους σε διαστήματα των 2 δευτερολέπτων. Το τελευταίο βάρος που μετρήθηκε αποθηκεύεται αυτόματα στη μνήμη σε περίπτωση είτε χειροκίνητης είτε αυτόματης απενεργοποίησης.

5. Πατήστε μία φορά το κουμπί ON/OFF για να σβήσετε τη ζυγαριά. Εάν δεν χρησιμοποιηθεί εντός 30 δευτερολέπτων, η ζυγαριά σβήνει αυτόματα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΝΗΜΗΣ

Κατά την ενεργοποίηση της ζυγαριάς, εμφανίζεται ένα «M» που υποδηλώνει ότι το τελευταίο βάρος που μετρήθηκε έχει αποθηκευτεί στη μνήμη και ότι μπορείτε να δείτε τη διαφορά βάρους. Εάν δεν θέλετε να προβάλετε τη διαφορά βάρους, πατήστε γρήγορα δύο φορές το κουμπί ON/OFF για να διαγραφούν τα δεδομένα από τη μνήμη. Με αυτόν τον τρόπο το «M» θα εξαφανιστεί από την οθόνη. Η αφαίρεση της μπαταρίας επίσης συνεπάγεται τη διαγραφή της μνήμης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΒΑΡΟ

Σε περίπτωση πρόσθετου βάρους επάνω στον δίσκο (κουβέρτα, μαξιλάρι, κτλ.), εάν το πρόσθετο βάρος είναι μικρότερο από 5 kg, εάν πατήσετε το κουμπί ΑΠΟΒΑΡΟ, η οθόνη θα εμφανίσει την ένδειξη «0.00» και το μέγιστο βάρος που μπορεί να μετρηθεί θα είναι ίσο με 20 kg. Εάν αντίθετα το πρόσθετο βάρος είναι μεγαλύτερο από 5 kg, εάν πατήσετε το κουμπί ΑΠΟΒΑΡΟ η οθόνη θα εμφανίσει την ένδειξη «0.00», ωστόσο το μέγιστο βάρος που μπορεί να μετρηθεί θα είναι μικρότερο από 20 kg (πιο συγκεκριμένα: 20 kg μείον το πρόσθετο βάρος).

ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΘΟΝΗ

Αν εμφανίζεται η ένδειξη «Lo» κατά την ενεργοποίηση (Εικ. 3) ή αν δεν εμφανίζεται τίποτα στην οθόνη, η μπαταρία έχει εξαντληθεί και απαιτείται αντικατάσταση.



Fig. 3

Εάν εμφανιστεί η ένδειξη «ERR» στην οθόνη (Εικ. 4.), σημαίνει ότι η ζυγαριά έχει υπερβολικό φορτίο και σε αυτή την περίπτωση το βάρος θα πρέπει να μειωθεί (το υπερβολικό φορτίο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους αισθητήρες).



Fig. 4

Το μήνυμα «OUT2» στην οθόνη (Εικ. 5.) υποδηλώνει βλάβη στους αισθητήρες (ύστερα από υπερβολικό φορτίο ή από απότομη εφαρμογή υψηλού δυναμικού φορτίου). Αυτή η περίπτωση δεν καλύπτεται από την εγγύηση του προϊόντος.



Fig. 5

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η επιφάνεια της συσκευής πρέπει να καθαρίζεται χρησιμοποιώντας μόνο ένα υγρό πανί. Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά ή σκληρά αντικείμενα, διότι μπορεί να καταστραφεί η επιφάνεια της συσκευής!

Μην πλένετε ποτέ τη συσκευή με τρεχούμενο νερό, μην την ξεπλένετε και μην τη βυθίζετε σε νερό!

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Οποιαδήποτε σημαντική εργασία συντήρησης ή επισκευής απαιτεί πρόσβαση στα εσωτερικά εξαρτήματα του προϊόντος και πρέπει να εκτελείται από εξειδικευμένο κέντρο σέρβις.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

- Τα υλικά της συσκευασίας και οι παλιές συσκευές πρέπει να ανακυκλώνονται.
- Το κουτί που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά πρέπει να απορρίπτεται βάσει διαχωρισμένης συλλογής.
- Οι σακούλες πολυαιθυλενίου πρέπει να ανακυκλώνονται.



Απόρριψη: Το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα άλλα οικιακά απορρίμματα. Οι χρήστες πρέπει να απορρίπτουν τις συσκευές που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους μεταφέροντάς τις σε ειδικούς χώρους συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ GIMA

Ισχύει η τυπική εγγύηση B2B της Gima διάρκειας 12 μηνών.