



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**BILANCIA PESANEONATI DIGITALE
ELECTRONIC BABY SCALE
PÈSE-BÉBÉ ÉLECTRONIQUE
ELEKTRONISCHE BABYWAAGE
PESA BEBÉS ELECTRÓNICO
BALANÇA PARA RECÉM-NASCIDOS ELETRÔNICA
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ ΓΙΑ ΒΕΟΓΕΝΝΗΤΑ
إلكتروني لأطفال نازيم**

GIMA 27313

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Hersteller
Fabricante / Fabricante / Παραγωγός / الشركة المصنعة

Shenzhen Healthcare Electronic Technology Co., Ltd.
1F~3F of Block 48, 1F~3F of Block 46, Changxing Industrial Zone,
Changzhen Community, Gongming Street, Guangming District,
Shenzhen City, Guangdong Province, P.R. China
elaine.li@healthscale.com
Made in China


REF TH996A-V1

Importato da / Imported by / Importé par / Eingeführt von
Importado por / Importado por / Εισαγωγή από / مستورد عن طريق:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



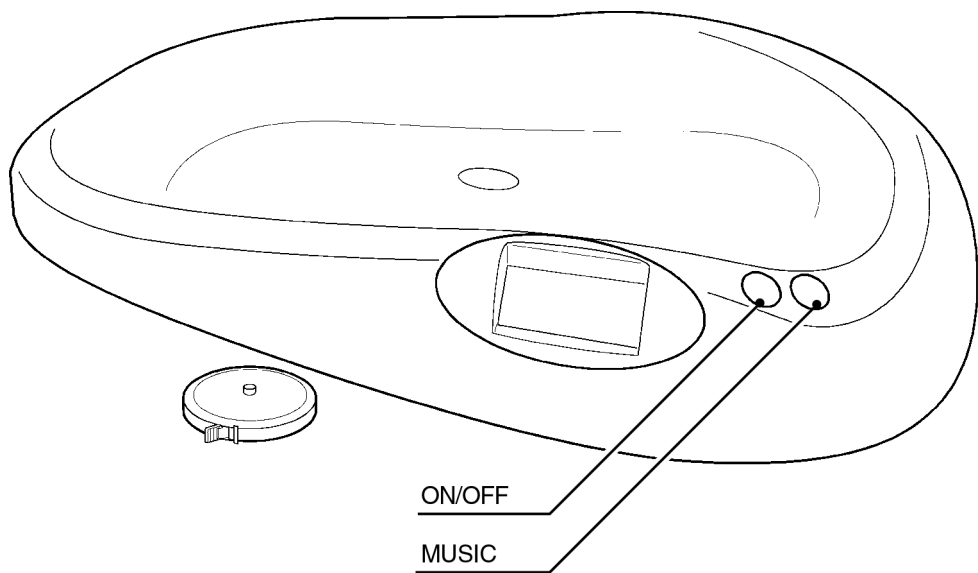

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η ηλεκτρονική ζυγαριά της GIMA είναι μία συσκευή χρήσιμη για την μέτρηση του βάρους και του ύψους των νεογέννητων. Η ζυγαριά έχει μεγάλη ακρίβεια και είναι προικισμένη με αυτόματη θέση στο μηδέν και αυτόματο σβήσιμο μετά από 30 δευτερόλεπτα μη χρήσης. Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με ένα σεντονάκι που πλένεται για να σκεπάζει το πιάτο της ζυγαριάς κατά την μέτρηση και ενός μετρικού τροχού για την μέτρηση του ύψους.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μέγιστο Βάρος : 20 Kg / 44 lbs

Ακρίβεια : 10g

Σε θερμοκρασία περιβάλλοντος εργασίας : 5°C - 35°C

Τροφοδότηση: 4 μπαταρίες AA 1,5V

Ελάχιστη Βάνης : 20g

Μέγιστη ύψους : 0-150 cm / 0-60

Θερμοκρασία αποθήκευσης : -10°C -60°C

Ανοχή: <math>\lt; 5.00\text{kg}> \pm 0.02\text{kg}>, \geq 5.00\text{kg}> \pm 0.2\% + 0.01\text{kg}>

ΟΡΙΣΜΟΣ

Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή αν διαπιστώσετε ότι αυτή έχει υποστεί ζημίες. Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό της. Αποφύγετε οποιαδήποτε πρόχειρη επισκευή. Οι επισκευές θα πρέπει να γίνουν αποκλειστικά και μόνον χρησιμοποιώντας γνήσια ανταλλακτικά τα οποία τοποθετούνται ανάλογα με την προβλεπόμενη χρήση της συσκευής.

Η συσκευή έχει κατασκευαστεί από υλικά ανθεκτικά στην διάβρωση και τις περιβαλλοντικές συνθήκες που προβλέπονται για την κανονική της χρήση, δεν χρειάζεται λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή· παρόλα αυτά θα πρέπει να φυλάσσεται σε κλειστό περιβάλλον και να μην παραμένει εκτεθειμένη στο φως και στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες, όπως επίσης θα πρέπει να φυλάσσεται και από τις σκόνες, έτσι ώστε να βρίσκεται πάντα κάτω από υγιεινές συνθήκες. Συστινουμε να μη αφήνετε το νεογέννητο χωρίς φύλαξη επάνω στην ζυγαριά και να μη αφήσετε στα χέρια του την μετρική ροδέλα.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ



Υπενθυμίζουμε ότι τα υλικά της συσκευασίας (χαρτί· σελοφάν· μεταλλικοί συνδετήρες· κολλητική ταινία κλπ.) μπορούν να προκαλέσουν κοψίματα ή πηλγές αν δεν χειριστούν κατάλληλα και με προσοχή. Αυτά θα πρέπει να απομακρυνθούν με κατάλληλα μέσα και δεν θα πρέπει να αφεθούν στα χέρια μη υπευθύνων ατόμων. Το ίδιο ισχύει και για τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την αφαίρεση της συσκευασίας (ψαλίδιά· μαχαίρια κλπ.).

Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνετε όταν ανοίξετε την συσκευασία, είναι ο έλεγχος των μερών που αποτελούν την συσκευή· επαληθεύστε αν υπάρχουν όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα και αν αυτά βρίσκονται σε αρίστη κατάσταση.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η πρώτη ενέργεια που πρέπει να κάνετε μετά από το άνοιγμα της συσκευασίας είναι η εγκατάσταση των μπαταριών.

Ο χώρος για τις μπαταρίες βρίσκεται κάτω από την βάση της ζυγαριάς. Τοποθετήστε 4 καινούργιες μπαταρίες προσέχοντας την σωστή πολικότητα και κλείστε ξανά το καπάκι.

Η ζυγαριά των νεογέννητων δεν έχει ανάγκη από ρύθμιση αλλά είναι απαραίτητο να τοποθετηθεί σε οριζόντια επιφάνεια.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ξένα σώματα κάτω από την ζυγαριά για νεογέννητα και ότι τα ποδαράκια ακουμπούν στο επίπεδο της βάσης.

Πιέστε το κουμπί ON/OFF και περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα χωρίς να ακουμπήσετε βάρη στο πιάτο. Όταν είναι ενεργοποιημένη η κλίμακα, θα εμφανιστεί η τελευταία τιμή μέτρησης (όχι μικρότερη από 0,5kg και κλειδωμένη), εάν υπάρχει, και στη συνέχεια θα επαναρυθμιστεί σε 0,00.

Η ζυγαριά είναι φυσιολογικά ρυθμισμένη σε κιλά. Για να αλλάξει την μονάδα μέτρησης, μετά την ενεργοποίηση της κλίμακας, πιέστε ξανά το πλήκτρο ενεργοποίησης / απενεργοποίησης πριν εμφανιστεί η ένδειξη 0.0.

Με κάθε πίεση θα είναι δυνατόν να επιλέξετε εναλλακτικά μεταξύ kg ή lb, στην οθόνη θα εμφανιστεί η μονάδα μέτρησης που επιλέξατε.

Για να αποσπάσετε την προσοχή του νεογέννητου και για να ευκολύνετε τις εργασίες ζυγίσματος είναι δυνατόν να ενεργοποιήσετε μία μελωδία πιέζοντας το κουμπί «MUSIC», για να σταματήσετε την μελωδία πιέστε ξανά το ίδιο κουμπί.

Διαβάστε την τιμή βάρους που αναβασβήνει στην οθόνη. Εάν η ζυγαριά υπερβεί το μέγιστο βάρος στην οθόνη εμφανίζεται «0-LD». Όταν αφαιρεθεί το βάρος, επαναφέρεται στο 0,00.



Μη χτυπάτε.

Μη βάζετε σωρούς από την κλίμακα.

Μη βυθίζετε στο νερό.

Μη ζυγίζετε υπερβολικά βάρη και κάντε έτσι ώστε τα μωρά να μη κουνιούνται στον δίσκο' μπορεί να χαλάσει ο χώρος φορτίου!











Εάν η ζυγαριά δεν χρησιμοποιείται σβήνει αυτόματα μετά από 30 δευτερόλεπτα περίπου, για να σβήσετε χειρονακτικά την ζυγαριά πιάστε το κουμπί ON/OFF με την ζυγαριά άδεια. Αφαιρέστε τις μπαταρίες όταν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται για πολύ καιρό.

Για να πραγματοποιήσετε την μέτρηση ύψους, τοποθετήστε το νεογέννητο ξαπλωμένο σε μία σταθερή επιφάνεια και χρησιμοποιήστε τον τροχό που σας εφοδιάσαμε.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Όταν στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη αφόρτιστη μπαταρία είναι αναγκαίο να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες. Χωνέψετε τις εξαντλημένες μπαταρίες κατά τους ισχύοντες νόμους.

Το προϊόν δεν έχει ανάγκη από μια ειδική συντήρηση. Η διάρκεια ζωής του είναι σχετική με την χρήση του, για τον καθαρισμό μη βυθίσετε την συσκευή σε νερό ή υγρά, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί βρεγμένο με απορυπαντικά και/ή απολυμαντικά που να μη διαβρώνουν το προϊόν.

	Προσοχή: διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες (ενστάσεις)		Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης		Διάθεση WEEE
	Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον		Κρατήστε το μακριά από ηλιακή ακτινοβολία		Όριο θερμοκρασίας
	Κωδικός προϊόντος		Αριθμός παρτίδας		Ημερομηνία παραγωγής
	Προϊόν σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή Οδηγία				



ΧΩΝΕΥΣΗ: Το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με άλλα απορρίμματα του σπιτιού. Οι χρήστες πρέπει να φροντίσουν για την χώνευση των συσκευών μεταφέροντάς τες σε ειδικούς τόπους διαχωρισμού για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ GIMA

Ισχύει η τυπική εγγύηση B2B της Gima διάρκειας 12 μηνών