

seca 210

seca
Precision for health

Συγχαρητήρια

Με το πατάκι μέτρησης seca 210 αποκτήσατε μία σταθερή συσκευή ακριβείας για τη μέτρηση του ύψους σε βρέφη. Το πατάκι μέτρησης seca 210 έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται σε ιατρεία παιδιάτρων, νοσοκομεία παιδών ή για τις κατ' οίκον επισκέψεις παιδιάτρων και μαμών.

Το πατάκι μέτρησης ξετυλίγεται και για αυτό δεν πιάνει πολύ χώρο. Το πατάκι διαθέτει επίσης στο σημείο κεφαλής τρύπες, οι οποίες εξυπηρετούν την ανάρτησή του σε τοίχο.

Ασφάλεια

Πριν χρησιμοποιήσετε το πατάκι μέτρησης, διαθέστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε τις ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας.

Τηρείτε τις υποδείξεις που αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήσης.


- Μην αφήνετε ποτέ το βρέφος ανεπιτήρητο πάνω στο πατάκι μέτρησης.
- Η μέτρηση του ύψους πρέπει να γίνεται πάνω σε επιφάνειες, από τις οποίες δεν μπορεί να πέσει κάτω το βρέφος.
- Προσέχετε ώστε να γίνεται τακτικό καθάρισμα και απολύμανση στο πατάκι μέτρησης, για να αποφεύγεται η μετάδοση μεταδοτικών ασθενειών.
- Για την ακριβή μέτρηση του ύψους είναι απαραίτητο και ένα δεύτερο άτομο.

Χειρισμός

Πορεία μέτρησης:

1. Τοποθετήστε το βρέφος πάνω στο πατάκι μέτρησης. Το κεφάλι του βρέφους πρέπει να βρίσκεται στο σημείο αναστολής της κεφαλής (1).
2. Με το δεξί χέρι σπρώχνετε τον αναστολέα ποδιών (2) προς την κατεύθυνση του βρέφους. Το αριστερό χέρι κρατάει σταθερά το βρέφος.

3. Τεντώνετε τα πόδια, πιέζοντας ελαφρώς με το αριστερό χέρι τα γόνατα του βρέφους προς τα κάτω.
4. Με το δεξί χέρι τοποθετείτε τον αναστολέα ποδιών (2) σε ορθή γωνία στις πατούσες του βρέφους.
5. Διαβάστε το μήκος του σώματος στο δάπεδο του πατακιού μέτρησης (3).
Εάν τηρείτε τις ανωτέρω αναφερόμενες οδηγίες, θα έχετε μέτρηση ακριβείας της τάξης των +/- 5 mm.

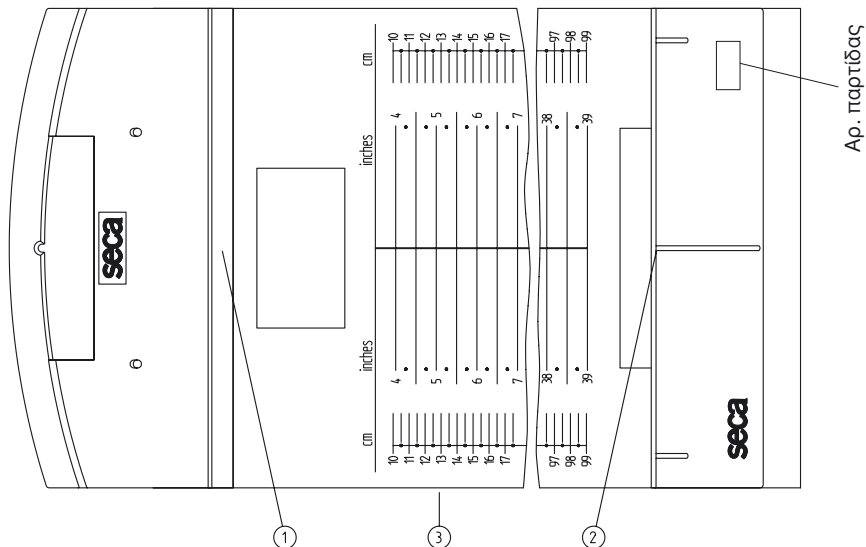

Καθάρισμα

Ανάλογα με τις ανάγκες, καθαρίζετε το πατάκι μέτρησης με οικιακό μέσο καθαρισμού ή συνηθισμένο μέσο απολύμανσης. Τηρείτε τις υποδείξεις του κατασκευαστή.

Τεχνικά στοιχεία

Τομέας μέτρησης:	100 - 990 mm / 4 - 39 ίντσες
Κλίμακα:	5 mm / 1/4 ίντσες
Ξκρίβεια:	καλύτερη από ± 5 mm
Διαστάσεις (ΠxΥxΒ):	300 mm x 140 mm x 1340 mm
Βάρος:	περ. 500 g
Τομέας θερμοκρασίας:	+10 °C έως +40 °C
Ιατρικό προϊόν σύμφωνα με την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ:	Κατηγορία I με λειτουργία μέτρησης

6. Απόσυρση

Σε περίπτωση που είναι αδύνατη πλέον η χρήση του πατακιού μέτρησης, μπορείτε να πληροφορηθείτε από την τοπική υπηρεσία διάθεσης απορριμμάτων τα αναγκαία μέτρα για την κατάλληλη απόσυρση.

Εγγύηση

Για ελαττώματα, τα οποία οφείλονται σε σφάλματα υλικού ή κατασκευής, ισχύει διετής προθεσμία εγγύησης από την ημερομηνία παράδοσης. Όλα τα κινούμενα εξαρτήματα, όπως π.χ. μπαταρίες, καλώδια, τροφοδοτικά, συσσωρευτές κ.λπ., αποκλείονται από την εγγύηση αυτή. Ελαττώματα, τα οποία καλύπτονται από την εγγύηση, επιδιορθώνονται δωρεάν για τον πελάτη με προσκόμιση της απόδειξης αγοράς. Περαιτέρω αξιώσεις δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη. Τα εξοδα μεταφοράς από και προς τον πελάτη επιβαρύνουν τον πελάτη, εάν η συσκευή βρίσκεται σε άλλο μέρος από την έδρα του πελάτη. Σε περίπτωση ζημιών που οφείλονται στη μεταφορά, μπορεί να εγερθεί εγγυητική αξίωση μόνο εφόσον χρησιμοποιήθηκαν για τις μεταφορές η πλήρης γνήσια συσκευασία και Το προϊόν η ζυγαριά ασφαλίθηκε και στερεώθηκε στη συσκευασία όπως κατά τη γνήσια συσκευασία της. Για το λόγο αυτό διαφυλάξτε σε ασφαλές μέρος όλα τα μέρη της συσκευασίας.

Δεν υφίσταται εγγυητική αξίωση, εάν η συσκευή ανοιχτεί από άτομα, τα οποία δεν έχουν τη ρητή εξουσιοδότηση για το σκοπό αυτό από την εταιρία seca.

Παρακαλούμε τους πελάτες μας στο εξωτερικό, σε περίπτωση εγγυητικής αξίωσης, να απευθυνθούν άμεσα στην αντιπροσωπεία αγοράς της εκάστοτε χώρας.

CE-Δήλωση Συμβατότητας

Η μηχανική συσκευή μέτρησης μήκους

Μοντέλο seca 210

Αρ. παρτίδας: βλέπε πλατόφορμα
μέτρησης κάτω

Το πατάκι μέτρησης εκπληρώνει τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ για ιατρικά προϊόντα.

seca gmbh & co. kg.


Sönke Vogel

– Geschäftsführer Finanzen & Technik –

Hamburg

 : www.seca.com

seca deutschland

Medical Scales and Measuring Systems

seca gmbh & co. kg.

Hammer Steindamm 9-25

22089 Hamburg • Germany

Phone • +49 (0)40 20 00 00 0

Fax • +49 (0)40 20 00 00 50

E-mail • info@seca.com

All contact data under www.seca.com

17-10-02-222 h/08 L

seca
group

seca deutschland

seca france

seca united kingdom

seca north america

seca schweiz

seca zhong guo

seca nihon

seca mexico

seca austria