



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Gima S.p.A. Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

ORCHIDOMETRO - ORCHIDOMETER ORCHIDOMÈTRE - ORQUIDÓMETRO - ORQUIDÓMETRO - ORCHIDOMETER - ORCHIDOMETR - ORCHIDOMETR - ORCHIDOMETER - ORKIDOMETRI - ORKIDOMETER - ΟΡΧΙΔΟΜΕΤΡΟ

Manuale d'uso - User manual - Manuel de l'utilisateur - Guía de uso Guia para utilização - Gebrauchs- und instandhaltungsanleitung Instrukcja obsługi -
Návod k použití - Gebruikershandleiding Käyttöohje - Användarhandbok - Οδηγίες χρήσης

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το ορχιδόμετρο είναι ένα όργανο που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του όγκου των όρχεων. Αποτελείται από μια αλυσίδα δώδεκα ξύλινων αριθμημένων σφαιριδίων. Τα σφαιρίδια είναι ταξινομημένα με αύξουσα σειρά από 1 έως 25 χιλιοστά. Εάν το μέγεθος των όρχεων δεν συμβαδίζει με τις άλλες παραμέτρους σεξουαλικής ωριμότητας τότε αυτό μπορεί να αποτελεί σημαντική ένδειξη για την παρουσία διαφόρων παθήσεων.

Στην περίπτωση αυτή συνιστάται η εκτέλεση περαιτέρω ελέγχων και με άλλα όργανα προκειμένου να γίνεται σωστή διάγνωση.

ΣΥΜΒΟΛΑ

	Προσοχή: διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες (ενστάσεις)
REF	Κωδικός προϊόντος
LOT	Αριθμός παρτίδας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΟΡΧΙΔΟΜΕΤΡΟ:

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό πανί ή ένα χαρτομάντηλο ελαφρώς εμποτισμένο με απολυμαντικό για να καθαρίσετε την επιφάνεια του ορχιδόμετρου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΧΙΔΟΜΕΤΡΟΥ

Συγκρίνετε τα σφαιρίδια του ορχιδόμετρου με την περιοχή των όρχεων για να προσδιορίσετε το στάδιο σεξουαλικής ωριμότητας. Διαβάστε τον αριθμό του σφαιριδίου που πλησιάζει περισσότερο στο μέγεθος του όρχι.

Αριθμός που αναγράφεται στο σφαιρίδιο	Στάδιο σεξουαλικής ωριμότητας
1~3	Παιδική ηλικία
4~6	Πρώιμη εφηβεία
8, 10	Μέση εφηβεία
12, 15	Όψιμη εφηβεία
20, 25	Ενηλικίωση

Το όργανο δεν αποτελεί ιατροτεχνολογικό προϊόν.

REF A474 (Gima 27337)

Importato e distribuito da/Imported and distributed by:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
Made in China

