

Instructions for use

Инструкции за употреба

Návod k použití

Brugervejledning

Bedienungsanleitung

Οδηγίες χρήσης

Instrucciones de uso

Kasutusjuhend

Käyttöohjeet

Mode d'emploi

Upute za upotrebu

Használati útmutató

Istruzioni per l'uso

使用說明書

Naudojimo instrukcija

Lietošanas pamācība

Gebruiksaanwijzing

Bruksanvisning

Instrukcja użycia

Instruções de utilização

Instrucțiuni de utilizare

Инструкция по приме

Návod na použitie

Navodila za uporabo

Brukspanning

Kullanım talimatı

使用說明

使用說明

EL

Το ηλεκτρόδιο εφαρμόζεται στην επιφάνεια του σώματος προκειμένου να μεταδοθεί το ηλεκτρικό σήμα από την επιφάνεια του σώματος σε μια συσκευή καταγραφής και παρακολούθησης που παράγει ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα ή ένα ανυπασματοκαρδιογράφημα.

- | | |
|--------------------------------|--|
| <p>ηλεκτροπληθισμός</p> | <p>1. Τα ηλεκτροπληθιστικά επιπλέοντα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο σε σθεναρά άρρωστα (π.χ. όχι πάνω από ανοικτά τραύματα, όληλη, καλοήγητες ή κρηνηνικές περιχρήσεις δερματίτις).</p> <p>2. Για μία χρήση μόνο. Η επαναχρησιμοποίηση του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει μόλυνση του οδηγού ή λαομύκη.</p> <p>3. Μετά την απομάκρυνση των ηλεκτροπληθιστών από την προστατευτική επένδυση, η προστατευτική επένδυση πρέπει να απορριπτεί σε κατάλληλο κάδο απορριμμάτων.</p> <p>4. Με την εξαέρωση του SU-00 C: Αφαιρέστε το ηλεκτροπληθιστικό από τον ασθενή κατά την εκτέλεση άσκησης απεικόνισης μηχανικής συντονισμού (MRI) καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει έγκλωμο του δερμάτος στον ασθενή.</p> |
|--------------------------------|--|

κατά την αντικατάσταση των ηλεκτροδίων τοποθετήστε τα μία μία περιοχή του δέρματος.
Το ηλεκτρόδιο μπορεί να βλάψει το δέρμα εάν παραμείνει χωρίς προστασία.
Η αμορφοποιητική νορμοθεσία των ΗΠΑ περιορίζει την πώληση αυτών των συσκευών μόνο από κτηρ ή κάποιον εκπαιδευμένο αυτών.
Το ηλεκτρόδιο χωρίς προστατευτική καλώδιο απαγορεύει θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο με καλώδιο απαγορεύει συμφορμωμάτων με το IEC 60601-1.
Μόνο για το SU-00-C: Κατά τη διάρκεια σάρωσης MRI τα ηλεκτρόδια μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με καλώδιο απαγορεύει που συμφορμωμάτων με τις απαιτήσεις MRI.

Οι δυναμικές ανεπιθύμητες ενέργειες που σχετίζονται με τη χρήση ηλεκτροδίων επιφάνειας είναι δερματικές αντιδράσεις όπως έγκαυμα του δέρματος, ερυθρότητα του δέρματος, κνησμός του δέρματος και μικρές φυσαλίδες.

[illegible]

Κατάσταση	Σύστημα	Σύστημα καλοκαιρινό	Ανα συστήματα	Ευθείας συστήν	Διόρθωση χρόνου
N	Υπορ. τ.δ.λ.	Αρκεύου	Ανα/Α/Γ	Ευθείας	72
M	Υπορ. τ.δ.λ.	Αρκεύου	Ανα/Α/Γ	Ευθείας	24
P	Υπορ. τ.δ.λ.	Αρκεύου	Ανα/Α/Γ	Παράσπαση	24
P	Υπορ. τ.δ.λ.	Αρκεύου	Ανα/Α/Γ	Παράσπαση	24
Q	Υπορ. τ.δ.λ.	Αρκεύου	Ανα/Α/Γ	Ευθείας	24
QR	Υπορ. τ.δ.λ.	Αρκεύου	Ανα/Α/Γ	Ευθείας	24
SR	Υπορ. τ.δ.λ.	Αρκεύου	Ανα/Α/Γ	Ευθείας	24
SP	Υπορ. τ.δ.λ.	Αρκεύου	Ανα/Α/Γ	Ευθείας	24
SJ	Υπορ. τ.δ.λ.	Αρκεύου	Ανα/Α/Γ	Ευθείας	24
SL	Υπορ. τ.δ.λ.	Αρκεύου	Ανα/Α/Γ	Ευθείας	24
UL	Υπορ. τ.δ.λ.	Αρκεύου	Ανα/Α/Γ	Ευθείας	72
VLC	Υπορ. τ.δ.λ.	Αρκεύου	Ανα/Α/Γ	Ευθείας	72