



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS



GIMA

BARELLA COMPLETAMENTE AUTOMATICA CON POSIZIONI VARIABILI FULL AUTOMATIC STRETCHER WITH VARIED POSITIONS CIVIÈRE ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE À POSITIONS VARIÉES VOLLAUTOMATISCHE VERSTELLBARE KRANKENTRAGE CAMILLA TOTALMENTE AUTOMÁTICA CON POSICIONES VARIADAS MACA TOTALMENTE AUTOMÁTICA COM VÁRIAS POSIÇÕES ΠΛ'ΗΡΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΦΟΡΕΪΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ Θ'ΕΞΕΩΝ ΠΛ'ΗΡΩΣ Θ'ΕΞΕΩΝ

نقالة أوتوماتيكية بالكامل مع أوضاع متغيرة

E' necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρισκείτε.

يجب الإبلاغ فوراً عن أي حادث خطير وقع فيما يتعلق بالجهاز الطبي الذي زودنا به إلى الجهة الصانعة والسلطة المختصة في الدولة العضو التي يقع فيها.

GIMA 34057



Zhangjiagang Tengda Machinery Manufacturer Co.,Ltd

No.999 Hongqi Road, Changyinsha
Modern Agricultural Demonstration Area,
Zhangjiagang City, Jiangsu, 215623, China
Made In China



TD010131F



SUNGO Europe B.V.

Fascinatio Boulevard 522, Unit 2909 ,1.7VA
Capelle aan den IJssel, The Netherlands



Gima S.p.A.

Via Marconi, 20060 - 1 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



I. Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Μέγεθος (Μ*Π*Υ):
Μέγιστο Μέγεθος: 89*56*198 (εκ.)
Ελάχιστο Μέγεθος: 33*56*198 (εκ.)
- Ύψος της επιφάνειας στήριξης (4 βαθμίδες):
93εκ./82εκ./70εκ./35εκ.
- Ικανότητα Φορτίου: 159kg
- Καθαρό βάρος: 40kgs
Μικτό βάρος: 46kgs
- Μέγιστη γωνία κλίσης προς τα μπροστά: 11 μοίρες
- Μέγιστη γωνία κλίσης προς τα πίσω: 25 μοίρες

II. Τρόπος Χρήσης

- Τοποθετήστε το στρώμα επάνω στο φορείο και στερεώστε το με τους μίαντες. Με αυτόν τον τρόπο ο ασθενής θα νιώθει ασφάλεια και άνεση.
- Τοποθέτηση ή αφαίρεση του φορείου από τη βάση στήριξης: για την τοποθέτηση του φορείου στη βάση στήριξης, τοποθετήστε το φορείο επάνω στη βάση στήριξης, σπρώξτε το φορείο προς τα μπροστά και επιβεβαιώστε ότι τόσο οι μπροστινοί όσο και οι πίσω τροχοί έχουν μπει στο σύστημα στερέωσης. Κατά την τοποθέτηση το φορείο κλειδώνει αυτόματα. Για την αφαίρεση του φορείου από τη βάση στήριξης, πιέστε το κόκκινο κουμπί, τραβήξτε το φορείο έξω από τη διάταξη ασφάλειας και έπειτα μπορείτε να αφαιρέσετε το φορείο. Το φορείο μπορεί να μετατραπεί σε αναπηρικό καρότσι.
- Τοποθέτηση και αφαίρεση του φορείου από το ασθενοφόρο: ① όταν η βάση στήριξης του φορείου μπει στο ασθενοφόρο, τραβήξτε τη χειρολαβή και έπειτα απελευθερώστε την αφού διπλώσουν τα μπροστινά και τα πίσω πόδια στήριξης. Σπρώξτε τη βάση στήριξης του φορείου ώστε να τοποθετηθεί στη διάταξη ασφάλειας και να στερεωθεί. (η βάση στήριξης του φορείου διαθέτει διάταξη ασφάλειας). ② Κατά την αφαίρεση της βάσης στήριξης του φορείου από το ασθενοφόρο, απασφαλίστε τη διάταξη ασφάλειας, τραβήξτε το φορείο και όταν τα πόδια στήριξης της βάσης του φορείου βγουν από το ασθενοφόρο, τραβήξτε απλώς τη χειρολαβή, έτσι ώστε τα πίσω πόδια στήριξης να μουν στη θέση τους, όταν η βάση του φορείου είναι έξω από το ασθενοφόρο, τα μπροστινά πόδια μπαίνουν αυτόματα στη θέση τους.
- Προστατευτικό κιγκλίδωμα: διαθέτει διάταξη αυτόματης ασφάλειας. Για να το κατεβάσετε, πιάστε το κιγκλίδωμα και τραβήξτε το έξω από τη διάταξη ασφάλειας.
- Στατώ ορόυ: ① Σηκώστε τον στύλο και σπρώξτε το προς τα μπροστά για να στερεωθεί. Εκτελέστε την αντίθετη ενέργεια για να τον κατεβάσετε. ② Το ύψος του στατώ ορόυ μπορεί να ρυθμιστεί, περιστρέψτε αριστερόστροφα και απελευθερώστε το περικόχλιο

για να αφαιρεθεί ο στύλος του στατώ ορόυ. Κατά την τοποθέτηση του στατώ ορόυ, ρυθμίστε απλώς το κατάλληλο ύψος και έπειτα περιστρέψτε δεξιόστροφα το περικόχλιο.

- Ρύθμιση κρεβατιού: η βάση στήριξης του φορείου διαθέτει χειρολαβές στις δύο πλευρές, τραβήξτε τη χειρολαβή για να μπορέσετε να ρυθμίσετε τη βάση στήριξης του φορείου σε ένα από τα 4 επίπεδα και διπλώστε μπροστά και πίσω ανάλογα με τις ανάγκες. Επίσης, μπορείτε να ρυθμίσετε και το ύψος του κρεβατιού, χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα τις χειρολαβές που υπάρχουν στην κάθε πλευρά.

III. Πεδίο εφαρμογής

Το φορείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωριστά και, σε αυτή την περίπτωση, είναι κατάλληλο για το σύστημα άμεσης βοήθειας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα σε ασθενοφόρο. Το φορείο αυτό μπορεί να μετατραπεί σε αναπηρικό καρότσι εάν δεν χωράει σε χώρους όπως ασανσέρ και στενούς διαδρόμους.

IV. Συντήρηση

- Διατηρείτε το προϊόν καθαρό και προστατεύστε το από τη σκουριά.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη του είναι σταθερά συνδεδεμένα μεταξύ τους.

V. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή

Κατά τη μεταφορά του ασθενούς, βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει τη διάταξη ασφάλειας, ότι την τοποθετήσατε σωστά και ότι δέσατε τους μίαντες.

VI. Αποθήκευση και μεταφορά

- Το προϊόν αυτό πρέπει να αποθηκεύεται σε ξηρό μέρος και να προστατεύεται από τη σκουριά.
- Μπορεί να μεταφερθεί με κανονικά οχήματα.
- Κατά την αποθήκευση ή μεταφορά, τοποθετήστε το σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας. Απαγορεύεται να το τοποθετείτε ανάποδα.

VII. Συσκευασία και Πρόσθετα Υλικά

- Η συσκευασία αυτού του φορείου αποτελείται εξ ολοκλήρου από χαρτόνι.
- Πρόσθετα υλικά: πιστοποιητικό καταλληλότητας και ετικέτες σήμανσης.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ GIMA

Ισχύει η τυπική εγγύηση B2B της Gima διάρκειας 12 μηνών.

REF	Κωδικός προϊόντος	LOT	Αριθμός παρτίδας		Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης
	Παραγωγός		Ιατρική συσκευή σύμφωνα με την ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 745/2017		Κρατήστε το μακριά από ηλιακή ακτινοβολία
	Ημερομηνία παραγωγής		Προσοχή: διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες (ενστάσεις)		Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον
	Ιατροτεχνολογικό προϊόν		Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση		Μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής
	Εισαγωγή από:				

