

COPERTA ISOTERMICA



COUVERTURE DE SURVIE



RESCUE BLANKET

RETTUNGSDECKE MANTA DE RESCATE

2100 x 1600 mm.

Film di poliestere metallizzato

Metallized polyester film

Film polyester métallisé

Metallisierte Polyesterfolie

Film de poliester metalizado

Filme de poliéster metalizado

Folie de poliester metalizată

Metalliserad polyesterfilm

Metallisoitu polyesterikalvo

Fémbevonatú poliészter fólia

Metalizirana poliesterska folija

Επιμεταλλωμένη μεμβράνη πολυεστέρα

طبقة من البوليستر المعدن

REF 34085

LOT 000053



02-2025



03-2030

UDI



(01)08023279340853
(10)000053
(11)250200
(17)300300



Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com - Made in China

GIMA

www.gimaitaly.com




8 023279 340853 >

Rev. 3-04.25

MANTA ISOTÉRMICA - PÄTURÄ IZOTERMÄ
ISOTERMISKT TÄCKE - LÄMPÖPEITTO
IZOTERMİKUS TAKARÓ - IZOTERMNI POKRIVAČ
ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ ΚΟΥΒΕΡΤΑ - بطانية متساوية الحرارة

GR - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Οι ανακλαστικές ιδιότητες του υλικού προστατεύουν το σώμα από τις ηλιακές ακτίνες και αποτρέπουν τη διαφυγή της θερμότητας από το σώμα. Η χρήση της συνιστάται σε περίπτωση **ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ, ΑΕΡΑ, ΒΡΟΧΗΣ, ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΟΛΟΥΣΤΟ ΜΕΡΟΣ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.** Απλώστε την κουβέρτα επάνω στο σώμα χωρίς να τη σφίγγετε. Η χρυσή πλευρά τοποθετείται εξωτερικά για τη διατήρηση της θερμότητας. Η ασημένια πλευρά τοποθετείται εξωτερικά για την ανάκλαση των ηλιακών ακτίνων.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ** • Τα υγρά ή μουχλιασμένα προϊόντα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται. • Μόνο για μία χρήση, δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση. • Μην αποθηκεύετε σε ακραίες θερμοκρασίες. • Απορρίψτε το με ασφάλεια μετά τη χρήση για να αποφύγετε τον κίνδυνο μόλυνσης. • Αναφέρετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με τη συσκευή στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο χρήστης ή/και ο ασθενής. **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ** • Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται σε σχετική υγρασία μικρότερη από 80%, το περιβάλλον αποθήκευσης πρέπει να διατηρείται με μη διαβρωτικά αέρια, στεγνό, αποφεύγοντας το ηλιακό φως, καλά αεριζόμενους όρους και καθαρό. • Η συσκευή πρέπει να προσέχεται κατά τη μεταφορά και το χειρισμό.