

Ελληνικά:

Η μάσκα Ambu Lifekey είναι μια προστατευτική μάσκα μιας χρήσης με μονόδρομη βαλβίδα για ανάνηψη στόμα με στόμα ή στόμα με μύτη.

1. Ξεδιπλώστε τη μάσκα.
2. Η ένδειξη "PATIENT" πρέπει να είναι προς τον ασθενή.

Η ένδειξη "TRIPLATE" πρέπει να είναι προς το διασώστη.

Τοποθετήστε τη μάσκα στο πρόσωπο του ασθενούς.

3. Τοποθετήστε τα λάστιχα πίσω από τα αυτιά του ασθενούς.



Στόμα
με μύτη



Στόμα
με στόμα