

PACCHETTO TEST BOWIE DICK
BOWIE DICK TEST PACK
PACK TEST DE BOWIE DICK
PAQUETE DE PRUEBA BOWIE DICK
PACOTE DE TESTE BOWIE DICK
BOWIE-DICK-TESTPAKET
ПАКЕТО ΕΛΕΓΧΟΥ BOWIE DICK

- Manuale d'uso e manutenzione
- Use and maintenance book
- Instructions de fonctionnement et entretien
- Manual de uso y mantenimiento

- Manual de uso e manutenção
- Betriebs und wartungsanweisungen
- Εγχειρίδιο χρήσης και συντηρησης

ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

ATTENTION: The operators must carefully read and completely understand the present manual before using the product.

AVIS: Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d'utiliser le produit.

ATENCIÓN: Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual antes de utilizar el producto.

CUIDADO: Os operadores devem ler e compreender este manual completamente antes de usar o produto.

VORSICHT: Bediener müssen dieses Handbuch vollständig lesen und verstehen, bevor sie das Produkt verwenden.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι χειριστές πρέπει να διαβάσουν και να κατανοήσουν πλήρως αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση του προϊόντος..

GIMA 35950





SP Medikal San Ltd. Sti
Deliklikaya Mah. Cubuklu Cad. 39
Arnavutkoy Istanbul Turkey
info@spmedikal.com
Made in Turkey



REF 102.002.0020



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

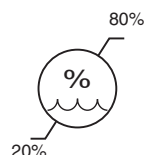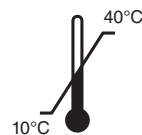

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Οδηγίες χρήσης

Όνομα προϊόντος:

Πακέτο Ελέγχου Bowie Dick

Στοιχεία προϊόντος:

102.002.0020 Bowie Dick Test Pack ECO

Περιεχόμενο:

- 1 Οδηγίες χρήσης
- 2 Επεξηγηματικά παραδείγματα

Πακέτο Ελέγχου Bowie Dick - Οδηγίες χρήσης

Ο Έλεγχος Bowie Dick είναι ένας υποχρεωτικός έλεγχος που πρέπει να πραγματοποιείται στην αρχή κάθε ημέρας. Προτού πραγματοποιήσετε τον Έλεγχο Bowie Dick ο αποστειρωτής ατμού πρέπει πρώτα να ζεσταίνεται.

Τοποθετήστε το Πακέτο στο κάτω ράφι του τρόλεϊ, στο κέντρο και κοντά στο σύστημα αποστράγγισης. Μην προσθέτετε κανένα φορτίο καθώς μπορεί να επηρεαστεί ο έλεγχος.

Εκτελέστε έναν κύκλο προ-κενού στους 134C - 3,5 λεπτά (τυπικός Κύκλος Ελέγχου Bowie Dick)

Μετά την ολοκλήρωση του κύκλου, ανοίξτε τον αποστειρωτή και αφαιρέστε το πακέτο. Ανοίξτε το κουτί στο επάνω μέρος και αφαιρέστε το φύλλο του δείκτη ελέγχου που βρίσκεται στο κέντρο του πακέτου. Εξετάστε την αλλαγή του χρώματος.

⚠ Προειδοποίηση: Το πακέτο μπορεί να είναι ακόμα ζεστό !! Απαιτείται προσεκτικός χειρισμός για την αποφυγή τραυματισμού.


Μετά την αξιολόγηση, καταγράψτε τα δεδομένα συμπληρώνοντας όλα τα πεδία στο Φύλλο του δείκτη ελέγχου με τα σχετικά στοιχεία και φυλάξτε το φύλλο του δείκτη ελέγχου για μελλοντική αναφορά.

Μπορείτε να απορρίψετε το κουτί και τα φύλλα από χαρτόνι ως κοινά απορρίμματα χαρτιού.


Για την ερμηνεία του φύλλου του δείκτη ελέγχου που περιέχεται στο Πακέτο Ελέγχου Bowie Dick δείτε το τεχνικό δελτίο δεδομένων.

Αποτελέσματα ελέγχου:


Αρχικό χρώμα

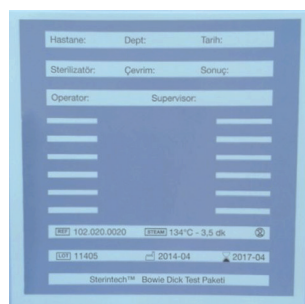


Ξηρή Θερμότητα 140 C - αποτέλεσμα 30 λεπ.

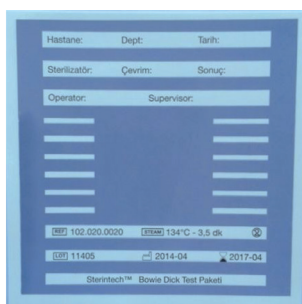

Χωρίς Κενό

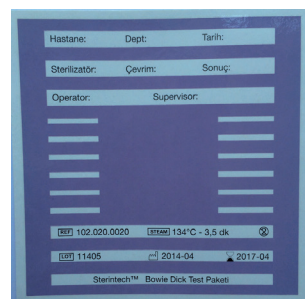


Μόνο ένας παλμός κενού

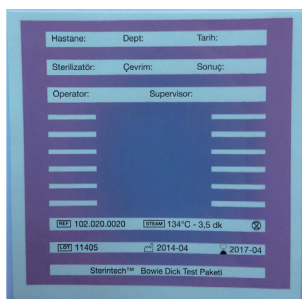

Δύο παλμοί κενού



Πλήρης κύκλος - τρεις παλμοί κενού

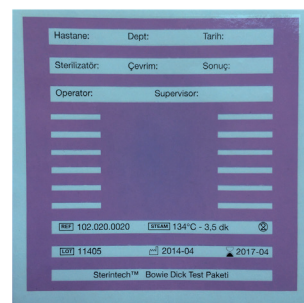

Σύμβολα:

	Ημερομηνία παραγωγής		Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον
	Παραγωγός		Κρατήστε το μακριά από ηλιακή ακτινοβολία
	Κωδικός προϊόντος		Όριο θερμοκρασίας
	Αριθμός παρτίδας		Όριο υγρασίας
	Ημερομηνία λήξεως		Προσοχή: διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες (ενστάσεις)
	Εισαγωγή από		Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ GIMA

Ισχύει η τυπική εγγύηση B2B της Gima διάρκειας 12 μηνών.