


SHOWER STOOL WITH TRAY
SGABELLO DA DOCCIA CON VASSOIO
TABOURET DE DOUCHE AVEC TABLETTE
DUSCHHOCKER MIT TABLETT
TABURETE DE DUCHA CON BANDEJA
BANQUETA DE CHUVEIRO COM PRATELEIRA
ΣΚΑΜΠΟΝ ΜΠΑΝΙΟΥ ΜΕ ΔΙΣΚΟ

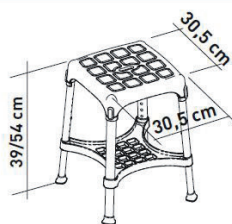

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ:

Τα προϊόντα της σειράς Σκαμπό επιτρέπουν στον χρήστη να έχει μεγαλύτερη αυτονομία και ανεξαρτησία στο ντους κατά τη διάρκεια της καθημερινής προσωπικής υγιεινής, μειώνοντας τη μυϊκή κόπωση λόγω της όρθιας στάσης καθώς και τον κίνδυνο ολίσθησης και ατυχημάτων. Οι εκδόσεις που διαθέτουν ελαστικά αντιολισθητικά πόδια εξασφαλίζουν καλύτερη πρόσφυση στο δάπεδο, ενώ τα μοντέλα που διαθέτουν πόδια με ρυθμιζόμενο ύψος επιτρέπουν στους χρήστες να τροποποιούν εύκολα το συνολικό ύψος του σκαμπό ανάλογα με τις ανάγκες. Οι εκδόσεις που διαθέτουν περιστρεφόμενο δίσκο εξασφαλίζουν στον χρήστη μεγαλύτερη ελευθερία κίνησης, δίχως να πρέπει να σηκωθεί από το σκαμπό. Χάρη στην ευελιξία τους, τα σκαμπό μπορούν επίσης να τοποθετηθούν επάνω σε ακανόνιστες επιφάνειες, οι οποίες χαρακτηρίζουν συνήθως πολλές βάσεις ντους. Τα σκαμπό διατίθενται σε τρεις διαφορετικούς τύπους. Τα σκαμπό μπορούν εύκολα να μεταφερθούν χάρη στο μικρό βάρος τους. Μπορείτε να τοποθετήσετε ένα μαλακό μαξιλάρι στο σκαμπό για μεγαλύτερη άνεση κατά τη χρήση του. Τα μαλακά μαξιλάρια και οι περιστρεφόμενοι δίσκοι πωλούνται χωριστά, ως αξεσουάρ.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:

Τα προϊόντα της σειράς Σκαμπό προσφέρουν σημαντική βοήθεια στους ηλικιωμένους, στους χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων, στα άτομα με μειωμένη κινητικότητα στην οσφυϊκή χώρα, στα γόνατα και στα ισχία, καθώς και σε όσους δυσκολεύονται να διατηρήσουν όρθια στάση κατά τα στάδια της καθημερινής προσωπικής υγιεινής στο ντους. Ο χρήστης πρέπει να έχει αυτονομία ισορροπίας κατά τη διάρκεια των κινήσεων που απαιτούνται για τη μετάβαση στην καθιστή και στην όρθια στάση, καθώς και να έχει επαρκή ικανότητα ώστε να παραμένει καθιστός. Δεν συνιστάται η χρήση των σκαμπό σε περίπτωση που ο χρήστης αντιμετωπίζει προβλήματα ισορροπίας ή αντίληψης.

ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ: 170Kg
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

- Το μέγιστο βάρος του χρήστη αναφέρεται στις παρούσες οδηγίες συναρμολόγησης και δεν πρέπει να υπερβαίνεται.
- Πριν από κάθε χρήση, ο χρήστης πρέπει να επαληθεύει ότι το σκαμπό είναι σωστά συναρμολογημένο και ότι είναι σταθερό.
- Το σκαμπό πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά επάνω σε επιφάνειες που δεν έχουν εμπόδια.
- Κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης του προϊόντος, πρέπει να τηρούνται κατά γράμμα όσα αναφέρονται στο Εγχειρίδιο χρήσης.
- Κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης ο κίνδυνος τραυματισμού στα δάχτυλα μπορεί να είναι αυξημένος.
- Μην ταλαντεύεστε ενώ κάθεστε στο σκαμπό. Μπορεί να γλιστρήσει, να αναποδογυρίσει ή να υποχωρήσουν τα πόδια του.
- Στηρίζετε πάντα το σκαμπό και στα 4 πόδια.
- Μην τροποποιείτε με κανέναν τρόπο το σκαμπό και τα εξαρτήματά του.
- Μη χρησιμοποιείτε το σκαμπό εάν έχει υποστεί ζημιά ή εάν έχει αλλοιωθεί με οποιονδήποτε τρόπο.
- Μετά τη χρήση, το σκαμπό πρέπει να απομακρύνεται από τη βάση του ντους ώστε να μην εμποδίζει.
- Μη χρησιμοποιείτε το σκαμπό για σκοπό διαφορετικό από τον προβλεπόμενο.
- Το σκαμπό δεν πρέπει να αποθηκεύεται σε εξωτερικό χώρο.
- Αποφύγετε την άμεση επαφή με ανοιχτές πληγές ή πάσχον δέρμα για την αποφυγή πιθανής μόλυνσης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:

Η συντήρηση του προϊόντος συνίσταται στις διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης. Για τη διασφάλιση της ασφαλούς χρήσης και της τήρησης των προτύπων υγιεινής, ο χρήστης είναι απαραίτητο να εκτελεί αυτές τις διαδικασίες πριν από κάθε χρήση. Ο χρήστης πρέπει να επιβεβαιώνει τη δομική ακεραιότητα τόσο του προϊόντος όσο και όλων των εξαρτημάτων του και να ελέγχει τη σύμφιση των βιδών. Για τον καθαρισμό και την απολύμανση απαιτείται η εκτέλεση των ακόλουθων διαδικασιών:

1. Φορέστε γάντια
2. Προτού προχωρήσετε σε σχολαστική απολύμανση, αφαιρέστε την ορατή βρωμιά.
3. Για τον καθαρισμό χρησιμοποιήστε νερό ή μη επιθετικά καθαριστικά.

4. Καθαρίστε με ένα στεγνό και καθαρό πανί.

Εναλλακτικά, μπορείτε να απολυμάνετε το προϊόν σε πλυντήριο πιάτων στη μέγιστη θερμοκρασία. Το μαλακό μαξιλάρι πρέπει αυστηρά να πλένεται στο χέρι.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ :

Το προϊόν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί από άλλους χρήστες. Προτού επαναχρησιμοποιηθεί από άλλον χρήστη, το προϊόν πρέπει να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται σωστά. Προτού παραχωρήσετε το προϊόν σε άλλον χρήστη απαιτείται έλεγχος από ειδικευμένο προσωπικό.

ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ:

Μην απορρίπτετε το προϊόν με τα κοινά αστικά απορρίμματα. Απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές για τη σωστή διαδικασία απόρριψης.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ:


Εάν προκληθεί κάποιο σοβαρό ατύχημα το οποίο συνδέεται με τη χρήση του παρόντος προϊόντος, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή στη διεύθυνση info@imglobaldesign.com και με την αρμόδια αρχή της χώρας σας.

REF	Κωδικός προϊόντος	LOT	Αριθμός παρτίδας
	Ιατρική συσκευή σύμφωνα με την ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/745		Παραγωγός
	Σειριακός αριθμός		Ημερομηνία παραγωγής
	Ιατροτεχνολογικό προϊόν		Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ GIMA

Ισχύει η τυπική εγγύηση B2B της Gima διάρκειας 12 μηνών.


1

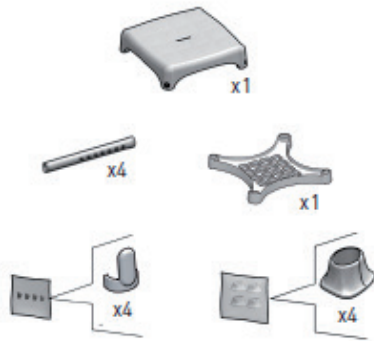

2




3

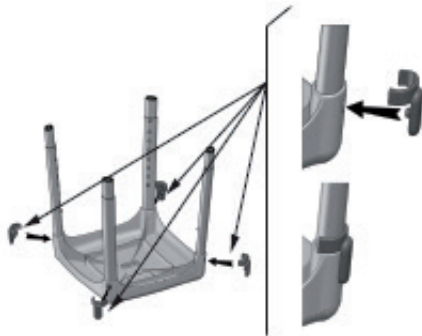


4



5

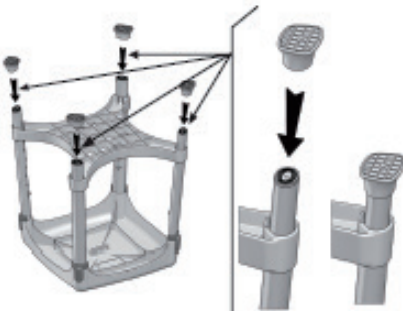

6

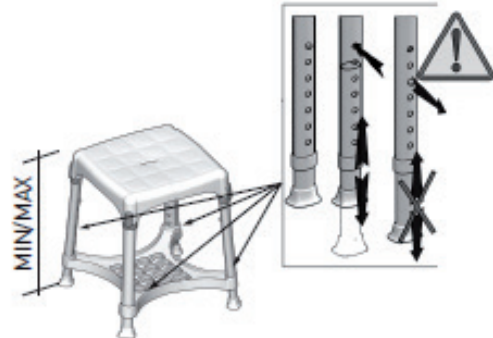

7



MAX USER WEIGH:
PESSO MASSIMO UTILIZZATORE:
POIDS MAXIMUM UTILISATEUR:
MAXIMALES BENUTZERGEWICHT:
PESSO MÁXIMO DEL USUARIO:
PESSO MÁXIMO DO UTILIZADOR
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ:

170 Kg
375 lb



LM GLOBAL DESING Ltd.
Suite 123, The Capel Building
Mary's Abbey Dublin 7, D07VY68, Ireland
Made in Italy

GIMA 42904

REF KING-STAT-74

