

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟ ΓΙΑΤΡΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Δεν προορίζεται για άτομα άνω των 242 lbs (110 kg) - Δεν προορίζεται για παγωμένες ή ολισθηρές συνθήκες. - Δεν

προορίζεται για άτομα με αλλεργίες στο λάτεξ.

ΟΔΗΓΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ: Για να ξεδουλώσετε το μπαστούνι σας, κρατήστε τη λαβή και αφήστε τα πτυσσόμενα τμήματα του άξονα να ξεδουλωθούν προς το δάπεδο. Για να αποφύγετε τις πτώσεις, θα πρέπει πάντα να ελέγχετε για να βεβαιωθείτε ότι τα μεμονωμένα τμήματα του άξονα (Εικ. 1) είναι ασφαλισμένα στη θέση τους.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΝ αποσυναρμολογήσετε το σώμα του μπαστούνιού. Το μπαστούνι περιέχει ένα ελαστικό κορδόνι στο εσωτερικό. Η μη ελεγχόμενη απελευθέρωση του ελαστικού κορδονιού στο εσωτερικό μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό σε απροσδόκητα μέρη του σώματος, ειδικά στα μάτια, εάν το ελαστικό κορδόνι κοπεί, ξεφτίσει ή καταστραφεί διακόψτε τη χρήση του.

ΜΗΝ τεντώνετε το κορδόνι περισσότερο από όσο χρειάζεται για να αποσυναρμολογήσετε ή να συναρμολογήσετε τα τμήματα.

ΓΙΑ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΤΟ ΎψΟΣ ΤΟΥ ΜΠΑΣΤΟΥΝΙΟΥ ΣΑΣ: Χαλαρώστε την κλειδαριά περιστροφής περιστρέφοντας την δεξιόστροφα αρκετές στροφές. Αποσυμπιέστε το κουμπί κλειδώματος και τραβήξτε προς τα επάνω τη λαβή για να επισημκυνθεί ή πιέστε προς τα κάτω τη λαβή για να μικρύνει. Θυμηθείτε να ξανασφίξετε την περιστρεφόμενη κλειδαριά προς τα πίσω και να προσαρμόσετε το μπαστούνι στο επιθυμητό ύψος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να αποφύγετε τις πτώσεις, βεβαιωθείτε πάντα ότι τα μεμονωμένα τμήματα του άξονα είναι ασφαλισμένα στη θέση τους και ότι το κουμπί κλειδώματος είναι πλήρως ενεργοποιημένο. Πάντα να βεβαιώνεστε ότι το περιστρεφόμενο πόδι του μπαστούνιου βιδώνει με ασφάλεια στο μπαστούνι για να αποφύγετε πτώσεις.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΕΤΕ ΤΟ ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ: Το μπαστούνι σας διπλώνεται εύκολα σε βολικό μέγεθος ταξιδιού διαχωρίζοντας τα 4 μεμονωμένα τμήματα άξονα μεταξύ τους. Κρατήστε κάθε σύνολο τμημάτων άξονα κοντά στην άρθρωση και τραβήξτε τα χωριστά. Τα μεμονωμένα τμήματα άξονα θα διπλώσουν μαζί.

ΓΙΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΑ ΦΩΤΑ ΣΤΟ ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ ΣΑΣ: Το κουμπί στην κορυφή της λαβής μπαστούνιού ενεργοποιεί τα φώτα.



Πατώντας το κουμπί μία φορά θα ενεργοποιηθεί το φως μπροστά από το μπαστούνι, πατώντας το ξανά θα ανάψει επίσης το κόκκινο φως στη βάση της λαβής, πατώντας τρίτη φορά, θα σβήσει. Το μπροστινό φως μπορεί να περιστραφεί για να κατευθύνει το φως όπου χρειάζεστε.

ΣΗΜΑ SOS: Για να ενεργοποιήσετε το σήμα SOS, πατήστε το κουμπί στο πλάι της λαβής, το φως στη βάση θα αναβοσβήσει και τομπαστούνι θα εκπέμψει έναν ήχο συναγερμού.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ: Ανοίξτε τη θήκη της μπαταρίας στο πίσω μέρος της λαβής. Αφαιρέστε τυχόν τελειωμένες μπαταρίες και απορρίψτε τις σωστά. Χρησιμοποιώντας 2 μπαταρίες AAA, τοποθετήστε τα με τη σωστή πολικότητα (θετικός πόλος στο εξωτερικό όπου βρίσκεται το ελατήριο). Κλείστε το κάλυμμα των μπαταριών. Ελέγχετε τακτικά το μπαστούνι για σημάδια φθοράς, συμπεριλαμβανομένης τυχόν φθοράς του ελαστικού κορδονιού ή φθοράς στα λαστιχένια πόδια. Εάν παρατηρήσετε σημάδια φθοράς, διακόψτε τη χρήση αμέσως.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην χρησιμοποιείτε μαζί παλιές και νέες μπαταρίες. Μην χρησιμοποιείτε μαζί αλκαλικές, τυποποιημένες μπαταρίες (ψευδαργύρου-άνθρακα) ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (νικελίου-καδμίου).

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ GIMA: Ισχύει η βασική εγγύηση B2B της Gima διάρκειας 12 μηνών.

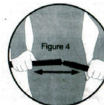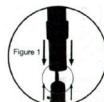

Gima 43050 - 43052

REF GB-806(1FOOT) GB-806(SKID PROOF)

Fabricato da/Manufactured by/Fabrique par/Fabricado por/Hergestellt von/
Fabricado por/Κατασκευάστηκε από/Произведено от/Vyrobce/Fremstillet af/
Tootja/Vaimistaja/Proizvodat/Gyártó/Ražots/Gamintojas/Produsert av/
Geïfabriceerd door/Wyprodukowane przez/Fabricat de/Vyrába/Proizvajalec/
Tilbered av/تصنيع بواسطة
Ningbo Gaobo Sports Co., Ltd
No.1, Xiajin, Dali, Shenzhen Town, Ninghai County
Ningbo 315514, China
Made in China

Importato da/Imported by/importé par/importado por/importiert von/
Importado por/Εισαγυγί από/Dovezeno od/Dovezeno uživatelem/importeret
af/Importēja/ Tuoja:/Uvezeno od strane/Importálta:/importēja/importavo/
Importert av/Geïmporteerde door/importowane przez/importat de/Dovážal/
Uvozi/importerad av/تصدير بواسطة
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

