

REF

KDB-699 (GIMA 43202)



Zhongshan Kangdebao(KDB) Rehabilitation Equipment Co.,Ltd.
Card 1, No.5, 24# Longcheng Road, Dongsheng Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China
Made in China

EC

REP

SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA
Capelle aan den IJssel, The Netherlands



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Το προϊόν αποτελείται από μια αναδιπλούμενη κατασκευή και το μόνο που χρειάζεται είναι να ανοίξετε το πλαίσιο και να συνδέσετε τα απαραίτητα μέρη, δηλαδή τις ρόδες, τον κάδο και το κάθισμα πριν από τη χρήση.
- Σηκώστε το κάθισμα, τοποθετήστε τον κάδο σωστά επάνω στο πλαίσιο του κάδου και έπειτα κατεβάστε το κάθισμα για χρήση.
- Μετά από τη χρήση, κλείστε το καπάκι και αφαιρέστε το από το πλαίσιο του κάδου.
- Η καρέκλα τουαλέτας μπορεί να διπλωθεί όταν δεν χρησιμοποιείται πάνοντας λιγότερο χώρο ώστε να διευκολύνεται η αποθήκευση.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Αποφύγετε τις γρατζουνιές με σκληρά αντικείμενα επάνω στην επιφάνεια του προϊόντος για να μην καταστραφεί το υλικό.
- Για τον καθημερινό καθαρισμό και συντήρηση, χρησιμοποιήστε ένα ουδέτερο συνθετικό απορρυπαντικό, σκουπίστε με ένα βρεγμένο πανί και έπειτα στεγνώστε με ένα στεγνό πανί.
- Το νοσηλευτικό προσωπικό ή ο χρήστης πρέπει να καθαρίζει και να απολυμαίνει το προϊόν μία φορά την ημέρα, ενώ όταν αλλάζει ο ασθενής απαιτείται σχολαστική απολύμανση.
- Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά οξέα και αλκάλια για να μην προκληθεί διάβρωση.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

- Τοποθετήστε την καρέκλα τουαλέτας σε ξηρό και αεριζόμενο χώρο μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και αποφύγετε τη χρήση διαβρωτικών χημικών όπως έλαια, οξέα και αλκάλια.
- Η καρέκλα τουαλέτας δεν πρέπει να εκτίθεται στον ήλιο και στη βροχή και πρέπει να σκουπίζεται καλά ώστε να στεγνώσει αμέσως μετά από κάθε χρήση.
- Για την καλύτερη χρήση, μπορείτε να προσθέσετε ορισμένα λιπαντικά υψηλής ποιότητας στα κινητά μέρη για λίπανση.
- Ελέγχετε τακτικά τη σύνδεση των στοιχείων της καρέκλας τουαλέτας προκειμένου να αποφεύγονται ατυχήματα λόγω χαλάρωσης και πτώσης.
- Ελέγχετε συχνά όλα τα μέρη της καρέκλας τουαλέτας για τυχόν ρωγμές καθώς και για άλλα ελαττώματα τα οποία μπορεί να επηρεάσουν τη χρήση της καρέκλας.
- Ελέγχετε συχνά τη σταθερότητα του πλαισίου του καθίσματος και του ίδιου του καθίσματος.
- Το προϊόν πρέπει να είναι σταθερά τοποθετημένο και να μην το κουνάτε με δύναμη ώστε να μην υποστεί ζημιά η κατασκευή. Η καρέκλα τουαλέτας με τροχούς ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιείται ως χειροκίνητο αναπηρικό καροτσάκι, προορίζεται αποκλειστικά για περιορισμένη μετακίνηση.
- Μη στέκεστε επάνω στην καρέκλα με αποσυναρμολογημένα τα πόδια, διότι το προϊόν μπορεί να πέσει.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Η συσκευασμένη καρέκλα τουαλέτας πρέπει να αποθηκεύεται σε ξηρό, καθαρό και καλά αεριζόμενο χώρο, χωρίς διαβρωτικά αέρια. Αποφύγετε την υγρασία, τον δυνατό φωτισμό και τις πηγές θερμότητας κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Οι περιορισμοί ως προς την απόρριψη του προϊόντος εξαρτώνται από το βαθμό μόλυνσης που προκλήθηκε κατά τη χρήση και υπόκεινται στην εθνική ή τοπική νομοθεσία.

Οποιοδήποτε σοβαρό ατύχημα στο οποίο εμπλέκεται το προϊόν που παρέχεται από την εταιρεία μας πρέπει να αναφέρεται στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου βρίσκεται η έδρα σας.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ:

Σύμβολο	Εννοια	Σύμβολο	Εννοια
	Ιατροτεχνολογικό προϊόν συμμορφούμενο με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/745		Ιατρική συσκευή
	Κατασκευαστής		Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα
	Ημερομηνία κατασκευής		Φυλάσσεται μακριά από το φως του ήλιου
	Αριθμός παρτίδας		Όχι στείρα
	Προειδοποίηση: Διαβάστε και ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες (προειδοποιήσεις) χρήσης		Κωδικός προϊόντος
	Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης		Φυλάσσεται σε δροσερό, ξηρό μέρος
	Εισαγωγή από		

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ GIMA

Ισχύει η βασική εγγύηση B2B της Gima διάρκειας 12 μηνών.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΟΝΟΜΑ
Καρέκλα Τουαλέτας
Μοντέλο: KDB-699
Χωρητικότητα βάρους: 125 Kg.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ:
Η Καρέκλα Τουαλέτας χρησιμοποιείται για τις ανάγκες των ατόμων που αντιμετωπίζουν κάποια ασθένεια, τραυματισμό ή αναπηρία και μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε στο σπίτι είτε στο νοσοκομείο.

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
Ο χειρισμός του προϊόντος μπορεί να γίνει από τον ίδιο τον χρήστη, από το νοσηλευτικό προσωπικό ή από τον φροντιστή.

ΟΜΑΔΑ ΑΣΘΕΝΩΝ
Άτομα με αναπηρία, ασθενείς και ηλικιωμένοι.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται όταν χρησιμοποιούν την Καρέκλα τουαλέτας.