



**KRO ⚠ Pozor!**  
*Sigurnosne napomene za skladištenje i rukovanje hemoglobinskim mikrokuvetama*

☞ Hemoglobinske mikrokuvete su predviđene isključivo za kvantitativno određivanje hemoglobina u kapilarnoj i venoznoj krvi i za korištenje sa sljedećim uređajima: Hemo\_Control, Hemo\_Control Manager, Hemo\_Vet, Hemo\_Vet Manager. Koristiti ih smije samo kvalificirano stručno osoblje.

📄 Za daljnje informacije obratiti pozornost na upute za uporabu konkretnog uređaja.

Kivete skladištiti isključivo u originalnoj ambalaži na temperaturi od 15°C do 30°C. Originalno neotvorene doze smiju se koristiti do otisnutog datuma roka trajanja. Nakon otvaranja doze kivete su stabilne 3 mjeseca pod navedenim uvjetima, ako se njima korektno rukuje.

Iz doze uvijek uzimati samo po jednu kivetu odjednom. Nakon uzimanja kivete dozu odmah brižljivo zatvoriti (**vidi sliku 1.**). Uvijek provjeriti da je poklopac doze s kivetama kompletno zatvoren sa svih strana (**vidi sliku 2.**).

Ako poklopac nije kompletno zatvoren (**vidi sliku 3.**), u dozu može prodrijeti vlaga i razoriti reagense u kiveti. Korištenje takvih kiveta može dovesti do pogrešnih rezultata. Nikada ne koristiti kivete iz doze koja nije bila korektno zatvorena!

