
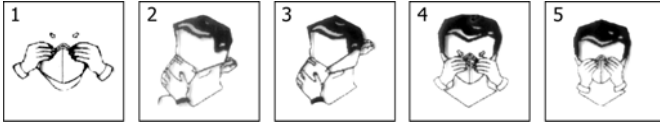


- I Semi-maschere filtranti monouso
GB Single-use filtering half-masks
D Partikelfiltrierenden Einweg-Halbmasken
F Demi-masques filtrants jetables
E Semimáscaras filtrantes desechables
P Semi-máscaras filtrantes de utilização única
TR Tek kullanımlık filtreli yarım yüz maskeleri
NL Halvegeelatsmasker met filter voor eenmalig gebruik
S Filterande halvmasker för engångsbruk
FIN Suodattavat kertakäyttöiset puolinaamarit
CZ Filtrační polomaska na jedno použití
PL Maski ochronne jednorazowego użycia
GR Ημιμάσκες διήθησης μιας χρήσης
HR Polu-maske s filtrom za jednokratno upotrebu

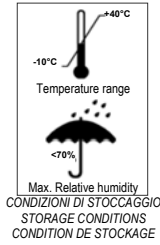

Croato/Hrvatski UPUTE ZA UPOTREBU

VAŽNO : Ovdje opisane polu-maske s filtrom za jednokratnu upotrebu klasificiraju se u 3 razrede - FFP1, FFP2 i FFP3. Prije upotrebe provjerite kojem razredu pripada maska prema propisu EN149:2001+A1:2009 i prikladnosti kontekstu korištenja – naznaka razreda nalazi se na škatulji i na polu-maski. Datum roka upotrebe proizvoda nalazi se na pakiranju.

PRIMJENE : Zaštita od prašine i od krutih i tekućih aerosola (na primjer uljne magle).



Prije upotrebe se preporuča provjeriti integritetu maske. Ako primijetite cijepanje i/ili mrlje zahtijevajte, da vama se promijeni.

Oznaka NR obilježavanja znači da maska nije upotrebljiva pa se mora baciti na kraju radne smjene.

Simbol D znači da su maske prošle test zadržavanja s dolomitiskim prahom.

Zaštitu koju pruža polu-maska s filtrom FFP3 ili FFP2 uključuje i onu koju pruža klasa FFP1.

UPUTE ZA PRILAGODAVANJE MASKE:

1. Umetnite prst u masku. Pognite nosni mostić oko prsta, kako bi dali oblik nosa.
2. Dok u rukama držite masku, navucite donji dio elastične trake na glavu iza zatiljka ispod ušiju.
3. Podignite gornji dio elastične trake i slavite ju na glavu, iznad ušiju.
4. Pomoću obe ruke, smjestite eventualno prisutan klip oko nosa i regulirajte napetost gornjeg i donjeg dijela elastične trake pomoću određene petlje, ako je prisutna, kako bi garantirali potpuno pranje na lice.
5. (a) Test kontrole o pravilnom smještaju maske bez ventilom: stavite ruke na masku, kao što se to nalazi prikazano na 5. figuri i energično udite. (b) Test kontrole o pravilnom smještaju maske s ventilom: stavite ruke na masku, kao što se to nalazi na 5. figuri i energično udite. Ako zrak izlazi iz rubova maske ili ako ulazi u masku preko rubova, ponovno smjestite polu-masku na lice i ako je potrebno pritisnite trak/petlju.
6. Odmah promijenite masku ako ste opazili, da teško dišete, ako je maska oštećena ili ako postoje problemi pranja na lice. Pažljivo pridržavanje ovih uputa je bitno za sigurnu upotrebu respiratora.

UPOZORENJE: [OZO – Osobna Zaštitna Oprema]

Ako ne možete dobiti dobru adheziju maske na profilu lica, ne smijete ulaziti u područje potencijalnog rizika!

Ne poštivanje propisa, koji se nalaze u toj napomeni, može dovesti do pogrešne upotrebe OZO i prouzrokovati bolesti i smrt!

Pravilno odabran respirator je esencijalan, kako bi zaštitili svoje zdravlje. Prije upotrebe OZO obratite se osobi koja je obučena u industrijskoj higijeni ili osobi koja ima iskustvo o sigurnosti, kako bi se uvrđila prikladnost i način korištenja.

Ovaj proizvod ne daje kisik. Koristite ga samo u dobro prozračenim prostorijama gdje je dovoljno kisika za održavanje života. Ograničenja u vezi kisika u određenom kontekstu za korištenje tih maski može se razlikovati od zemlje do zemlje, savjetujemo, da si pogledate definirane parametre u tim zemljama. Eleco s.r.l. ne preporučuje upotrebu opreme u ambijentima s koncentracijama kisika ispod 19,5%. / Ne upotrebljavajte osobnu zaštitnu opremu kada su koncentracije kontaminacije odmah opasne za zdravlje ili život. / Ne upotrebljavajte u području gdje je opasno do dode do eksplozije / Odmah napustite radno mjesto ako (a) disanje postaje teško, ili (b) ako imate osjećaj tjeskobe ili vrtoglavice. / Dlakava brada ili oboljenja organa za disanje mogu smanjiti efikasnost polu-maske s filtrom. / Ne mijenjajte ili modificirati na nikakav način polu-masku s filtrom. / Jednokratna upotreba. Ne zahtjeva održavanje. / Polu- masku s filtrom bacite nakon upotrebe. / Čuvajte još nekorisćene polu-maske u njihovim neoštećenim škatuljama daleko od sunčeve svjetlosti. – Identifikacijska koda nalazi se na pakiranju proizvoda.