


- I Semi-maschere filtranti monouso
- GB Single-use filtering half-masks
- D Partikelfiltrierenden Einweg-Halbmasken
- F Demi-masques filtrants jetables
- E Semimáscaras filtrantes desechables
- P Semi-máscaras filtrantes de utilização única
- TR Tek kullanımlık filtreli yarım yüz maskeleri
- NL Halvegeelasmasker met filter voor eenmalig gebruik
- S Filterande halvmasker för engångsbruk
- FIN Suodattavat kertakäyttöiset puolinaamarit
- CZ Filtrační polomaska na jedno použití
- PL Maski ochronne jednorazowego użyciu
- GR Ημιμάσκες διήθησης μιας χρήσης
- HR Polu-maske s filtrom za jednokratno upotrebu

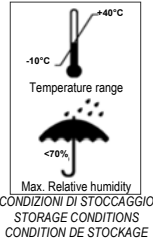

Croato/Hrvatski UPUTE ZA UPOTREBU

VAŽNO : Ovdje opisane polu-maske s filtrom za jednokratnu upotrebu klasificiraju se u 3 razrede - FFP1, FFP2 i FFP3. Prije upotrebe provjerite kojem razredu pripada maska prema propisu EN149:2001+A1:2009 i prikladnosti kontekstu korištenja – naznaka razreda nalazi se na škatulji i na polu-maski. Datum roka upotrebe proizvoda nalazi se na pakiranju.

PRIMJENE : Zaštita od prašine i od krutih i tekućih aerosola (na primjer uljne magle).



Prije upotrebe se preporuča provjeriti integritetu maske. Ako primijetite cijepanje ili mrlje zahtijevajte, da vama se promjeni.

Oznaka NR obilježavanja znači da maska nije upotrebljiva pa se mora baciti na kraju radne smjene.

Simbol D znači da su maske prošle test začepjenja s dolomitskim prahom.

Zaštitu koju pruža polu-maska s filtrom FFP3 ili FFP2 uključuje i onu koju pruža klasa FFP1.

UPUTE ZA PRILAGODAVANJE MASKE:

1. Umećnite prst u masku. Pognite nosni mostić okolo prsta, kako bi dali oblik nosa.
2. Dok u rukama držite masku, navucite donji dio elastične trake na glavu iza zatiljka ispod ušiju.
3. Podignite gornji dio elastične trake i stavite ju na glavu, iznad ušiju.
4. Pomoću obe ruke, smjestite eventualno prisutan klip okolo nosa i regulirajte napetost gornjeg i donjeg dijela elastične trake pomoću određene petlje, ako je prisutna, kako bi garantirali potpuno prijanjanje na lice.
5. (a) Test kontrole o pravilnom smještaju maske bez ventila: stavite ruke na masku, kao što se to nalazi prikazano na 5. figuri i energično udišite. (b) Test kontrole o pravilnom smještaju maske s ventilom: stavite ruke na masku, kao što se to nalazi na 5. figuri i energično udišite. Ako zrak izlazi iz rubova maske ili ako ulazi u masku preko rubova, ponovno smjestite polu-masku na lice i ako je potrebno pritegnite trak/petlju.
6. Odmah promijenite masku ako ste opazili, da teško dišete, ako je maska oštećena ili ako postoje problemi prijanjanja na lice. Pažljivo pridržavanje ovih uputa je bitno za sigurnu upotrebu respiratora.

UPOZORENJE: [OZO – Osobna Zaštitna Oprema]

Ako ne možete dobiti dobru adheziju maske na profil lica, ne smijete ulaziti u područje potencijalnog rizika!

Ne poštivanje propisa, koji se nalaze u toj napomeni, može dovesti do pogrešne upotrebe OZO i prouzrokovati bolest i smrt!

Pravilno odabran respirator je esencijalan, kako bi zaštitili svoje zdravlje. Prije upotrebe OZO obratite se osobi koja je obučena u industrijskoj higijeni ili osoblju koje ima iskustvo o sigurnosti, kako bi se utvrdila prikladnost i način korištenja. /

Ovaj proizvod ne daje kisik. Koristite ga samo u dobro prozračenim prostorijama gdje je dovoljno kisika za održavanje života. Ograničenja u vezi kisika u određenom kontekstu za korištenje tih maski može se razlikovati od zemlje do zemlje, savjetujemo, da si pogledate definirane parametre u tim zemljama. Eleco s.r.l. ne preporučuje upotrebu opreme u ambijentima s koncentracijama kisika ispod 19,5%. / Ne upotrebljavajte osobnu zaštitnu opremu kada su koncentracije kontaminacije odmah opasne za zdravlje ili život. / Ne upotrebljavajte u području gdje je opasno do dođe do eksplozije / Odmah napustite radno mjesto ako (a) disanje postaje teško, ili (b) ako imate osjećaj tjeskobe ili vrtoglavice. / Dlake brade ili oboljela organa za disanje mogu smanjiti efikasnost polu-maske s filtrom. / Ne mijenjajte ili modificirajte na nikakav način polu-masku s filtrom. / Jednokratna upotreba. Ne zahtijeva održavanje. / Polu-masku s filtrom bacite nakon upotrebe. / Čuvajte još nekorištene polu-maske u njihovim neoštećenim škatuljama daleko od sunčeve svjetlosti. – Identifikacijska koda nalazi se na pakiranju proizvoda.