

UPUTE ZA KORIŠTENJE

MODEL F7915

Ploče za pacijenta s jednom vodljivom stranom.

MODEL F7930

Ploče za pacijenta s odvojenim REM tipom vodljivog dijela.

Proizvod NIJE sterilan

UPOZORENJA

- Nakon kontrole pakiranja na oštećenje, provjerite ploče i gel. Nemojte koristiti proizvod u slučaju oštećenja ili vidljivih defekata. Vratite robu dobavljaču.
- Odaberite dobro prokrvljeno područje kože blizu područja za operaciju: ne stavljati elektrodu ispod ožiljaka ili blizu metalnih proteza ili u blizini EKG elektroda
- Obrijte, odmastiti i osušite odabrano područje kože
- Pobrinite se da je cijela površina ploče u kontaktu sa pacijentovom kožom.
- Spojite ploču na generator korištenjem spojnog kabela.
- Za spajanje i ispravno funkcioniranje, slijedite upute za korištenje koje je isporučio proizvođač elektrokirurške jedinice ili držača koji koristite.
- Visoko frekventni elektrokirurški generatori, držači i pribor koji se koriste s ovim proizvodom, trebaju biti sukladni regulativom na snazi.
- Uređaje smije spojiti i pustiti u pogon isključivo kvalificirano osoblje.

Napomena: Struja nikada ne smije teći u poprečnom smjeru preko tijela, niti smije prolaziti kroz grudni koš.

- Nikada nemojte pacijenta s pacemakerom podvrgavati elektrokirurškoj struji prije nego što se konzultirate s kardiologom.
- Za REM tip: Provjerite radi li sustav alarma generatora prije pokretanja procedure.

PRIPREME, SPAJANJE I KORIŠTENJE

- Spojite neutralnu ploču an pacijenta na dobro prokrvljenom mišićavom području blizu područja operacije, ali na udaljenosti od barem 20 cm.
- Premažite elektroprovodni gel preko cijele veodljive površine neutralne elektrode.
- Ne primjenjujte elektrodu na području rana ili ožiljaka, blizu metalnih proteza ili u blizini EKG elektroda, ili u području mogućeg izlivanja tekućine.

Napomena: Prolazak struje kroz tijelo pacijenta treba biti što je kraći moguć, i treba teći dijagonalno. Struja nikada ne smije teći poprečno u odnosu na smjer tijela, niti smije prelaziti preko prsnog koša. Pacijent se mora nalaziti na suhoj i električno izoliranoj podlozi. Pacijent mora biti izoliran od vodljivih dijelova, a operacijski stol mora biti prikladno uzemljen. Koristite suhu gazu kako biste izbjegli da područja kože dođu u dodir jedna s drugom.

Spojite ploču na visokofrekventni generator korištenjem spojnog kabela. Tek tada spojite držač, i ako postoji, nožni prekidač generatora.

ZA REM TIP

Spojite ploču na elektrokiruršku jedinicu razvijenu sa sustavom za provjeru kontinuiteta povratnog kruga visokofrekventne struje. Provjerite radi li alarmni sustav prije pokretanja postupka.

Tijekom postupka, uvijek odaberite najnižu moguću razinu energije. Ako je koagulacijski kapacitet elektrode manji od potrebnog, ne povećavajte visokofrekventni izlaz bez da prethodno obavite slijedeće provjere:

Je li neutralna elektroda ispravno postavljena.

Jesu li kabeli ispravno spojeni na svoje konektore.

Ispravna aktivacija pokretačkih tipki (ručni ili nožni prekidač).

Da nema oštećenja na izolaciji kabela.

Da elektroda nije prljava.

Ako se pacijenta repositionira, provjerite kontakt ploče s pacijentovom kožom kako i spojeve s kabelima.

ČIŠĆENJE

Odmah nakon korištenja operite pod tekućom vodom, zatim potopite na 45 minuta u 2% otopinu uobičajenog dezinficijensa. Elektrode se mogu koristiti samo ako se ispravno koriste, stoga molimo dobro pregledajte proizvod prije ponovnog korištenja. U slučaju vidljivih oštećenja zamijenite elektrodu.

MOGUĆI UZROCI OPEKLINA

Opeklinae mogu nastati uslijed visoke gustoće struje u pacijentovom tkivu, ili grijanjem tekućina ili zapaljivih plinova; uzroci mogu biti slijedeći:

- Ploča nije dobro pozicionirana ili ju se mora ponovno postaviti na ispravno mjesto.
- Pacijent se slučajno našao u položaju kontakta s električkim vodljivim dijelovima.
- Postoji direktni kontakt između kabela i pacijentove kože što je izazvalo kapacitivni učinak.
- Izgaranje zapaljivih dezinficijensa.
- Izgaranje zapaljivih narkotičkih tvari.

KONTRAINDIKACIJE

Proizvod se ne smije koristiti::

- Ako postoji vidljivo oštećenje ploče ili spojnog kabela.
- Ako kontakt između ploče i kože nije dobar.
- Ako pacijent nosi pacemaker, osim ako postupak prethodno nije dopustio kardiolog.

SKLADIŠTENJE

Proizvod se mora čuvati u originalnoj ambalaži u prostorijama sa prostornim uvjetima, temperaturom i relativnom vlagom navedenima na etiketi ambalaže. Polaganje tereta na pakiranje može oštetiti proizvod.

OPĆE NAPOMENE

Ako se prilikom upotrebe ovog uređaja ili uslijed njegove upotrebe dogodi ozbiljan incident, prijavite ga proizvođaču i nadležnom državnom tijelu. Za bilo koji kvar ili kvar na uređaju obavijestite proizvođačku službu za kvalitetu.

ODLAGANJE OTPADA

Otpaci koji proizlaze iz zdravstvenih struktura moraju se zbrinuti sukladno propisima na snazi.

	IT	EN	FR	RU	ES	HR	CS
	Conforme alla vigente normativa Europea sui Dispositivi Medici	Compliant with current European legislation on Medical Devices	Conforme à la législation européenne en vigueur sur les dispositifs médicaux	Соответствует действующему европейскому законодательству о медицинских устройствах	Cumple con la legislación europea vigente sobre dispositivos médicos	U skladu s važećim europskim zakonodavstvom o medicinskim proizvodima	Vyhovuje současné evropské legislativě o zdravotnických prostředcích
	Dispositivo medico	Medical Device	Dispositif médical	Медицинское устройство	Producto sanitario	Medicinski proizvod	Zdravotnický prostředek
	Identificativo unico del dispositivo	Unique Device Identifier	Identifiant unique des dispositifs	Уникальный идентификатор устройства	Identificador único del producto	Jedinstvena identifikacija proizvoda	Jedinečným identifikátorem prostředku
	Attenzione, consultare la documentazione e allegata	Caution, consult accompanying documents	Attention, lire attentivement les instructions	Внимание, обратитесь к сопроводительной документации	Atención, leer atentamente las instrucciones	Pozor, pročitajte popratnu dokumentaciju	Varování, čtěte průvodní dokumentaci
	Consultare le istruzioni d'uso	Consult instructions for use	Instructions d'utilisation	Обратитесь к инструкции по применению	Consulte las instrucciones de uso	Pročitajte upute za upotrebu	Varování, čtěte průvodní dokumentaci
	Fabbricante	Manufacturer	Fabricant	Производитель	Fabricante	Proizvođač	Výrobce
	Numero di catalogo	Catalogue number	Code de référence	Каталожный номер	Número de Catálogo	Kataloški broj	Katalogové číslo
	Numero di lotto	Batch code	Numéro de lot	Код партии	Número de Lote	Mnogo	Číslo šarže
	Data di produzione	Date of manufacture	Date de production	Дата изготовления	Fecha de Producción	Datum proizvodnje	Datum výroby
	Scadenza	Use by	Date de péremption	Использовать до	Fecha de Caducidad	Iskoristiti do	Spotřebujte do
	Limiti di temperatura	Temperature limitation	Limites de température	Температурные ограничения	Límites de Temperatura	Temperaturni raspon	Omezení teploty
	Limiti di umidità	Humidity limitation	Limites d'humidité	Ограничения по влажности	Límites de Humedad	Raspon vlažnosti zraka	Omezení vlhkosti
	Numero di pezzi	Quantity of pieces	Nombre de pièces	Количество штук	Cantidad de piezas	Količina ili komada	Počet kusů