



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

INDIKACIJE

Kirurški kožni marker Tondaus namijenjen je za označavanje na ljudskoj koži za identifikaciju položaja u običnoj kirurgiji, enterokirurgiji, ortopediji, neurohormonskoj kirurgiji, kardiovaskularnoj kirurgiji i radioterapiji.

KONTRAINDIKACIJE

Ne nanositi na oštećenu sluznicu i kožu ili ako postoje rane.

OPREZ I UPOZORENJE

- 1). Treba razmotriti mogućnost alergijskih reakcija na Gentian violet/Allura Red AC/Indigo/Titanium dioxide (odgovara različitim bojama). Tijekom uporabe, ako se ustanovi da se pacijent ne osjeća dobro, odmah ga prestanite koristiti i pravilno ga koristite.
- 2). Ovaj se proizvod može koristiti samo jednom kod jednog pacijenta kako bi se izbjegla unakrsna infekcija.
- 3). Ovaj proizvod treba koristiti na suhoj koži. Ako je pacijentova koža mokra ili znojna, osušite kožu i držite je. Suho i svježe, zatim slijedite gornje upute.
- 4). Prilikom korištenja obratite pozornost na zaštitu vrha olovke. Kada nije u upotrebi, pokrijte poklopac olovke kako biste spriječili sušenje tinte.
- 5). Pakiranje treba upotrijebiti odmah nakon otvaranja. Nemojte koristiti ako je pakiranje oštećeno ili zamrznuto. Nakon upotrebe proizvod treba zbrinuti kao medicinski otpad.
- 6). Nemojte namakati ili brisati proizvod organskim otapalom. Organska otapala mogu oštetiti proizvod.
- 7). Uporabu vrše obučeni medicinski stručnjaci.
- 8). Nakon upotrebe odložiti kao medicinski otpad.

UPUTE ZA UPORABU

- 1). Prije uporabe provjerite cjelovitost unutarnjeg pakiranja. Nemojte koristiti ako se unutarnje pakiranje razbije.
- 2). Kožu najprije dezinficirajte i osušite (napomena: obavezno nanosite na suhu kožu);
- 3). Koristite marker za kožu kako biste označili kožu;
- 4). Za uklanjanje traga koristite 75 % alkohol za brisanje.

UVJETI SKLADIŠTENJA I TRANSPORTA

- 1). Ovaj proizvod treba čuvati na hladnom, prozračenom, suhom mjestu, izbjegavajući kontakt s vodom, izravnom sunčevom svjetlošću, ekstremnim temperaturama ili vlagom te spriječiti kontakt s korozivnim plinovima. Temperatura: $\leq 40^{\circ}\text{C}$, vlažnost: $\leq 90\%$, obratite pozornost na zaštitu od štakora, kontrolu štetočina, kako biste spriječili oštećenje pakiranja.
- 2). Jednokratna uporaba medicinskih kožnih markera dopušta korištenje općih prijevoznih sredstava, ali mora spriječiti jake udare, vibracije te kišu i snijeg tijekom prijevoza.

GIMA UVJETI JAMSTVA

Primjenjuje se Gima 12-mjesečno standardno B2B jamstvo

	IT - Data di fabbricazione GB - Date of manufacture FR - Date de fabrication ES - Fecha de fabricación PT - Data de fabrico DE - Herstellungsdatum GR - Ημερομηνία παραγωγής DK - Fabrikationsdato FI - Valmistuspäivämäärä NL - Productiedatum PL - Data produkcji CZ - Datum výroby BG - Дата на производство EE - Valmistamise kuupäev HR - Datum proizvodnje HU - Gyártás dátuma LT - Pagaminimo data LV - Izgatavošanas datums NO - Fabrikasjonsdato RO - Data fabricației SK - Datum výroby SL - Datum proizvodnje SV - Tillverkningsdatum AR - تاريخ التصنيع
	IT - Fabbricante GB - Manufacturer FR - Fabricant ES - Fabricante PT - Fabricante DE - Hersteller GR - Παραγωγός DK - Fabrikant FI - Valmistaja NL - Fabrikant PL - Producent CZ - Výrobce BG - Производител EE - Tootja HR - Proizvajalec HU - Gyártó LT - Gamintojas LV - Ražotājs NO - Produsent RO - Producător SK - Výrobca SL - Proizvajalec SV - Tillverkare AR - مصنع
	IT - Data di scadenza GB - Expiration date FR - Date d'échéance ES - Fecha de caducidad PT - Data de validade DE - Ablaufdatum GR - Ημερομηνία λήξεως DK - Udløbsdato FI - Viimeinen voimassaolopäivä NL - Vervaldatum PL - Data ważności CZ - Datum ukončení platnosti BG - Срок на годност EE - Aegumiskuu päev HR - Rok uporabnosti HU - Lejárati dátum LT - Galiojimo laikas LV - Derīguma termiņš NO - Utløpsdato RO - Valabil până la data de SK - Dátum expirácie SL - Rok uporabnosti SV - Utgångsdatum AR - تاريخ الصلاحية
REF	IT - Codice prodotto GB - Product code FR - Code produit ES - Código producto PT - Código produto DE - Erzeugniscode GR - Κωδικός προϊόντος DK - Produktkode FI - Tuotekoodi NL - Productcode PL - Numer katalogowy CZ - Kód výrobku BG - Код на продукт EE - Toote kood HR - Koda izdelka HU - Termékkód LT - Prekės kodas LV - Produkta kods NO - Produktkode RO - Cod produs SK - Kód výrobku SL - Koda izdelka SV - Produktkod AR - كود المنتج



0123



MD

STERILE R



GIMA 33183

GIMA 33184



Dogguan Tondaus Meditech Co., Ltd.
3rd Floor, No.27 Rd. Guantai, Chiling
Community, Houjie Town,
Dogguan, Guangdong, China.
Made in China

REF

TR03
TD01

EC

REF

MedPath GmbH
Mies-van-der-Rohe-Strasse 8
80807 Munich, Germany



Gima S.p.A

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) - Italy
export@gimaitaly.com - gima@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

RI,
EE