

HR - JEDNOKRETNIH NASTAVKA ZA USTA: UPUTE ZA UPORABU

NAMJENA: jednokratni nastavci za usta namijenjeni su za korištenje zajedno s opremom za testiranje plućne funkcije i omogućuju pacijentu obavljanje pregleda bez izravnog kontakta s opremom.

Pacijent osobno rukuje nastavkom za usta umetanjem u opremu. Nastavke za usta treba nanositi samo na netaknutu, čistu i zdravu kožu.

IDENTIFIKACIJA PROIZVODA: identifikacijski podaci (referenca, serija i datum proizvodnje) nalaze se na naljepnici pričvršćenoj na kutiju.

UPOTREBA:

- Uvijek slijedite upute spirometra.
- Umetnite nastavak za usta u senzor uređaja (turbinu ili pneumotakometar) bez prisiljavanja. Nikada ponovno ne koristite nastavak za usta kako biste izbjegli izlaganje pacijenta unakrsnoj kontaminaciji.
- Ne otvarati prije upotrebe.
- Ne koristiti ako je pakiranje oštećeno.
- Uređaj nije prikladan za upotrebu u neonatalnoj pedijatriji.
- Čuvati na hladnom i suhom mjestu.

ODLAGANJE I SIGURNOST: nakon upotrebe, proizvod se mora odložiti u normalne spremnike neotrovnog krutog otpada ili u opći bolnički otpad.




KONTRAINDIKACIJE: na temelju iskustva i rezultata različitih analiza, nema štetnih učinaka kao rezultat pravilne uporabe proizvoda.

ČUVANJE: čuvati na hladnom i suhom mjestu.

UPOZORENJE:

- Pakiranje u individualnoj toplinski zatvorenoj omotnici (single-wrap) jamči odsutnost bakterija, što se redovito kontrolira prema sustavu kvalitete proizvođača. Ako se medicinski proizvod ponovno koristi, postoji rizik od unakrsne infekcije za pacijenta koji ga ponovno koristi.
- Ako se uređaj ponovno koristi, postoji rizik od unakrsne infekcije za pacijenta koji ga ponovno koristi.

Manuale d'uso LUMED Rev. 4.0 01/09/2023

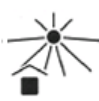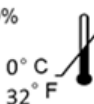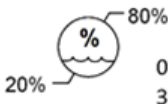

LUMED Srl
Via Staffora 18/9
20073 Opera ITALIA
www.lumed.com
tel +39 (0)2 57606750