

HR - JEDNOKRATNI VIRUSNI I BAKTERIJSKI FILTER – UPUTE

NAMJENA: Osmišljen da zaštiti pacijenta od infekcija i zaraze iz okoliša, nudi visok stupanj zaštite protiv bakterija i virusa uz nisku razinu otpora za osiguravanje točnosti dijagnostičkih rezultata. Filter bi se trebao upotrebljavati na nedirnutoj, čistoj i zdravoj koži.

OZNAKE PROIZVODA: Identifikacijske oznake (šifra, šarža i datum proizvodnje) se nalaze na oznaci na kutiji.

UPOTREBA:

- Izvadi filter i provjeri da li su uređaj i filtrirajući materijal netaknuti, tj. u ispravnom stanju.
- U suprotnom odbaci filter i nastavi sa novim filterom.
- Umetni filter u senzor-osjetilo uređaja bez mehaničke sile – guranja prateći upute proizvođača.
- Koristi usnik na slobodnoj strani.

Nikada ne upotrebljavaj filter i usnik na drugom pacijentu kako bi se izbjela kontaminacija.

- Ovaj uređaj nije moguće sterilizirati.

- Upotrebljavati samo s medicinskim osobljem. Ovaj uređaj nije za neonatalnu upotrebu.

ODLAGANJE I SIGURNOST: Nakon korištenja, proizvod se odlaže u kante za netoksični otpad ili u opći otpad bolnice.

KONTRAINDIKACIJE: Po iskustvu i rezultatima dosadašnjih analiza, nema nepovoljnih uticaja koji bi nastali kao rezultat neispravne upotrebe proizvoda.

UPOZORENJE: Pakiranje u zasebnim, toplinski zatvorenim omotima (jedinična pakiranja) koje garantira nepostojanje bakterija, što se redovito kontrolira sukladno sustavu kontrole kvalitete proizvođača..

FT02_All.2.1 - Manuale d'uso LUMED Rev. 2.0 01/09/2023



LUMED Srl
Via Staffora 18/9
20073 Opera ITALIA
www.lumed.com
tel +39 (0)2 57606750