

#### HR - JEDNOKRATNI VIRUSNI I BAKTERIJSKI FILTER – UPUTE

**NAMJENA:** Osmišljen da zaštiti pacijenta od infekcija i zaraze iz okoliša, nudi visok stupanj zaštite protiv bakterija i virusa uz nisku razinu otpora za osiguravanje točnosti dijagnostičkih rezultata. Filter bi se trebao upotrebljavati na nedirnutoj, čistoj i zdravoj koži.

**OZNAKE PROIZVODA:** Identifikacijske oznake ( šifra, šarža i datum proizvodnje ) se nalaze na oznaci na kutiji.

**UPOTREBA:**

- Izvadi filter i provjeri da li su uređaj i filtrirajući materijal netaknuti, tj. u ispravnom stanju.
- U suprotnom odbaci filter i nastavi sa novim filterom.
- Umetni filter u senzor-osjetilo uređaja bez mehaničke sile – guranja prateći upute proizvođača.
- Koristi usnik na slobodnoj strani.
- Nikada ne upotrebljavaj filter i usnik na drugom pacijentu kako bi se izbjela kontaminacija.
- Ovaj uređaj nije moguće sterilizirati.
- Upotrebljavati samo s medicinskim osobljem. Ovaj uređaj nije za neonatalnu upotrebu.

**ODLAGANJE I SIGURNOST:** Nakon korištenja, proizvod se odlaze u kante za netoksični otpad ili u opći otpad bolnice.

**KONTRAINDIKACIJE:** Po iskustvu i rezultatima dosadašnjih analiza, nema nepovoljnih uticaja koji bi nastali kao rezultat neispravne upotrebe proizvoda.

**UPOZORENJE:** Pakiranje u zasebnim, toplinski zatvorenim omotima ( jedinična pakiranja ) koje garantira nepostojanje bakterija, što se redovito kontrolira sukladno sustavu kontrole kvalitete proizvođača..

Manuale d'uso LUMED Rev. 2.0 01/09/2023



**LUMED Srl**  
Via Staffora 18/9  
20073 Opera ITALIA  
www.lumed.com  
tel +39 (0)2 57606750