


COPERTA ISOTERMICA

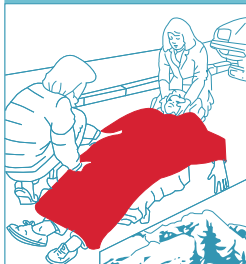

COUVERTURE DE SURVIE



RESCUE BLANKET

RETTUNGSDECKE MANTA DE RESCATE

2100 x 1600 mm.

Film di poliestere metallizzato

Metallized polyester film

Film polyester métallisé

Metallisierte Polyesterfolie

Film de poliester metalizado

Filme de poliéster metalizado

Folie de poliester metalizată

Metalliserad polyesterfilm

Metallisoitu polyesterikalvo

Fémbevonatú poliszter fólia

Metalizirana poliesterska folija

Επιμεταλλωμένη μεμβράνη πολυεστέρα

طبقة من البوليستر المعدن

REF 34085

LOT 000053



02-2025



03-2030

UDI



(01)08023279340853
(10)000053
(11)250200
(17)300300



Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com - Made in China



GIMA

www.gimaitaly.com



8 023279 340853 >

Rev. 3-04.25

MANTA ISOTÉRMICA - PĂTURĂ IZOTERMĂ
ISOTERMISKT TÄCKE - LÄMPÖPEITTO
IZOTERMİKUS TAKARÓ - IZOTERMNI POKRIVAČ
ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ ΚΟΥΒΕΡΤΑ - بطانية متساوية الحرارة

HR - PRIMJENE. Reflektirajuća svojstva materijala omogućuju zaštitu tijela od sunčevih zraka i izbjegavanje disperzije topline iz tijela. **PREPORUČA** se koristiti u slučaju **NEZGODA, VJETRA, KIŠE, SUNČANIH MJESTA. UPUTE ZA UPOTREBU.** Labavo raširite pokrivač preko tijela. Vanjska zlatna strana za zadržavanje topline; vanjska srebrna strana za reflektiranje sunčevih zraka.

 **UPOZORENJA** • Ne smiju se koristiti vlažni ili pljesnivi proizvodi. • Samo za jednokratnu upotrebu, ponovna uporaba nije dopuštena. • Ne čuvajte na ekstremnim temperaturama. • Odložite na siguran način nakon upotrebe kako biste izbjegli rizik od infekcije. • Prijavite svaki ozbiljan incident u vezi s uređajem proizvođaču i nadležnom tijelu države članice u kojoj korisnik i/ili pacijent ima sjedište. **SKLADIŠTENJE I TRANSPORT** • Uređaj se mora skladištiti na relativnoj vlažnosti manjoj od 80%, prostor za skladištenje mora biti održavan bez korozivnih plinova, suhim, izbjegavajući sunčevu svjetlost, dobro prozračenim uvjetima i čistim. • Uređaj treba paziti tijekom transporta i rukovanja.