



HR**NOSNA KANILA ZA OKSIGENSKU TERAPIJU
UPUTE ZA UPOTREBU**

INDIKACIJE

Terapeutska primjena kisika kroz nos.

Proizvod za jednokratnu upotrebu (za jednog pacijenta), koji se koristi neprekidno u razdoblju ne dužem od 30 dana.

Izvor kisika mora biti u skladu s važećim propisima.

Proizvode mora upotrebljavati kvalificirano zdravstveno osoblje.

UPUTE

Pažljivo stavite nosni nastavak u svaku od nosnica i postupite kako je opisano u nastavku za svaki model nosne kanile.

Držite nosni nastavak na mjestu i provucite desnu i lijevu cijev preko držača za uši prema dolje, i to preko čeljusti pa do ispod brade.

Prilagodite cijev s pomoću plastičnog prstena.

Priključite kraj priključnih cijevi na izvor kisika. Nakon što pravilno postavite uređaj, počnite s isporukom kisika i po potrebi prilagodite protok.

KONTRAINDIKACIJE

Nisu opisane nikakve kontraindikacije.

UPOZORENJA:

Ako se proizvod ponovno upotrebljava unatoč ovim uputama, to može dovesti do sljedećeg:

1. promjene u materijalima
2. nečistog proizvoda i mogućih bioloških ostataka koji mogu izazvati unakrsnu zarazu
3. gubitka početnih funkcionalnih svojstava proizvoda.

Prije spajanja na izvor kisika provjerite je li proizvod ispravan. Ako slučajno prignječite priključne cijevi, pravilan protok kisika bit će onemogućen, a moguće je i odvajanje priključka. Stoga se preporučuje da korisnici pažljivo postupaju s proizvodom. S istom je pažnjom potrebno postupati i u slučaju modela koji se isporučuju s cijevima osiguranog protoka kod kojih je rizik od odvajanja manji, no svejedno postoji.

Ovaj proizvod sadržava ftalate (DEHP). Iako nisu potvrđeni nikakvi rizici za ljudsko zdravlje, prije upotrebe proizvoda na trudnicama/dojiljama ili djeci potrebno je posavjetovati se s liječnikom.

Upotreba nosnih kanila može biti povezana s epistaksom u osoba sklonih krvarenju i/ili osoba koje uzimaju antikoagulantnu terapiju.

Koncentrirani kisik može zapaliti zapaljive materijale. Kako biste izbjegli rizik od požara ili eksplozije, držite proizvod podalje od mogućih izvora zapaljenja i pridržavajte se mjera opreza za upotrebu opreme koja se upotrebljava za isporuku kisika.

SKLADIŠTENJE

Proizvod se mora čuvati u originalnom pakiranju u prostorijama sa okolišnim uvjetima (temperaturom i relativnom vlagom) navedenima na etiketi ambalaže. Polaganje tereta na pakiranje može oštetiti proizvod.

OPĆE NAPOMENE

Ako, tijekom korištenja ovog uređaja ili kako rezultat njegovog korištenja, nastane ozbiljan incident, molimo javite to proizvođaču i vašim nacionalnim nadležnima. Za bilo kakav kvar ili defekt na proizvodu, molimo obavijestiti službu kontrole kvalitete proizvođača. (Manufacturer's Quality Service).

ODLAGANJE OTPADA

Otpaci koji proizlaze iz zdravstvenih ustanova moraju se zbrinuti sukladno propisima na snazi.

СИМВОЛИ - VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ - ZNAČENJE SIMBOLA - JELMAGYARÁZAT - SIMBOLIŲ LEGENDA - SIMBOLU APZĪMĒJUMI - LEGENDĂ DE SIMBOLURI

	BG	CS	HR	HU	LT	LV	RO	SR
	Съответства на действащото европейско законодателство относно медицинските изделия	Vyhovuje současně evropské legislativě o zdravotnických prostředcích	U skladu s važečím evropskim zakonodavstvom o medicinskim proizvodima	Megfelel az orvosi eszközökre vonatkozó jelenlegi európai jogszabályoknak	Atitinka galiojančius Europos teisės aktus dėl medicinos priemonių	Atbilst pašreizējiem Eiropas tiesību aktiem par medicīnas ierīcēm	Conform cu legislația europeană în vigoare privind dispozitivele medicale	Usaglašeno sa tekućim evropskim propisima o medicinskim sredstvima
	Медицинско изделие	Zdravotnický prostředek	Medicinski proizvod	Orvosteknikai eszköz	Medicinos priemonė	Medicīniska ierīce	Aparat medical	Medicinsko sredstvo
	Уникален идентификатор на изделията	Jedinečným identifikátorem prostředku	Jedinstvena identifikacija proizvoda	Egyedi eszközazonosító	Unikalasis priemonės identifikatorius	Ierīces unikālais identifikators	Identificator unic al unui dispozitiv	Jedinstveni identifikator uređaja
	Направете справка с инструкциите за употреба	Čtěte uživatelskou příručku	Proučite upute prije korištenja	Consult használati utasítás	Žr. naudojimo instrukcijas	Skatīt lietošanas instrukciju	Consultați instrucțiunile de utilizare	Konsultujte instrukcije za upotrebu
	Производител	Výrobce	Proizvođač	Gyártó	Gamintojas	Ražotājs	Producător	Proizvođač
	Дистрибутор	Distributor	Distributer	Forgalmazó	Platintojas	Izplatītājs	Distribuito	Distributer
	Каталожен номер	Katalogové číslo	Kataloški broj	Katalógus száma	Katalogo numeris	Kataloga numurs	Număr de catalog	Kataloški broj
	Партиден номер	Číslo šarže	LOT	Batch kód	Partijos kodas	Partijas kods	Cod de Lot	Serijski broj
	Дата на производство	Datum výroby	Datum proizvodnje	Gyártás dátuma	Pagaminimo data	Ražošanas datums	Data de fabricație	Datum proizvodnje
	Използвай при	Spotřebujte do	Használata által	Használata által	Tinka iki	Izmantošanai	Data limită de utilizare	Rok upotrebe
	Температурни ограничения	Omezení teploty	Temperaturni raspon	Hőmérséklet korlátozás	Temperatūros apribojimas	Temperatūras ierobežojums	Limite de temperatură	Ograničenje temperature
	Ограничения на влажността	Omezení vlhkosti	Raspon vlažnosti zraka	Páratartalom korlátozás	Drėgnio apribojimas	Mitruma ierobežojumi	Limite de umiditate	Ograničenje vlažnosti vazduha
	Пазете от пряка слънчева светлина	Nevystavujte slunečnému záření	Štititi od direktnog sunčevog svjetla	Tartsa távol a napfénytől	Saugoti nuo saulės spindulių	Nepakļaut produkta atrašanās tiešā saules gaismā	A se feri de razele soarelui	Držati dalje od sunčeve svetlosti
	Mennyisége darabok	Počet kusů	Količina komada	Mennyisége darabok	Dalių kiekis	Vienumu daudzums	Număr de bucăți	Količina komada
	Не съдържа естествен гумен латекс	Neobsahuje přírodní latex	Ne sadrži prirodnu gumu i lateks	Nem tartalmaz természetes gumi latex	Sudėtyje nėra latekso	Nesatur dabīgās gumijas lateksu	Nu conține cauciuc natural (latex)	Ne sadrži prirodnu gumu lateks
	Не се допуска повторна употреба	Nepoužívat opakovaně	Nemojte ponovno koristiti	Ne használja újra	Pakartotinai nenaudoti	Nelietot atkārtoti	A nu se reutiliza	Zabranjena ponovna upotreba
	Съдържа фталати	obsahuje ftaláty	Sadrži ftalate	Tartalmazza ftalátok	Sudėtyje yra ftalatų	Satur ftalātus	Conține ftalați	Sadrži ftalate