

Deterdžent za dezinfekciju neinvazivnih medicinskih proizvoda na bazi alkohola
Spremno za uporabu

UPOZORENJE**Svojstva**

GERMOCID BASIC je vodeno-alkoholna otopina spremna za uporabu, na bazi klorheksidin diglukonata i kvarternih amonijevih soli, širokog spektra djelovanja za brzu i učinkovitu dezinfekciju neinvazivnih površina i proizvoda, velikih ili teško dostupnih površina biomedicinske opreme i jedinica u stomatološkoj ordinaciji (maske za lice, potporne površine, rukonasloni, nasloni za glavu itd.). GERMOCID BASIC ne zahtijeva nikakvo razrjeđivanje i jamči brzu i dugotrajnu zaštitu od: virusa (adenovirus, HIV, HBV, HCV), bakterija (Gram-pozitivne, Gram-negativne), mikobakterija (uključujući *Mycobacterium tuberculosis*) i gljivica (kvasci i plijesni). Djeluje i u prisutnosti organskog materijala (krv, slina, organski eksudati itd.). Proizvod brzo isparava. Nisu primijećeni nikakvi korozivni učinci na materijalima od kojih su izrađeni medicinski proizvodi ili biomedicinska oprema. Preporučuje se izbjegavanje uporabe na materijalima na koje može utjecati alkohol.

Način upotrebe: Protresti prije upotrebe. GERMOCID BASIC raspršite izravno na površine i predmete koje tretirate. Ostavite da djeluje pa prebrišite jednokratnom krpom ili papirom.

GERMOCID BASIC u roku od pet minuta djelovanja djeluje protiv Gram-pozitivnih i Gram-negativnih bakterija, kao i protiv gljivica (kvasaca i plijesni) i virusa (uključujući HIV, HBV i HCV), a protiv mikobakterija (uključujući TBC) u roku od 60 minuta.

Sastav:

100,0 g proizvoda sadrži:
Klorheksidin diglukonat 0,1 g;
Benzalkovijev Klorid 0,1 g;
Etilni Alkohol 45,0 g;
Izopropilni Alkohol 15,0 g;
koformulanti;

prečišćena voda g.g. na 100,0 g

Upozorenja: H226 Zapaljiva tekućina i para. H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka. H412 Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. P210 Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice. P370+P378 U slučaju požara: za gašenje rabiti ugljični dioksid, pjena, kemijski prah. P337+P313 Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika. P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Profesionalna uporaba. Izbjegavajte korištenje na materijalima koji se mogu oštetiti alkoholom. The proizvod nije kompatibilan s deterdžentima i anionskim tenzidima. Nakon otvaranja, ako se pravilno skladišti, proizvod zadržava rok trajanja naveden na etiketi. Nemojte koristiti oštećenu ambalažu. Čuvati na hladnom i suhom mjestu i dalje od izvora topline. Vanjska uporaba.

Valjanost: tri (3) godine

Serijski broj i istek valjanosti: vidi pakiranje

MEDICINSKI PROIZVOD CE 0546, Europska direktiva 93/42/EEZ

Proizvođač:

GERMO S.p.A. – Via Giotto 19/21 – 20032 Cormano (MI) Tel. 02 663 01 938

www.germo.it - info@germodis.com

MADE IN ITALY

Upozorenja se mogu razlikovati ovisno o ažuriranjima sigurnosnog lista proizvoda