

Zest™

NASAL MASK

Patient Instructions for Use

SHEET A CONTENTS

- English
- 简体中文版 (Simplified Chinese)
- 繁體中文版 (Traditional Chinese)
- Dansk (Danish)
- Deutsch (German)
- Ελληνικά (Greek)
- Español (Spanish)
- Français (French)
- Italiano (Italian)

SHEET B CONTENTS

- 日本語 (Japanese)
- 한국어 (Korean)
- Nederlands (Dutch)
- Norsk (Norwegian)
- Português (Portuguese)
- Suomi (Finnish)
- Svenska (Swedish)
- Türkçe (Turkish)

CE 0123

Fisher & Paykel
HEALTHCARE



SHEET A

Zest™ 鼻罩

病人使用说明

Zest™ 小型鼻罩适用于体重小于 30 公斤 (66 磅)、经医生诊断需持续通气正压通气 (CPAP) 或双水平正压呼吸器治疗的病人。Zest™ 小型鼻罩旨在为供一人或在家庭中使用, 及在能够进行适当消毒的医院或临床环境中多人使用。

Zest™ 鼻罩和 Zest™ 大号鼻罩适用于经医生诊断需持续通气正压通气 (CPAP) 或双水平正压呼吸机治疗的病人。Zest™ 鼻罩和 Zest™ 大号鼻罩可在家庭或在供一人或在家庭中使用, 及在能够进行适当消毒的医院或临床环境中多人使用。

适用于为用户提供持续正压通气和双水平正压通气的界面连接装置。适用于单一人 (体重大于 30 公斤) 在家中或多个成人或在医院或其他可能对多患者使用进行正确消毒的医疗环境中使用。重量为 100g 或 3.5 盎司。

使用说明

- 鼻罩的工作压力范围是 3.25 厘米水柱。
- 鼻罩的工作温度范围是 5-40 °C (40-104 °F)。
- 每次使用后:
- 检查鼻罩是否有损坏。如发现任何老化(裂纹、撕裂), 请勿使用并更换新品。
- 检查 Zest™ 鼻罩是否清洁。
- 检查出口气, 如有脏物请停止使用

注意: 不按上述说明进行操作可能会影响鼻罩的性能和安全性。

警告

- 请勿将电源线或治疗仪的电源线使用与持续正压 CPAP/双水平 Bi-Level 呼吸机系统配套的电源线。在持续正压 CPAP/双水平 Bi-Level 呼吸机系统正在工作时请勿取下可拆卸使用本鼻罩。
- 警告:** 持续正压 CPAP/双水平 Bi-Level 呼吸机系统需配合特定的鼻罩使用, 即需带有排气口, 保证气流持续地排出。当持续正压 CPAP/双水平 Bi-Level 呼吸机开启并正常工作, 持续正压 CPAP/双水平 Bi-Level 呼吸机中的空气会通过带有排气口的鼻罩的排气口排出。如果持续正压 CPAP/双水平 Bi-Level 设备停止工作, 就没有足够的新鲜空气之流量, 呼出的废气会被重新吸入。在特定环境下重新吸入呼出气体数秒钟即可造成危险。
- 过高的持续正压 CPAP 或双水平 Bi-Level 压力使用造成过高的气流压力无法将管腔内的呼出气体完全排出, 可能发生重新吸入。
- 不要堵塞排气口。每次使用前确保气体能从排气口流出。
- 如果感到不适或中心, 请不要使用鼻罩, 联系您的医疗保健服务人员。
- 如果发生不适或过敏反应, 请立即停止使用。如果发生此类现象, 请向您的医生咨询。
- 中国境内使用: 研究表明中风患者对 CPAP 治疗的顺应性较低。对中风患者进行 CPAP 治疗可能降低卒中复发和死亡率。
- 如果将 Zest™ 鼻罩在多个患者间重复使用, 请阅读 Zest™ 鼻罩多个患者使用清洁说明。

- 本鼻罩只适合本说明书所述用途使用。
- 美国联邦药品与医疗器械管理局(FDA)批准注册。

如需更多的资料, 请联系您的供应商。

佩戴鼻罩

- 从鼻罩的背面上去胶塑料盖。
- 一只手握住鼻罩, 另一只手握开 Stretchgear™ 头套 (H), 使它刚好能够舒适地戴在头上。
- 轻轻地拉鼻罩戴在脸上, 盖住鼻子, 然后慢慢地把头套扣到头。
- 把头套放在 Glider™ 鼻罩上方 (E) 上。
- 把下唇的系带尽量往下拉紧于下巴, 轻轻绷紧系带, 与鼻罩压力设置的持续正压或双水平 CPAP 或双水平呼吸机 Level 设置保持一致。
- 如果感觉, 感觉下唇系带可以松紧度调整更舒适。
- 如果松开鼻罩, 应将 Stretchgear™ 头套从 Glider™ 滑套上解开。



- 佩戴提示**
- 面部的位置应轻轻地放在鼻罩上, 同时面部系带不要拉得太紧。
- 在轻轻拉头罩和下方的系带后如面部有任何不适, 请调整鼻罩直到面部感觉不动为止。这能防止面部长时间为气膨胀, 然后再将鼻罩重新固定回去。

清洗鼻罩

为确保您的 Zest™ 鼻罩持续的安全性及舒适性:

- 首次使用之前: 用温水和中性洗洁剂清洗鼻罩和 Stretchgear™ 头套 (H), 避免浸泡超过 10 分钟, 然后用清水冲洗, 自然晾干, 避免阳光直射。
- 每次使用后: 将鼻罩置于良好状态。如果出现老化或损坏, 请勿使用。
- 每次使用后: 1. 将硅胶密封套 (C)、泡沫垫 (D) 和头套 (H) 从鼻罩外壳 (A) 上拆卸下来。2. 用温水和中性洗洁剂清洗鼻罩外壳, 避免浸泡超过 10 分钟。3. 用清水冲洗干净, 确保所有剩余的肥皂完全清洗干净。4. 用湿布擦拭泡沫垫 (请勿将泡沫垫放入水中)。5. 所有部件在自然通风处晾干, 自然晾干, 以后下一次使用。
- 每天: 用微温的肥皂水清洗 Stretchgear™ 头套 (H), 避免浸泡超过 10 分钟, 然后用清水冲洗, 自然晾干, 避免阳光直射。

- 注意:**
- 避免鼻罩浸泡超过 10 分钟。
- 请勿使用漂白剂、消毒剂、漂白剂、氨或强酸性的产品清洗鼻罩。
- 不要将鼻罩存放在可能增加降解的地方。

上述行为可能会导致鼻罩老化或损坏, 缩短它的使用寿命。如果您的 Zest™ 鼻罩出现损坏或破裂应立即停止使用并马上更换新的配件。

组装您的鼻罩


您的 Zest™ 鼻罩已完全准备好, 可随时使用。但是, 当您准备清洗时, 请按以下方法重新组装。

- 将泡沫垫 (D) 按照图中所示的方向装入硅胶密封套 (C)。
- 从硅胶密封套顶部的前端开始, 安装鼻罩外壳 (A) 上, 将两者按紧。
- 将 Stretchgear™ 头套 (H) 穿入头罩, 将头套穿入头罩上方, 并将四条系带安全扣连接并扣紧 (E) 上相对应的插槽中。以上操作只能在鼻罩内的头套套壳内完成并符合 FDA 的认证。

*VELCRO® 是 Velcro Industries B.V. 的注册商标。

拆卸以便进行清洗

- 从硅胶密封套 (C) 上拆下泡沫垫 (D)。
- 将硅胶密封套 (C) 从鼻罩外壳 (A) 上拆下。
- 从硅胶密封套 (C) 上拆下硅胶泡沫垫 (D)。

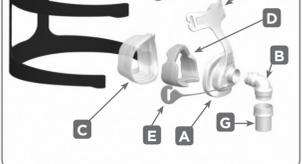

A - 鼻罩外壳	D - 泡沫垫	G - 气路接头
B - 泡沫	E - Glider™ 滑套	H - Stretchgear™ 头套
C - 硅胶密封套	F - 前额带	

Zest™ 及其配件不含乳胶。
许多人发现持续正压呼吸机 CPAP 或双水平呼吸机 Bi-Level 治疗鼻子和喉咙发干, 使用加湿器或加湿器可以减少这些症状。

保修和废弃处理

保修声明
Fisher 和 Paykel 保健公司 (Fisher & Paykel Healthcare) 在以下情况下对鼻罩 (不包括管路和配件) 提供有限保修: 提供有限保修: 当按照说明书要求使用时, 由于加工、材料上的缺陷或制造缺陷造成不能正常使用。Fisher 和 Paykel Healthcare (Fisher & Paykel Healthcare) 正式发布的产品保修书有详细规定的。自用产品保修书内列有免费更换、保修期限和保修条款及除外条件的, 详见 <http://www.fphcare.com/osa/product/Warranty.asp>。


废弃处理
本产品不含任何有害物质, 可以普通垃圾处理。

Zest™ 鼻罩

病人使用说明


Zest™ Petite 超紧凑型鼻罩适用于体重小于 30 公斤 (66 磅) 且经医生诊断需要 CPAP (持续气道正压) 或 Bi-Level 呼吸机治疗的病人。Zest™ Petite 超紧凑型鼻罩适用于家中或医院环境中多人使用, 也适合在能够进行适当消毒的医院或其他临床环境中多人使用。

- 把连接管 (I) 的一端连接在鼻罩上的连接接头 (G) 上, 较小的一端连接在主机呼吸机的气路上。
- 打开并关闭 (F) 把压力管和/或氧气管 (S) 系紧在接口 (D) 上。
- 注意:** 鼻罩与主机连接时, 每个接口都要用适当的力度拧紧。只打开所限制了的盖子。
- 注意: 过量的鼻罩内空气会导致, 吸入的氧气浓度会降低。患者应调整鼻罩, 鼻罩内空气流量的不同而变化。
- 警告:** 鼻罩只能在持续正压 CPAP/双水平 Bi-Level 通气中使用, 在呼吸机关闭时必须关闭呼吸机。
- 警告:** 鼻罩必须在清洁和干燥的状态下使用。在呼吸机及鼻罩的连接处可能会有较大的危险。
- 警告:** 鼻罩表面不要接触气体管路, 禁止使管路在吸入的气体中接触。
- 警告:** 请不要使用医用聚乙烯 (PVC) 的压力和/或氧气管, 这会使管路破裂。
- 警告:** 请勿与 PVC 接触, 可能会过早地脱落接头。

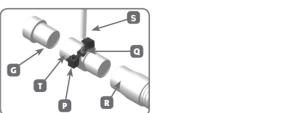

技术规格

呼吸气流	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25
Zest™ 鼻罩具有气气排放系统, 通过鼻罩前一根细管的空气出口排出呼出的二氧化碳。在特定情况下不要堵塞这些排气口。这使受控的呼气具鼻罩内二氧化碳完全排出的保证。												
压力 (厘米水柱)	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25
流量 (升/分钟)	18	24	29	32	35	38	41	45	47	50	52	54

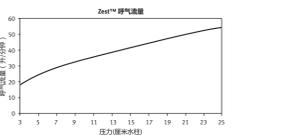

气流流量	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25
通过鼻罩的压力在流量为 50 升/分钟时 7.0 ± 0.3 厘米水柱 通过鼻罩的压力在流量为 100 升/分钟时 7.0 ± 0.3 厘米水柱												

鼻罩死腔	Zest™ PETITE = 40 cc	Zest™ = 60 cc	Zest™ PLUS = 90 cc
噪音	噪音的噪音功率水平是 30 分贝, 误差是 2.5 分贝。 噪音的噪音功率水平是 23 分贝, 误差是 2.5 分贝。		

实验室清洁步骤说明

您的 Zest™ 鼻罩已准备好为病人使用。在多个病人间重复使用时请遵循以下原则。

- 消毒清洗**
在清洗前, 先用小刷子将鼻罩上可见的污垢在自来水下彻底冲洗干净
- 清洗不当可能会导致本装置消毒不相配。**
- 高水平消毒参数**

鼻罩结构	消毒参数
硅胶密封套	Pasteurization 在 70 °C (158 °F) 保持 30 分钟, 25 °C (77 °F) 保持 30 分钟, 或 80 °C (176 °F) 保持 10 分钟
泡沫	Cidec® OPA 在 20 °C (68 °F) 浸泡 30 分钟, 或 Hexanols G+® 按照制造商的要求 - 但是浸泡 30 分钟而不是 15 分钟。
头套	在温肥皂水中清洗, 然后自然晾干。
泡沫垫	更换新配件。

Zest™ 鼻罩可承受 20 次上述高水平消毒方式。如果鼻罩被损坏请停用。

请联系当地的家政服务产品经销商以取得更详细资料。

请阅读您当地的卫生建议以取得更详细资料。

请联系您当地的家政服务产品经销商以取得更详细资料。

鼻罩尺寸	尺寸 (mm)	说明
适用范围	M L P	
A00439U	67 56.5 89.4	108.7
A00440U	69 66.5 89.4	123.2
A00441U	71 76.5 89.4	128.2

鼻罩重量	适用范围	重量
A00439U	68	
A00440U	78	
A00441U	86	

符号定义

REF	自类编号	制造日期	S	小号头套
REF	制造商	请参考使用指南	M-L	中大号头套
REF	欧洲授权代表	注册事项	S	小号硅胶密封套
REF	批号	符合医疗产品指令 93/42/EEC	M	中号硅胶密封套
REF	适用范围	Rx only	L	大号硅胶密封套

生产日期: 参见产品标签
有效期: 参见产品标签。请查看产品标签上的有效日期

生产企业名称: 费雪和派凯尔保健有限公司
生产企业地址: 新西兰奥克兰依斯特里特 100 号
联系方式: +64 9 574 1000
费雪和派凯尔 F&P Zest™ 鼻罩和配件均不含天然乳胶。
本说明书是在收到制造商的最新更新后准备的。
储存温度: -20°C 至 50°C (4°F 至 122°F)

产品名称: 呼吸器
产品规格: 请参见以下型号: A00439U, A00440U, A00441U
注册编号: 新西兰药监局注册 2014 第 2561797 号
产品标准: Y201/INZ 1309-2014 <<呼吸器>>

Zest™ 鼻罩

病人使用说明

Zest™ Petite 超紧凑型鼻罩适用于体重小于 30 公斤 (66 磅) 且经医生诊断需要 CPAP (持续气道正压) 或 Bi-Level 呼吸机治疗的病人。Zest™ Petite 超紧凑型鼻罩适用于家中或医院环境中多人使用, 也适合在能够进行适当消毒的医院或其他临床环境中多人使用。

Zest™ 鼻罩和 Zest™ 大号鼻罩适用于经医生诊断需持续通气正压通气 (CPAP) 或双水平正压呼吸机治疗的病人。Zest™ 鼻罩和 Zest™ 大号鼻罩可在家庭或在供一人或在家庭中使用, 及在能够进行适当消毒的医院或临床环境中多人使用。

操作说明

- 鼻罩的工作压力范围是 3.25 厘米水柱。
- 鼻罩的工作温度范围是 5-40 °C (40-104 °F)。
- 在每次使用鼻罩前:
- 检查鼻罩是否有损坏。如有任何老化(裂纹、撕裂等等) 停止使用并寻求更换。
- 检查出口气, 如有脏物请停止使用
- 检查 Zest™ 鼻罩是否清洁。

注意: 不按上述操作说明可能会有影响鼻罩的安全性和风险。

警告

- 本呼吸器只能和你的医生或呼吸治疗师所推荐的 CPAP 或双水平呼吸机一起使用。只有在 CPAP 或双水平呼吸机辅助通气打开, 而且正确调下才能使用。
- 警告:** CPAP 或双水平呼吸机系统需配合特定的鼻罩使用, 即需带有排气口的。这些排气口可避免或呼出废气量中二氧化碳。当 CPAP 或双水平呼吸机打开并正常工作, 持续正压 CPAP/双水平 Bi-Level 呼吸机中的空气会通过带有排气口的鼻罩的排气口排出。如果持续正压 CPAP/双水平 Bi-Level 设备停止工作, 就没有足够的新鲜空气之流量, 呼出的废气会被重新吸入。在特定环境下重新吸入呼出气体数秒钟即可造成危险。
- 过高的持续正压 CPAP 或双水平 Bi-Level 压力使用造成过高的气流压力无法将管腔内的呼出气体完全排出, 可能发生重新吸入。
- 不要堵塞排气口。每次使用前确保气体能从排气口流出。
- 如果感到不适或中心, 请不要使用鼻罩, 联系您的医疗保健服务人员。
- 如果发生不适或过敏反应, 请立即停止使用。如果发生此类现象, 请向您的医生咨询。
- 中国境内使用: 研究表明中风患者对 CPAP 治疗的顺应性较低。对中风患者进行 CPAP 治疗可能降低卒中复发和死亡率。
- 如果将 Zest™ 鼻罩在多个患者间重复使用, 请阅读 Zest™ 鼻罩多个患者使用清洁说明。

- 本呼吸器只能用于所设计的指定用途, 严格按照本说明书中所述使用。
- 美国联邦药品与医疗器械管理局(FDA)批准注册。

如需更多的资讯和你所在地的家庭健康护理人员联系。

佩戴你的鼻罩

- 将鼻罩从后部套套上取下。
- 一只手握住鼻罩, 另一只手将 Stretchgear™ 头套 (H) 戴到刚好能够舒适地戴在头上。
- 轻轻地拉鼻罩戴在脸上, 盖住鼻子, 然后将头套慢慢地拉到头。
- 把头套放在 Glider™ 鼻罩上方 (E) 上。
- 把下唇的系带尽量往下拉紧于下巴, 轻轻绷紧系带, 使其与呼吸器设置的持续正压或双水平 CPAP 或双水平呼吸机 Level 设置保持一致。
- 如果感觉, 感觉下唇系带可以松紧度调整更舒适。
- 如果松开鼻罩, 应将 Stretchgear™ 头套从 Glider™ 滑套上解开。



- 佩戴提示**
- 面部的位置应在鼻罩上方, 带子不是太紧的情况下松弛在鼻罩上。
- 在轻轻拉鼻罩和下巴的系带后如面部有任何不适, 请调整鼻罩直到面部感觉不动为止。这能防止面部长时间为气膨胀, 然后再将鼻罩重新固定回去。

清洗你的鼻罩

为了确保你的 Zest™ 鼻罩具有持续的安全性及舒适性:

- 首次使用之前: 用温水和中性洗洁剂清洗鼻罩和 Stretchgear™ 头套 (H), 避免浸泡超过 10 分钟, 然后用清水冲洗, 自然晾干, 避免阳光直射。
- 每次使用后: 将鼻罩置于良好状态。如果出现老化或损坏, 请勿使用。
- 每次使用后: 1. 将硅胶密封套 (C)、泡沫垫 (D) 和头套 (H) 从鼻罩外壳 (A) 上取下。2. 用温水和中性洗洁剂清洗鼻罩外壳, 避免浸泡超过 10 分钟。3. 用清水冲洗, 确保所有剩余的肥皂完全清洗干净。4. 用湿布擦拭泡沫垫 (请勿将泡沫垫放入水中)。5. 在所有部件在自然通风处晾干, 自然晾干, 以后下一次使用。
- 每天: 用微温的肥皂水清洗 Stretchgear™ 头套 (H), 避免浸泡超过 10 分钟, 然后用清水冲洗, 自然晾干, 避免阳光直射。


- 注意:**
- 鼻罩在肥皂水中浸泡时间不要超过 10 分钟。
- 请勿将鼻罩放入漂白剂中。
- 不要使用酒精、消毒剂、漂白剂、氨或强酸性的产品清洗鼻罩。
- 不可将鼻罩存放在有阳光直射的地方。

上述行为可能会导致鼻罩老化或损坏, 缩短其使用寿命。
如果您的 Zest™ 鼻罩出现损坏, 应立即停止使用, 并更换新的配件。

装配你的呼吸器

你的 Zest™ 呼吸器在出厂时已全部装配好, 即可使用。但是当你清洗呼吸器时, 请按以下步骤重新装配。

- 将泡沫垫 (D) 按照图中所示的方向装入硅胶密封套 (C)。
- 从硅胶密封套顶部的前端开始, 将鼻罩外壳 (A) 扣合连接并扣紧合处按紧。
- 将 Stretchgear™ 头套 (H) 穿入头罩, 将头套穿入头罩上方, 并将四条系带安全扣连接并扣紧 (E) 上相对应的插槽中。以上操作只能在鼻罩内的头套套壳内完成并符合 FDA 的认证。

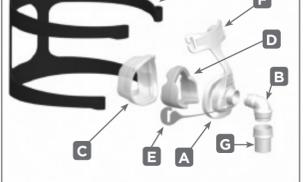

Zest™ 鼻罩和其零件不含乳胶。
许多人发现在接受 CPAP 或双水平呼吸机治疗时接口处有鼻罩不适现象。增加使用加湿器可以减少这些症状。

保固和廢棄物處理

保固聲明
費雪和派凱爾保健公司 (Fisher & Paykel Healthcare) 對呼吸器 (不包括管路和配件) 提供有限保固: 提供有限保固: 當按照說明書要求使用時, 由於加工、材料上的缺陷或製造缺陷造成不能正常使用。Fisher 和 Paykel Healthcare (Fisher & Paykel Healthcare) 正式發布的產品保修書有詳細規定的。自用產品保修書內列有免費更換、保固期限和保固條款及除外條件的, 詳見 <http://www.fphcare.com/osa/product/Warranty.asp>。

廢棄物處理
本產品不含任何有害危險物質, 廢棄物可以普通垃圾一起處理。


氧氣/壓力埠口連接頭

病人使用說明書

如欲將壓力埠口 (D) 的連接頭, 可用氧氣/壓力埠口連接頭 (零件編號 900HC42), 1. 將連接頭 (I) 大口和油環上的旋轉鎖 (C) 連接, 小口和主氧環 (R) 連接, 2. 打開螺絲 (F), 將壓力埠口 (D) 旋入。


注意: 每個接口完全一樣。任何一個接口都可用於提供氧氣或壓力。只需將螺絲 (F) 旋入即可。

- 注意:** 當氧氣和呼吸器一起使用時, 應先將壓力大小、病人呼吸器調好, 再將呼吸器與氧氣連接。
- 警告:** 當 CPAP 或雙水平呼吸机輔助不通暢, 如鼻罩漏氣時, 這入鼻罩的氣流可能會引起呼吸器與呼吸器一起使用時, 不要吸。也不要在用氧氣和呼吸器的人附近吸烟。
- 警告:** 不要使用醫用級之 PVC 材料的壓力或氧氣管, 使用非醫用的管。
- 警告:** 同氧氣之 PVC 管接頭會引起接口破裂。

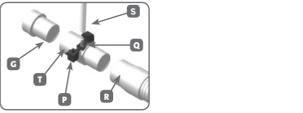

技術參數規格

壓力 (厘米水柱)	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25
Zest™ 呼吸流量												

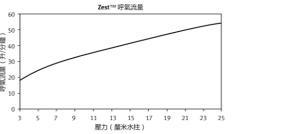

鼻罩死腔	Zest™ PETITE 死腔為 40 cc	Zest™ 鼻罩死腔為 60 cc	Zest™ PLUS 鼻罩死腔為 90 cc
噪音	噪音的噪音功率水平是 30 分贝, 误差是 2.5 分贝。 呼吸器的噪音功率水平是 23 分贝, 误差是 2.5 分贝。		

清潔与消毒
清洗前, 先用小刷子将鼻罩上可见的污垢在自来水下彻底冲洗干净

清洗不当可能会导致消毒不相配。

高水平消毒参数

呼吸器结构	消毒参数
硅胶密封套	巴塘福氏殺菌法 在 70 °C (158 °F) 保持 30 分钟, 25 °C (77 °F) 保持 30 分钟, 或 80 °C (176 °F) 保持 10 分钟
泡沫	Cidec® OPA 在 20 °C (68 °F) 浸泡 30 分钟, 或 Hexanols G+® 按照制造商的要求 - 但是浸泡 30 分钟而不是 15 分钟。
头套	在温肥皂的温水中用手清洗, 然后自然晾干。
泡沫垫	更换新配件。

Zest™ 鼻罩已经通过认证可在上述消毒条件下承受 20 次的循环。如有损坏, 停止使用。

请联系当地的家政服务产品经销商以取得更详细资料。

请联系您当地的家政服务产品经销商以取得更详细资料。

请联系您当地的家政服务产品经销商以取得更详细资料。

鼻罩尺寸	尺寸 (mm)	说明
适用范围	M L P	
A00439U	67 56.5 89.4	108.7
A00440U	69 66.5 89.4	123.2
A00441U	71 76.5 89.4	128.2

鼻罩重量	适用范围	重量
A00439U	68	
A00440U	78	
A00441U	86	

符号定义

REF	自类编号	制造日期	S	小号头套
REF	制造商	请参考使用指南	M-L	中大号头套
REF	欧洲授权代表	注册事项	S	小号硅胶密封套
REF	批号	符合医疗产品指令 93/42/EEC	M	中号硅胶密封套
REF	适用范围	Rx only	L	大号硅胶密封套

生产日期: 参见产品标签
有效期: 参见产品标签。请查看产品标签上的有效日期

生产企业名称: 费雪和派凯尔保健有限公司
生产企业地址: 新西兰奥克兰依斯特里特 100 号
联系方式: +64 9 574 1000
费雪和派凯尔 F&P Zest™ 鼻罩和配件均不含天然乳胶。
本说明书是在收到制造商的最新更新后准备的。
储存温度: -20°C 至 50°C (4°F 至 122°F)

产品名称: 呼吸器
产品规格: 请参见以下型号: A00439U, A00440U, A00441U
注册编号: 新西兰药监局注册 2014 第 2561797 号
产品标准: Y201/INZ 1309-2014 <<呼吸器>>