



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

BILANCIA DIGITALE IN VETRO
GLASS DIGITAL SCALE
PÈSE-PERSONNES EN VERRE À AFFICHAGE NUMÉRIQUE
GLASPERSONENWAAGE
BÁSCULA DIGITAL DE CRISTAL
BALANÇA DIGITAL DE VIDRO
ΨΗΦΙΑΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ
SZKLANA WAGA CYFROWA
چاگز ن م یلات یج ی د نازی م
DIGITAALINEN LASIVAAKA
STAKLENA DIGITALNA VAGA
ÜVEGBŐL KÉSZÜLT DIGITÁLIS MÉRLEG
CÂNTAR DIGITAL DIN STICLĂ
DIGITAL GLASVÁG

MANUALE D'USO E MANUTENZIONE
USE AND MAINTENANCE BOOK
INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT ET ENTRETIEN
BETRIEBS UND WARTUNGS ANWEISUNGEN
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO
MANUAL DE USO E MANUTENÇÃO
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
PODRĘCZNIK EKSPLOATACJI I KONSERWACJI
KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS
PRIRUČNIK ZA UPOTREBU I ODRŽAVANJE
HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ
MANUAL DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE
ANVÄNDNINGSG- OCH UNDERHÅLLSMANUAL

REF GBS-810D (GIMA 27248 - 27249)

Fabbricato da/Made by/Faite par/Hecho por/Feito por/Hergestellt von/Zrobione przez/ᾠτιαγμένο από/
GUANGDONG TRANSTEK MEDICAL ELECTRONICS.CO.LTD.
Jin'an Road , Minzhong, Zhongshan 528441, China
Made in China

Importato e distribuito da/Imported and distributed by
GIMA S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



FUNKCIÓK ÉS TULAJDONSÁGOK


- Automata bekapcsolás
- Automata kikapcsolás
- Súly mértékegységek: kg, lb, st:lb
- Kapacitás: 150 kg/330 lb/23 st:8 lb
- Fokbeosztás: 0,1 kg/0,2 lb/0,2 lb (1 lb, ≥20 st)
- Túlterhelés jelzése: “— — — —”
- Lemerülő elem jelzése “Lo”
- Tápellátás: 1 x CR2032 elem

LCD teljes kijelző



AZ ELEM CSERÉJE

- Győződjön meg arról, hogy a +/- pólusok megfelelő helyzetben vannak.
 - Szükség esetén egy arra megfelelő eszközzel vegye ki az elemet az elemtartóból.
- Használat előtt távolítsa el a szigetelő csíkot.

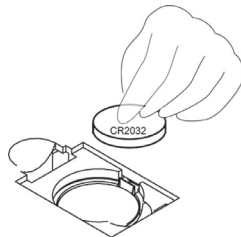

FUNKCIÓGOMBOK



HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

1. Nyomja meg a UNIT gombot a bekapcsoláshoz és a mértékegység kiválasztásához.
2. Helyezze a mérleget szilárd, sík talajra, hagyja, hogy automatikusan lekapcsoljon.
3. A felhasználónak közvetlenül a mérleg felületére kell állnia. A kijelző addig villog, amíg meg nem állapítja a súlyt. 10 másodperc elteltével automatikusan kikapcsol.
4. Ha nem végez műveletet, automatikusan kikapcsol
5. Ha nem használja, tárolja vízszintes helyzetben és ne helyezzen rá semmilyen tárgyat.



FIGYELEM:

Ne használja a mérleget szőnyegen

A pontos súlymérés érdekében, amikor mozgatni kell a mérleget, akkor először kapcsolja be (érintéssel) és várja meg, amíg kikapcsol. Ezután ismét ráállhat a mérlegre és megmérheti a súlyát. Ellenkező esetben hozzáadja a mérleg saját súlyát is.



ÁRTALMATLANÍTÁS:

A terméket nem szabad a többi háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A felhasználóknak ezt a berendezést az elektromos és elektronikus berendezések speciális újrahasznosítási központjába kell szállítaniuk. Az újrahasznosítási központokkal kapcsolatos további információért forduljon a helyi hatóságokhoz, a helyi újrahasznosítási központhoz vagy az üzlethez, amelyben a terméket vásárolta. Ha a terméket nem megfelelő módon ártalmatlanítja, a nemzeti jogszabályok és rendelkezések szerinti pénzbírságok vagy büntetések alkalmazhatók.

GIMA JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A 12 hónapos Gima B2B standard jótállás érvényes.