



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**BILANCIA VETERINARIA - MEDIA**  
**DIGITAL VET SCALE - MEDIUM**  
**BALANCE VÉTÉRINAIRE DIGITALE - MOYENNE**  
**BÁSCULA VETERINARIA - MEDIA**  
**ESCALA VETERINÁRIA - MÉDIA**  
**VETERINÄRSKALA – DURCHSCHNITT**  
**ΒΕΤΕΡΙΝΑΡΕΗ ΚΑΙΤΑΡ - СРЕДЕН**  
**VETERINÁRNÍ MĚŘÍTKO - PRŮMĚR**  
**ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ - ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ**  
**ELÄINLÄÄKINVÄLINEN ASAKA - KESKIMÄÄRIN**  
**ÁLLATORVOSI MÉRLEG - ÁTLAGOS**  
**SKALA WETERYNARYJNA - ŚREDNIA**  
**SCALA VETERINARĂ – MEDIE**  
**VETERINÁRNA STUPEŇ - PRIEMER**

**REF 6680 (Gima 27258) - 6681 (Gima 27259)**

Manufacturer/Fabbricante/Fabricant/Fabricante/ Hersteller/ производител/  
Výrobce/ Κατασκευαστής/ Valmistaja/ Gyártó/ Producent/ Producător

Výrobca:

**Momert Zrt.**

2400 Dunaújváros - HUNGARY, Papírgyári út 12-14

Made in Hungary


Distribuito da/Distributed by/Distribué par/Distruido por/ Vertrieben von/ Разпространява се от/  
Distribuovaný/Διανέμονται από/ Jakelija/Forgalmazza/ Dystrybuowane przez/ Distribuit de/ Distribuovaný

**Gima S.p.A.**

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

[gima@gimaitaly.com](mailto:gima@gimaitaly.com) - [export@gimaitaly.com](mailto:export@gimaitaly.com)

[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

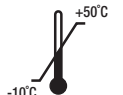



Kérjük, hogy a termék használata előtt figyelmesen olvassa el a teljes Kezelési kézikönyvet. Tartsa a kézikönyvet biztonságos helyen a további konzultáció céljából. Győződjön meg arról, hogy a terméket használó egyéb személyek tisztában vannak ezekkel az utasításokkal.

### **FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK:**

- Ügyeljen az elem jelzett polarítására annak behelyezésekor és cseréjekor.
- Ha a készüléket előreláthatólag hosszabb ideig nem fogja használni, vegye ki az elemet.
- Az egységet működés közben ne hagyja felügyelet nélkül.
- Jelen készüléket nem használhatják csökkent fizikai, szenzoriális vagy értelmi képességű, vagy megfelelő tapasztalattal ill. ismeretekkel nem rendelkező személyek (a gyermekeket is beleértve), hacsak nem kaptak betanítást és felügyeletet a gép használatához olyan személytől, aki a biztonságukért felel. A gyermekeket felügyelni kell annak biztosítása érdekében, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- A termék csak a Kezelési kézikönyvben leírt, tervezett célra használható.
- Az egységet csak stabil, vízszintes felületen használja.
- A fedél tisztítása, fel- vagy leszerelése előtt kapcsolja ki az egységet és vegye ki az elemet!
- Az egység tisztításához ne használjon dörzsölő vagy vegyileg agresszív anyagokat.
- Ne használja az egységet, ha az nem működik megfelelően vagy ha leejtették, sérült vagy folyadékokkal került érintkezésbe. A teszteléshez és a javításhoz szállítsa az egységet egy hivatalos szervizközpontba.
- Az egység kizárólag háztartási használatra alkalmas. Nem kereskedelmi működésre tervezték.
- Tartsa az egységet hőforrásoktól, mint például radiátorok, sütők stb. távol. Ne tegye ki az egységet közvetlen napfénynek vagy nedvességnek.
- Vizes vagy nedves kézzel nem szabad az egységhez érni.
- A termék törékeny mérőeszköz. Előzze meg annak összetörését vagy leesését.
- Ne saját maga javítsa a készüléket. Forduljon hivatalos szervizközpontoz.

### **A GYÁRTÓ UTASÍTÁSAINAK NEM BETARTÁSA A JÓTÁLLÁSOS JAVÍTÁS ELUTASÍTÁSÁT EREDMÉNYEZHETI!**

#### **JELLEMZŐK:**

- Precíziós mérőrendszer
- Automatikus nulla visszaállítás
- Automatikus kikapcsolás
- Alacsony energiaszint jelzése
- Túlterhelés jelzése

#### **MŰSZAKI PARAMÉTEREK**

Feszültség: 1db 3V, CR2032 lítium elem (mellékelve)  
Max. mérhető súly: 3-100 kg  
Súlymérés növekedés lépésköze: 100 g  
Kijelző mérete: LCD átmérő = 8,0 cm, 3,15 hüvelyk  
Rakfelület: 6680 (GIMA 27258): 635x355 mm; 6681 (GIMA 27259): 830x620 mm  
Súlymérő egységek: kg, lb, st  
Üzemi/tárolási hőmérséklet: 10-40 °C/-10-50 °C

#### **HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK**

A mérleg legelső használata előtt kérjük, távolítsa el a szigetelő fület az elemről a mérleg hátoldalán.  
Helyezze a mérleget sima, kemény, sík felületre. Puha felületen (mint például szőnyegen) a mérleg pontatlan értéket mutathat.  
A mérleg indításához lábával érintse meg a rakfelület közepét.  
Először a kijelző futó "8"-as számot mutat, majd a "0,0" jelenik meg a kijelzőn.  
Várja meg, amíg a "0,0" megjelenik!  
Helyezze a háziállatot a mérlegre.  
Ezután a háziállat súlya megjelenik a kijelzőn és kétszer villog. A mért súly körülbelül 10 másodpercig látható.  
Ha a mérleg bekapcsolása után nem történik súlymérés, automatikusan kikapcsol 60 másodperc eltelte után.

#### **AZ ELEM CSERÉJE**

Az elemet ki kell cserélni, amikor a kijelzőn az alábbi felirat jelenik meg:



Kérjük, nyissa ki az elemtartót a mérleg hátoldalán és a fekete, műanyag rögzítő fül kihúzásával óvatosan vegye ki az elemet. A rögzítő fül az elem tetején található. Ne törje el a fém fület. Cserélje ki az elemet egy újra. A kimerült elemet a megfelelő helyre kell kidobni.

AZ ELEMÉKET A JÓTÁLLÁS NEM TARTALMAZZA!

#### **TÚLTERHELÉS FIGYELMEZTETÉS**

Amikor a mérleg túlterhelt, az alábbi felirat jelenik meg:



#### **TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS**

Az egység felületét csak nedves ruhával szabad tisztítani. Ne használjon tisztítószereket vagy kemény tárgyakat, mert károsíthatják az egység felületét! Soha ne tisztítsa az egységet folyó víz alatt, ne öblítse le és ne merítse vízbe!

#### **JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS**

Minden olyan kiterjedt karbantartást vagy javítást, amely a termék belső részeihez való hozzáférést igényel, szakszerviz központnak kell végeznie.

#### **KÖRNYEZETVÉDELEM**

- A csomagolóanyagokat és az elavult készülékeket újra kell hasznosítani.
- A szállítódoboz szelektált hulladékként ártalmatlanítható.
- A polietilén zsákokat át kell adni újrahasznosítás céljából.



**Ártalmatlanítás:** A terméket nem szabad a többi háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A felhasználóknak ezt a berendezést az elektromos és elektronikus berendezések speciális újrahasznosítási központjába kell szállítaniuk.

#### **GIMA GARANCIÁLIS FELTÉTELEK**

A termékre a Gima szokásos, 12 hónapos B2B garanciája érvényes.